

## Curatest - testplaster



**Epikutan-testplaster er let at sætte på – let at fjerne – entydigt at aflæse**

### Produktet:

Curatest har 10 testkampe med integrerede, sugende vliesplader, der optager testsubstanterne. Både plasterets vlies og klæbestof er meget hudvenlige.

Let at anvende: Det brede dækpapir skal blive siddende på plasteret, indtil plasteret anbringes, hvilket letter håndteringen. Ved præparering undgås kontakt med klæbeflader. Kantstrimlerne, som man kan skrive på, kan skilles fra resten af testplasteret og udelukker herved fejl ved applikation eller aflæsning.

Let at præparere: Testkamrene egner sig til flydende, pastøse og tørre substanser. De kan uden videre præpareres. En tynd folie afgrænser hvert enkelt testkammer, så det er åbent mod huden og lukket mod klæbestofsidens. Testsubstansen rammer huden helt præcist; intet løber ud eller tærnger igennem plasteret. Plasteret: 100% polypropylen  
Sugende vliesplader: 60% bomuld, 40% viscose  
Testkamre: Polyester-folie  
Polyacrylatklæber: indeholder IKKE kolofonium og kolofonium-derivater, meget hudvenlig.

### Anvendelsesområde:

Curatest anbringes på huden på samme måde som et almindeligt plaster. Det kompakte format giver mulighed for applikation af komplette standardtests - også på børn.

Testplasterets kanstrimler kan skilles fra resten af testplasteret. Der kan skrives på strimlerne ved testens begyndelse, således at aflæsningen af testresultaterne lettes. Curates kan fjernes fuldstændigt fra huden uden smerter for patienten. Når testplasteret er taget af, bliver kantstrimlerne siddende på huden. Påskriften muliggør en entydig identifikation af testresultaterne.

### Sortiment:

#### Curatest

10 testkamre pr. plaster

| Æsk á      | art.nr. |
|------------|---------|
| 50 plastre | 30054   |

**LOHMANN & RAUSCHER A/S**  
**Gøngehusvej 252**  
**2950 Vedbæk**  
**Tlf. 45 89 02 25**  
**Fax. 45 89 02 29**  
**Mail: [info@dk.Lrmed.com](mailto:info@dk.Lrmed.com)**