

Vliwaktiv® AG – stærkt absorberende kompres

Forneden ses bagsiden og forsiden af det *stærkt* absorberende kompres



Produktet:

Vliwaktiv AG er et **stærkt** absorberende kompres, der hurtigt og effektivt absorberer sekret ind i kompressets kerne.

Den antimikrobielle sølv i kombination med den "aktive" kul fjerner lugt gener fra såret og fremmer helingen ved at binde og nedbryde bakterier i bandagen.

Anlæggelse af kompres

1. rens såret
2. anbring Vliwaktiv AG med den mørke side (kulsiden) ned mod såret og vælg kompres efter sårstørrelse. Kompresset skal overlape sår kanterne med min. 2-3 cm
3. kompresset fikseres

Anvendelse:

Vliwaktiv AG stærkt absorberende kompres er specielt velegnet til overfladiske, meget væskende sår

Vliwaktiv AG dækker bredt på grund af kombinationen af sølv og aktivt kul i kompresset:

- * **infektions sår**
 - * **kritisk koloniserede sår**
 - * **sår med større risiko for infektion**
- ex.

- decubitus
- arterielle sår
- venøse sår
- diabetiske sår
- cancer sår

Sortiment:

Vliwaktiv AG stærkt absorberende sterile
enkeltvis indpakket i æske á 10 stk.

størrelse	Art.nr
10,0 x 10 cm	20 705
10,0 x 20 cm	20 706
20,0 x 20 cm	20 707