


Vliwaktiv® AG - let absorberende kompres

Kompresset forrest er det *let* absorberende kompres

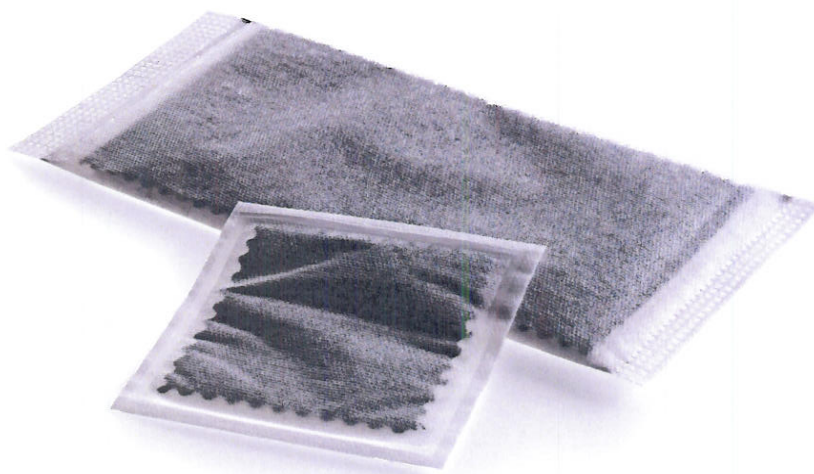

Produktet:

Vliwaktiv AG er et let absorberende kompres, der hurtigt og effektivt absorberer sekret.

Den antimikrobielle sølv i kombination med den "aktive" kul fjerner lugt gener fra såret og fremmer helingen ved at binde og nedbryde bakterier i bandagen.

Anlæggelse af kompres

1. rens såret
2. Vliwaktiv AG kan anvendes på begge sider. Anbringes midt i det dybe sår ; anvend forsigtigt en pincet og sørg for at kompresset kommer ud i hjørnerne af såret. Den bedste effekt opnås hvis kompresset har kontakt til bunden af såret.
3. Alt efter hvor meget såret væsker fikseres en sekundær bandage ovenpå (ex. Solvaline N, Vliwazell)

Anvendelse:

Vliwaktiv AG let absorberende kompres skal primært anvendes til dybe sår i kombination med en sekundær bandage.

Vliwaktiv AG dækker bredt på grund af kombinationen af sølv og aktivt kul i kompresset:

- * **infektions sår**
- * **kritisk koloniserede sår**
- * **sår med større risiko for infektion**
ex.
 - decubitus
 - arterielle sår
 - venøse sår
 - diabetiske sår
 - cancer sår

Sortiment:

Vliwaktiv AG
let absorberende
sterile
enkeltvis indpakket i
æske á 10 stk.

størrelse	Art.nr
6,5 x 10 cm	20 700
10,0 x 10 cm	20 701
10,0 x 15 cm	20 702

 **LOHMANN & RAUSCHER**

Gøngehusvej 252

Tlf. 45 89 02 25

Fax 45 89 02 29

Email: info@dk.Lrmed.com