

ALLEVYN Gentle Border Multisite er en anatomisk formet bandage udviklet til kroppens svært bandagerbare områder

Baghovedet
 Bandagen beskytter og er samtidig skånsom mod sart hud

Nakken
 Bandagering kan være en udfordring på sarte områder omkring hals og nakke, og under øret

Under armen
 Flexibiliteten i bandagen gør det muligt at forme sig til axillen

Brystet
 Bandagen er skånsom mod huden og former sig behageligt over hele brystområdet

Knæet
 Bandagen bliver på plads og tillader knæleddet fuld bevægelighed

Skulderen
 Bandagen former sig efter kroppen og giver behagelig beskyttelse

Ryggen
 Bandagens form og fleksibilitet muliggør applicering alle steder på ryggen

Albuen
 Bandagen er velegnet til knoglefremspring som på albuen. Sikrer optimal bevægelighed i leddet og er samtidig skånsom mod huden

Låret
 Passer perfekt omkring låret og beskytter såret

Læggen
 Form og fleksibilitet gør at bandagen let kan appliceres og den bløde silikone tillader at bandagen kan re-appliceres

Fjern beskyttelsespapiret og sørg for, at bandagen klæber hele vejen rundt om såret.

ALLEVYN Gentle Border Multisite kan klippes til. Anvend altid aseptisk teknik ved klipning. Sørg for at eksponeret skum dækkes til med passende filmbandage og at hele skumbandagen ikke tildækkes, men kun kanterne.



Produktsortiment:

Varenr.	Størrelse	Antal/æske
66800959	ALLEVYN Gentle Border Multisite 17,1 x 17,9 cm	10
66801041	ALLEVYN Gentle Border Lite Multisite 8 x 8,4 cm	10

Referencer

1. Smith & Nephew Data on File Report OR- 017 Volunteer trial. An open, prospective, randomised, comparative study to compare the performance of ALLEVYN Gentle Border Multisite with an alternative silicone adhesive dressing.
 *Mepilex Border 15cm x 15cm

Wound Management
 Smith & Nephew
 Slotsmarken 14
 2970 Hørsholm
 Telefon 45 80 61 00
 Fax 45 80 61 51

sn.dk@smith-nephew.com
 www.smith-nephew.com

™Alle varemærker godkendt
 © Smith & Nephew februar 2012
 29606