

Advazorb Border

Absorberende skumbandage med blødt sårkontaktlag og kant af silikone.

For lav/moderat mængde sårvæske



Produktbeskrivelse

En selvklæbende, absorberende bandage med sårkontaktlag og kant af blødt Silfix® silikone. Bandagen har en hydrofil skumabsorberende pude med en høj væskehåndteringskapabilitet. Den bløde silikone vil klæbe til den omkringliggende tørre hud, men ikke til et fugtigt sår. Der er tale om en atraumatisk bandage, hvilket betyder, den er konstrueret til at minimere den smerte og det traume, der er forbundet med bandageskift. Filmbagsiden er åndbar og forhindrer gennemblødning.

Indikationer

- Bensår
- Fodsår
- Tryksår
- Traumatiske sår
- Kirurgiske sår
- Hudafskrabninger
- Vabler

Skiftehyppighed

Bandagen kan efterlades på plads i op til 7 dage, men bør skiftes, når gennemblødning er synlig i midten af puden, eller når puden buler ud som følge af absorberet eksudat.

Brugsanvisning

- Sørg for, at området er blevet rensset
- Tør forsigtigt den omgivende hud
- Åbn pakken og fjern de klare plastikstrimler.
- Anbring Advazorb Border oven på såret
- Mens der sørges for, at den absorberende pude dækker hele sårområdet med en overlapning på 1-2 cm.
- Fastgør med tape, passende bandage eller filmbandage.
- Kan bruges under en trykforbinding.
- Opbevares ved stuetemperatur, beskyttes mod sollys og opbevares tørt.



Holdbarhed: 3 år i uåbnet emballage

Materiale: Hydrofil skumabsorberende pude, Silfix® silikone

Ordreinformation

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Inderpakke	Trp. krt	Klasse
MF1000066	Advazorb Border	7,5x7,5 cm	10	360	MD IIb, steril
MF1000067	Advazorb Border	10x10 cm	10	240	MD IIb, steril
MF1000068	Advazorb Border	12,5x12,5 cm	10	160	MD IIb, steril
MF1000069	Advazorb Border	15x15 cm	10	120	MD IIb, steril
MF1000070	Advazorb Border	10x20 cm	10	240	MD IIb, steril
MF1000071	Advazorb Border	20x20 cm	10	120	MD IIb, steril