

Curea P1®

Superabsorberende bandage med væske- og bakterietæt bagside




curea medical

Innovation in Care

Et meget gennemtrængeligt nonwoven sårkontaktlag mod såret sikrer skånsom debridering.

Patenteret SuperCore® uden klæbe- og bindemidler sikrer høj absorption og sikker binding af store mængder eksudat, bakterier og blod.

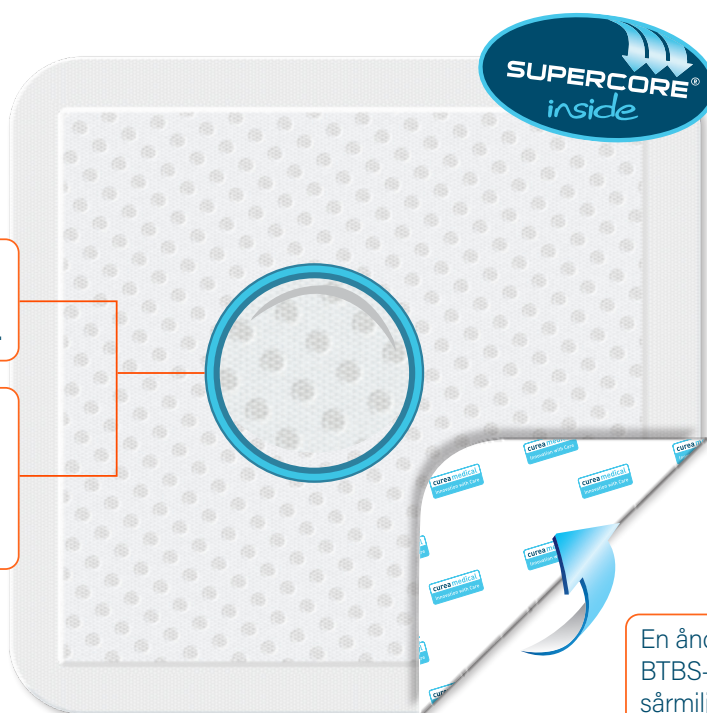

En åndbar, væske- og bakterietæt BTBS-bagside sikrer optimalt fugtigt sårmiljø og forebygger kontaminering.

Curea P1 - funktion & fordele:


- Patenteret SuperCore® kerne sikrer hensigtsmæssig absorptionskapacitet og sikker binding af store mængder eksudat – forlænger skifteinterval.
- Renser skånsomt såret for bakterier og debris.
- Dokumenteret binding af alle typer eksudat, herunder høj viscositet og blod – ét produkt til mange formål.
- Holder såret fugtigt – fremmer sårhelingen.
- Vertikal absorption og optimal væskefordeling – reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser.
- Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt - reducerer risiko for infektion.
- Bevarer form under brug – høj bærekraft.
- Åndbar væske- og bakterietæt bagside beskytter mod lækage og kontaminering af omgivelser – reducerer unødige bandageskift.

Curea P1 - indikationer og anvendelse:

- Akutte og kroniske sår med let til kraftig sekretion.
- Ideel under kompression.
- Appliceres direkte over såret, min. 2-3 cm ud over sårkanter.
- Kan kombineres med kavitetsbandager ved dybere sår.
- Fikseres med passende fiksering (tubular, cirkulær bandage etc.).
- Ved klæbende fiksering, da kun i kanten.
- Kan ligge på såret i op til 7 dage.

Bemærk!

- Der må ikke klippes i bandagen.
- Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede muskler, sener og knogler.

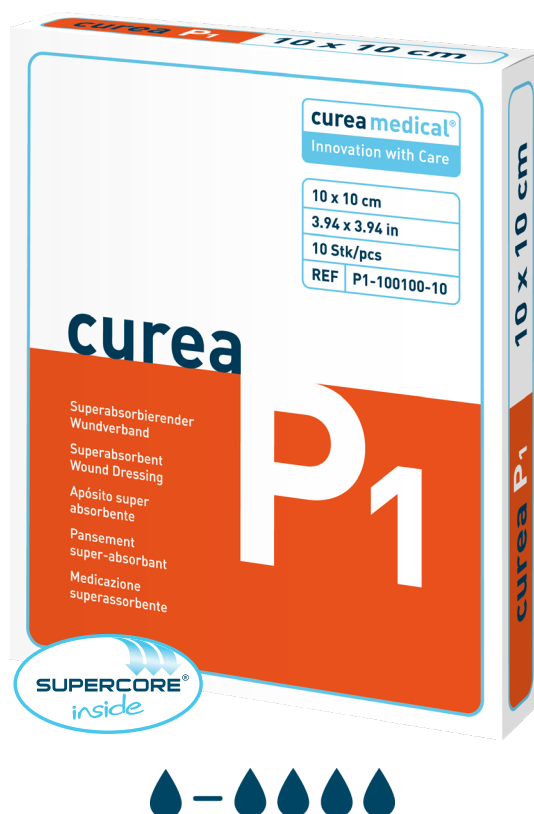

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Størrelse på sugende midte	Antal pr. æske
P1-055075-10	Curea P1	5,5 x 7,5 cm	3,5 x 5,5 cm	10
P1-055130-10	Curea P1	5,5 x 13 cm	3,5 x 11 cm	10
P1-075075-10	Curea P1	7,5 x 7,5 cm	6,5 x 6,5 cm	10
P1-100100-10	Curea P1	10 x 10 cm	9 x 9 cm	10
P1-100150-10	Curea P1	10 x 15 cm	8 x 13 cm	10
P1-150150-10	Curea P1	15 x 15 cm	13 x 13 cm	10
P1-100200-10	Curea P1	10 x 20 cm	8 x 18 cm	10
P1-100300-10	Curea P1	10 x 30 cm	8 x 28 cm	10
P1-200200-10	Curea P1	20 x 20 cm	18 x 18 cm	10
P1-200300-10	Curea P1	20 x 30 cm	18 x 28 cm	10
P1-250400-10	Curea P1	25 x 40 cm	20 x 35 cm	10
P1-400600-10	Curea P1	40 x 60 cm	37 x 57 cm	10

Steril og enkeltpakket

Holdbar 5 år efter produktionsdato

For yderligere information kontakt:

Tlf.: 32 97 15 25 | www.apodan.dk | info@apodan.dk