

# Curea P1®

## Superabsorberende bandage med væske- og bakterietæt bagside




**curea medical**

Innovation in Care

Et meget gennemtrængeligt nonwoven sårkontaktlag mod såret sikrer skånsom debridering.

Patenteret SuperCore® uden klæbe- og bindemidler sikrer høj absorption og sikker binding af store mængder eksudat, bakterier og blod.

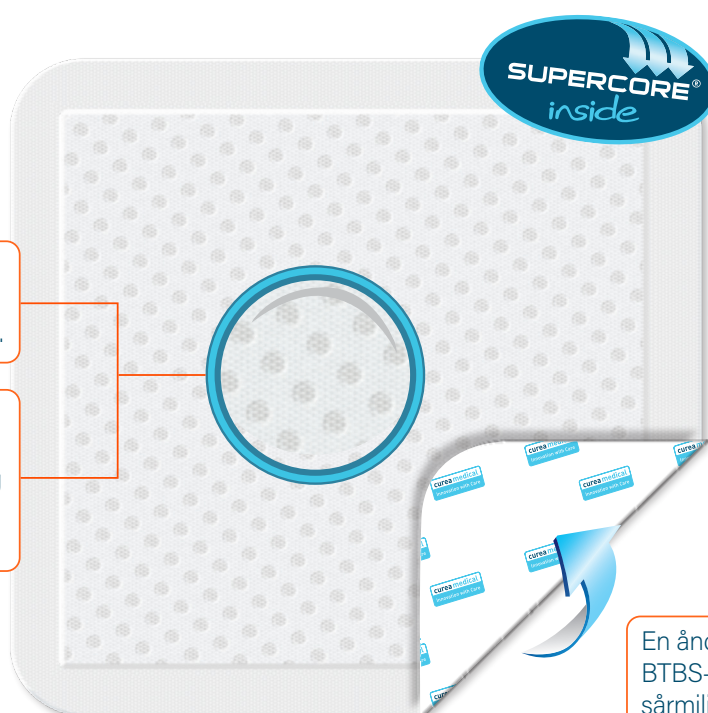

En åndbar, væske- og bakterietæt BTBS-bagside sikrer optimalt fugtigt sårmiljø og forebygger kontaminering.

### Curea P1 - funktion & fordele:


- Patenteret SuperCore® kerne sikrer hensigtsmæssig absorptionskapacitet og sikker binding af store mængder eksudat – forlænger skifteinterval.
- Renser skånsomt såret for bakterier og debris.
- Dokumenteret binding af alle typer eksudat, herunder høj viscositet og blod – ét produkt til mange formål.
- Holder såret fugtigt – fremmer sårhelingen.
- Vertikal absorption og optimal væskefordeling – reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser.
- Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt - reducerer risiko for infektion.
- Bevarer form under brug – høj bærekraft.
- Åndbar væske- og bakterietæt bagside beskytter mod lækage og kontaminering af omgivelser – reducerer unødige bandageskift.

## Curea P1 - indikationer og anvendelse:

- Akutte og kroniske sår med let til kraftig sekretion.
- Ideel under kompression.
- Appliceres direkte over såret, min. 2-3 cm ud over sårkanter.
- Kan kombineres med kavitetsbandager ved dybere sår.
- Fikseres med passende fiksering (tubular, cirkulær bandage etc.).
- Ved klæbende fiksering, da kun i kanten.
- Kan ligge på såret i op til 7 dage.

## Bemærk!

- Der må ikke klippes i bandagen.
- Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede muskler, sener og knogler.

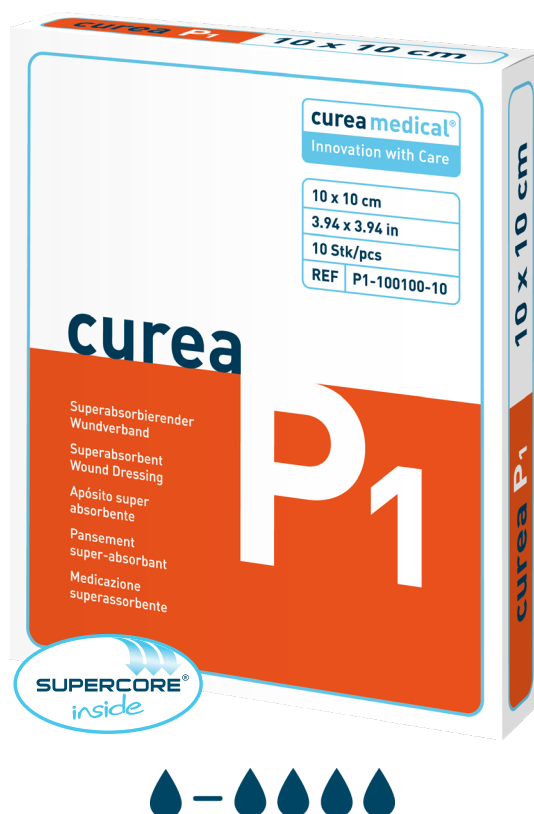

| Varenr.      | Beskrivelse | Størrelse    | Størrelse på sugende midte | Antal pr. æske |
|--------------|-------------|--------------|----------------------------|----------------|
| P1-055075-10 | Curea P1    | 5,5 x 7,5 cm | 3,5 x 5,5 cm               | 10             |
| P1-055130-10 | Curea P1    | 5,5 x 13 cm  | 3,5 x 11 cm                | 10             |
| P1-075075-10 | Curea P1    | 7,5 x 7,5 cm | 6,5 x 6,5 cm               | 10             |
| P1-100100-10 | Curea P1    | 10 x 10 cm   | 9 x 9 cm                   | 10             |
| P1-100150-10 | Curea P1    | 10 x 15 cm   | 8 x 13 cm                  | 10             |
| P1-150150-10 | Curea P1    | 15 x 15 cm   | 13 x 13 cm                 | 10             |
| P1-100200-10 | Curea P1    | 10 x 20 cm   | 8 x 18 cm                  | 10             |
| P1-100300-10 | Curea P1    | 10 x 30 cm   | 8 x 28 cm                  | 10             |
| P1-200200-10 | Curea P1    | 20 x 20 cm   | 18 x 18 cm                 | 10             |
| P1-200300-10 | Curea P1    | 20 x 30 cm   | 18 x 28 cm                 | 10             |
| P1-250400-10 | Curea P1    | 25 x 40 cm   | 20 x 35 cm                 | 10             |
| P1-400600-10 | Curea P1    | 40 x 60 cm   | 37 x 57 cm                 | 10             |

Steril og enkeltpakket

Holdbar 5 år efter produktionsdato

For yderligere information kontakt:

Tlf.: 32 97 15 25 | [www.apodan.dk](http://www.apodan.dk) | [info@apodan.dk](mailto:info@apodan.dk)