



Haddenham Microfine

L y m f ø d e m
TÅKAPPE



Kompression Bandage

Lymfødemed Nedre Ben Område

Kompressions Bandager

Den Terapeutiske effekt af bandagerne, kræver en korrekt anlæggelse

Absolutte Kontrakindikationer

- Avanceret perifær arteriel okklusiv lidelse
- Dekompenseret hjerte insufficiens
- Ukontrolleret hjertefejl
- Ubehandlet flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Relative Contraindications

- Hud infektioner
- Dermatitis
- Allergisk reaktion på materialet
- Perifær neuropati
- Åbne sår

VALG AF STØRRELSER

Målepunkt	X-Small	Small	Medium	Large	XLarge
Omkreds af fodryg	21-23cm	23-25cm	25-27cm	27-29cm	29-31cm

FORDELE

Både højre - og venstremanchet

Trim to Fit - Tåkappe kan klippes til Uden at gå på kompromis med kompressionseffekten samt materialet

Fastholder fingerfærdighed, Fine syninger, åndbarhed ml, tæer kombineret med ultra fine og glat mikrofiber materiale

Latex Fri
52% Polvamid 48% Elastan

VASKEANVISNINGER



Må ikke stryges

Må ikke
Tørretumbles

Må ikke kemisk
Renses

Må ikke Bleges



Opbevares væk fra
direkte varme


Opbevares væk fra
direkte sollys

Pres overskydende
væske ud og tørres
væk fra direkte varme

GARANTI - 6 mrd. (bør ikke anvendes efter udløb)

Æsken indeholder 1 Microfine Tåkappe

Specialbandager.dk A/S, Bindeledet 10
2880 Bagsværd, Denmark

 Heinz Schiebler Marienallee 74,
24937 Flensburg, Germany



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



SPECIALBANDAGER.DK^{AS}
- en strømpe er ikke bare en strømpe

(+45) 44 44 88 50
info@specialbandager.dk