


Plaster til behandling af bi- og hvepsestik



- Plastret er udviklet i Danmark.
- Plastret indeholder **ikke** medicin.
- Plastret indeholder en patenteret sukker-membran, der virker ligesom en sukkerknald.
- Plastret indeholder ca. 200 mg sukker (sucrose).
- Ved hjælp af osmose, trækkes giften ud af huden og transporteres op i sukkeret, herved nedsættes både smerte og hævelse.
- Sukkeret trænger **ikke** ind i kroppen og kan derfor også bruges af diabetikere.
- Plastret er sterilt.
- Plastret giver ikke anledning til hudirritation eller overfølsomhed og er under stadig farmaceutisk kontrol.
- Plastret er pakket enkeltstyk til engangsbrug.
- Plastret er CE-mærket.
- Behandlingen igangsættes indenfor ½ time efter man er blevet stukket. Men gerne så hurtigt som muligt.
- Plastret skiller sig ud i forhold til andre plastre, ved at være gult med to sorte striber på tværs - symboliserer hvepsens egne farver.
- På Langelandsfestivalen i 2015, blev 51 personer behandlet for hvepsestik med Bee-Patch. Se de gribende billeder på vores FaceBook gruppe: Bee-patch. Og post gerne dine egne billeder.



- ☑ Plastret er testet af Danske Livreddere ved Sjællands og Vestjyllands kyster i sommermånederne.
- ☑ Hver pakke indeholder **5 stk.** plaster.
- ☑ Plastret har været på det danske marked siden 2009.
- ☑ Plastret sælges i Europa, Australien og USA.
- ☑ Er du **allergisk** overfor insektstik, skal du **altid** følge din læges anvisninger.
- ☑ Har du yderligere spørgsmål så skriv til os på:
info@bee-patch.com
eller find os på:
www.bee-patch.dk og Facebook.

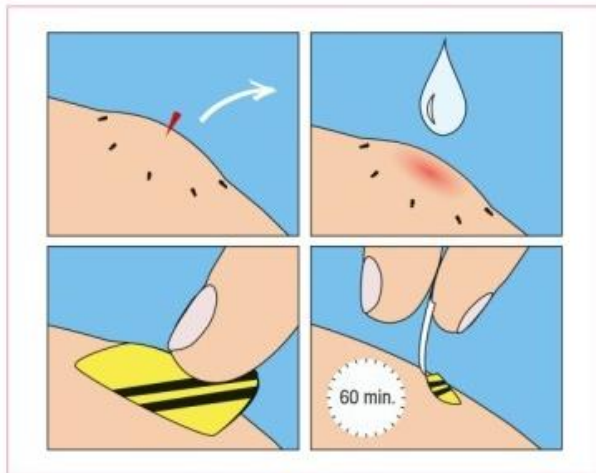

Brugsanvisning: Fjern brodden, dryp en dråbe vand eller spyt på stikstedet og lad plastret sidde 1 time.

Snip snap snude, slut med at tude...



Copyright Bee-Patch ApS 2017