


# Curea P2®


## Superabsorberende bandage med atraumatisk sårkontaktlag

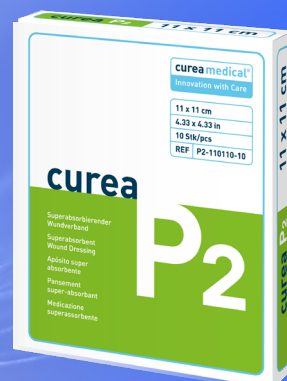

**curea medical**

Innovation in Care

Integreret ikke-hæftende 3D sårkontaktlag sikrer atraumatisk forbindsskift.

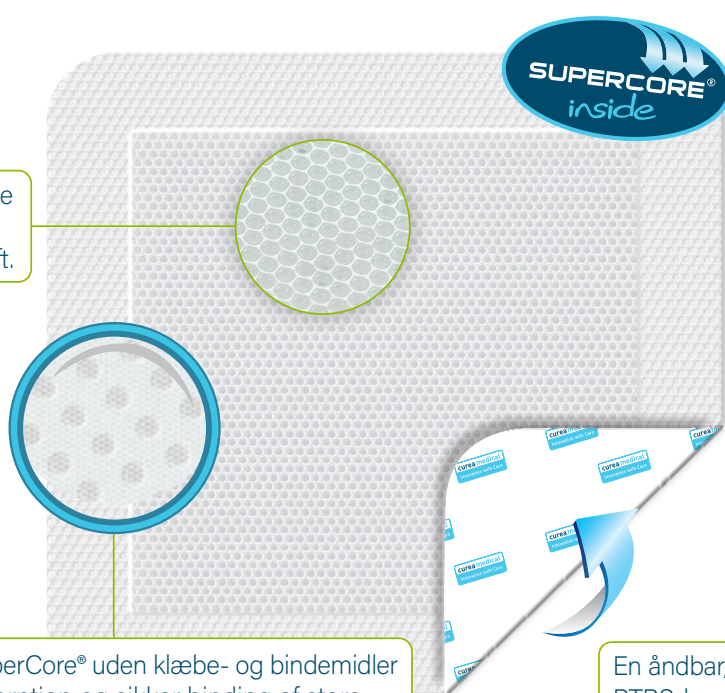

Patenteret SuperCore® uden klæbe- og bindemidler sikrer høj absorption og sikker binding af store mængder ekssudat, bakterier og blod.

En åndbar, væske- og bakterietæt BTBS-bagside sikrer optimalt fugtigt sårmiljø og forebygger kontaminering.

### Curea P2 - funktion & fordele:


- Unikt 3D sårkontaktlag sikrer atraumatisk forbindsskift – beskytter sårbund og nyt granulationsvæv – minimerer smerter ved forbindsskift.
- Patenteret SuperCore® kerne sikrer hensigtsmæssig absorptionskapacitet og sikker binding af store mængder ekssudat – forlænger skifteinterval.
- Dokumenteret binding af alle typer ekssudat, herunder høj viscositet og blod – ét produkt til mange formål.
- Holder såret fugtigt – fremmer sårhelingen.
- Vertikal absorption og optimal væskefordeling – reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser.
- Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt.
- Bevarer form under brug – høj bærekraft.
- Åndbar væske- og bakterietæt bagside beskytter mod lækage og kontaminering af omgivelser – reducerer unødige bandageskift.

## Curea P2 - indikationer og anvendelse:

- Akutte og kroniske sår med let til kraftig sekretion.
- Særdeles velegnet til sår med granulerende sårbund og skrøbelige hudomgivelser, samt ved sår, hvor der er smerter i forbindelse med bindingsskift.
- Ideel under kompression.
- Appliceres direkte over såret, min. 2-3 cm ud over sårkanter.
- Siden med tekst skal vende væk fra såret.
- Kan kombineres med kavitetsbandager ved dybere sår.
- Fikseres med passende fiksering (tubular, cirkulær bandage etc.).
- Ved klæbende fiksering, da kun i kanten.
- Kan ligge på såret i op til 7 dage.

## Bemærk!

- Der må ikke klippes i bandagen.
- Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede muskler, sener og knogler.

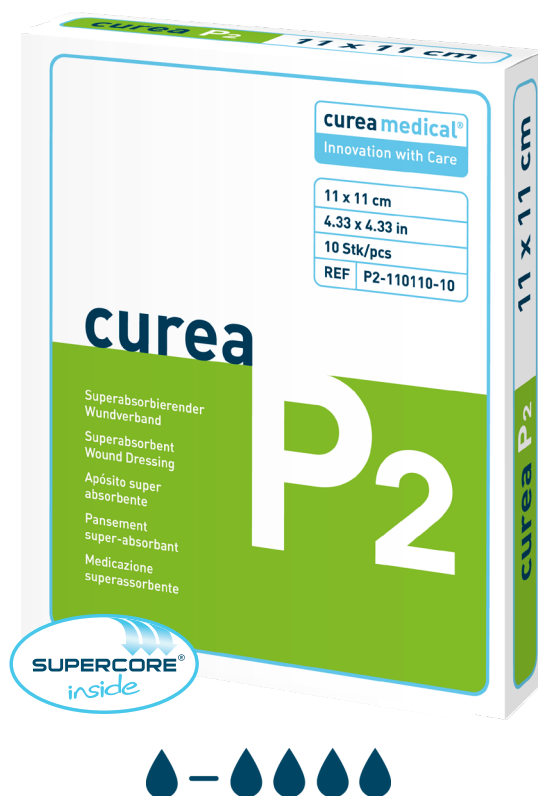

| Varenr.      | Beskrivelse | Størrelse    | Størrelse på sugende midte | Antal pr. æske |
|--------------|-------------|--------------|----------------------------|----------------|
| P2-055075-10 | Curea P2    | 5,5 x 7,5 cm | 3,5 x 5,5 cm               | 10             |
| P2-110110-10 | Curea P2    | 11 x 11 cm   | 9 x 9 cm                   | 10             |
| P2-150150-10 | Curea P2    | 15 x 15 cm   | 13 x 13 cm                 | 10             |
| P2-100200-10 | Curea P2    | 10 x 20 cm   | 8 x 18 cm                  | 10             |
| P2-200200-10 | Curea P2    | 20 x 20 cm   | 18 x 18 cm                 | 10             |
| P2-200300-10 | Curea P2    | 20 x 30 cm   | 18 x 28 cm                 | 10             |
| P2-250550-10 | Curea P2    | 25 x 55 cm   | 20 x 50 cm                 | 10             |

Steril og enkeltpakket

Holdbar 5 år efter produktionsdato

For yderligere information kontakt:

Tlf.: 32 97 15 25 | [www.apodan.dk](http://www.apodan.dk) | [info@apodan.dk](mailto:info@apodan.dk)