



Bandagering til amputationer


Teknik A

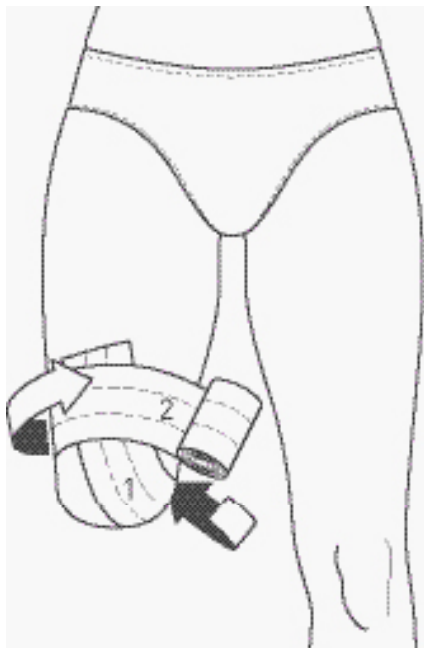


1 Brug en 15 cm bred Elset S til denne bandagering. Læg bandagen diagonalt fra ydersiden af stumpen over det nederste punkt og hele vejen rundt om benet (trin 1 og 2)

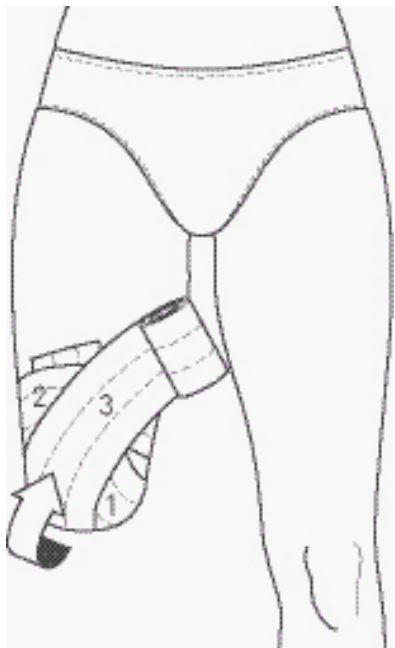


2 Læg bandagen rundt om benet igen, nedover ydersiden af det nederste punkt og diagonalt henover forsiden af stumpen (trin 3)

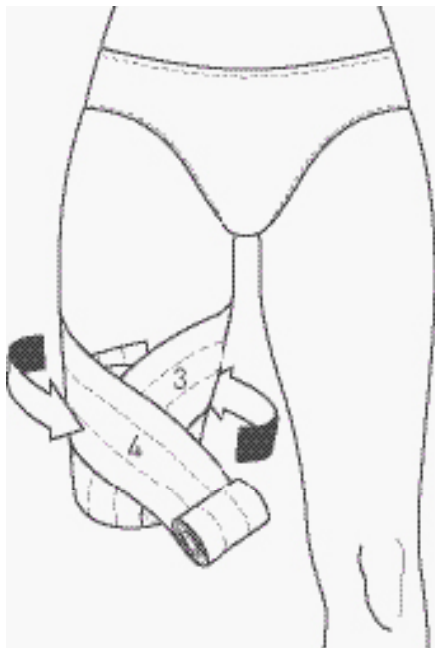


3 Læg bandagen rundt om benet og før den diagonalt til indersiden af det nederste punkt på stumpen (trin 4). Dette gentages flere gange (som trin 1, 2 og 3) indtil enden af stumpen er fuldstændig dækket af bandagen

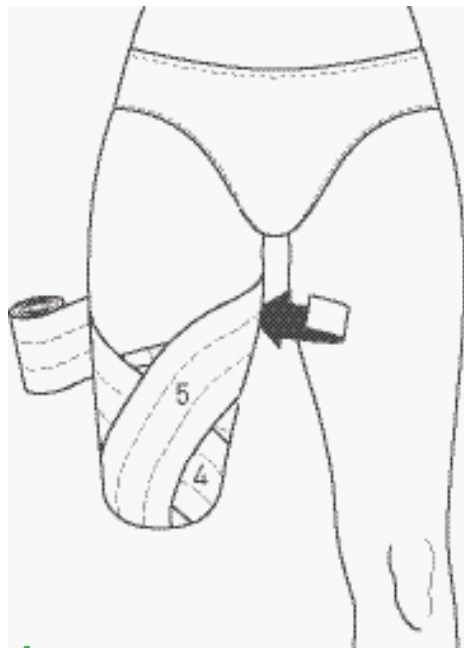

4 Når enden af stumpen er fuldstændig dækket, føres bandagen rundt om benet og nedover stumpen diagonalt. Dette gentages ved at bandagen hver gang lægges højere op på låret indtil et 8-tals mønster forekommer (trin 5).

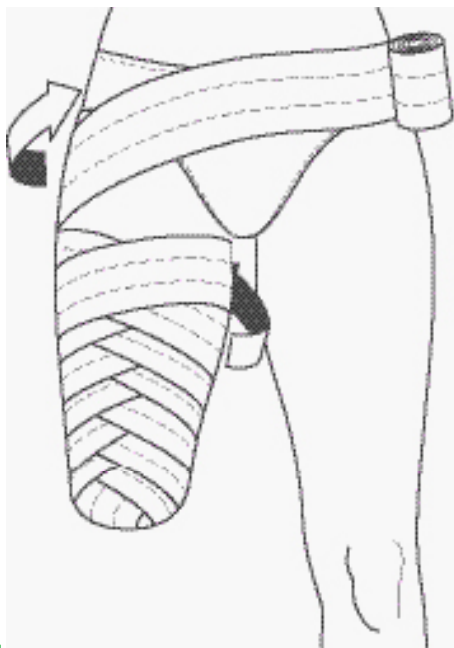


5 8-tals mønstret gentages indtil stumpen er fuldstændig dækket og et faldende bandagestryk opad stumpen er opnået. Bandagen skal sidde højt i lysken for at forhindre en fejlstilling af stumpen (adduction contracture).

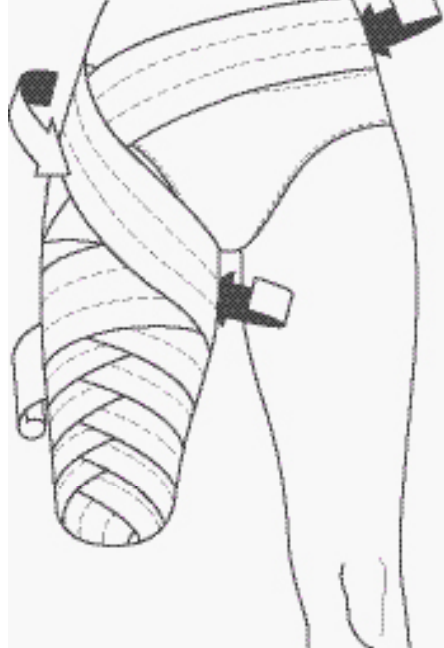


6 Til slut føres bandagen op til hoften og omkring taljen. Bandagen lægges tilbage nedover den øverste del af stumpen for at forhindre en fejlstilling (adductor roll). Bandagen fastgøres til stumpen.


Teknik B

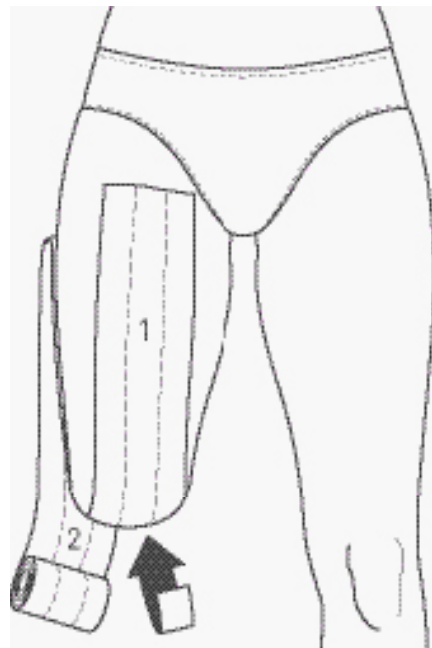


1 Begynd bandageringen højt på låret og før bandagen over det nederste punkt på stumpen (trin 1) og om bagpå til lige under kanten af balden. Fold bandagen dobbelt og før den henover ydersiden af det nederste punkt på stumpen (trin 2).

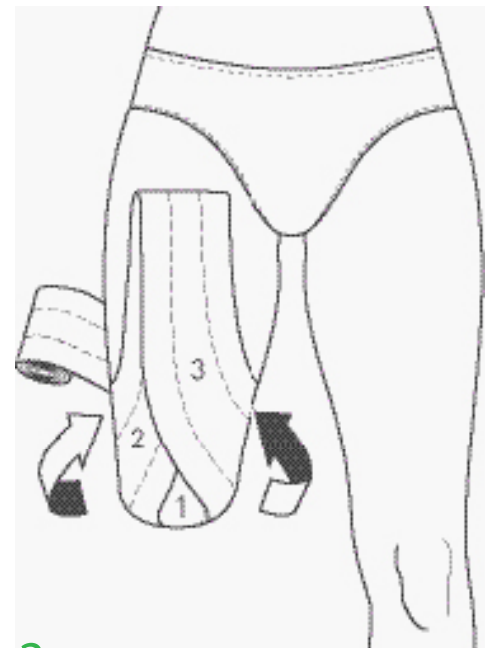


2 Fold bandagen dobbelt og før bandagen henover indersiden af det nederste punkt på stumpen (trin 3). Før bandagen rundt om benet til ydersiden af stumpen.

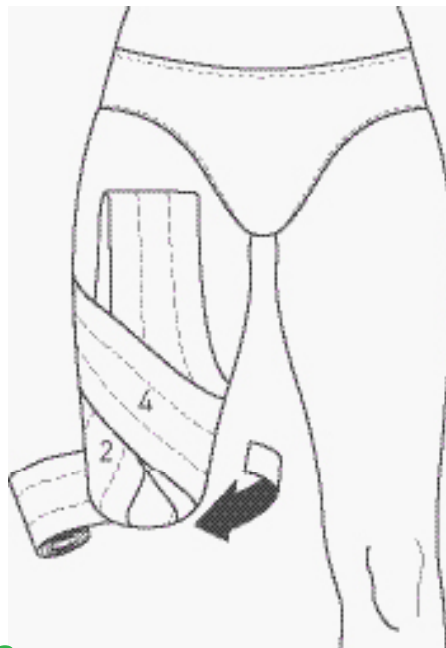


3 Før bandagen diagonalt over forsiden af stumpen (trin 4), så den delvist dækker trin 3. Før bandagen rundt om benet og ud ved ydersiden af det nederste punkt på stumpen.

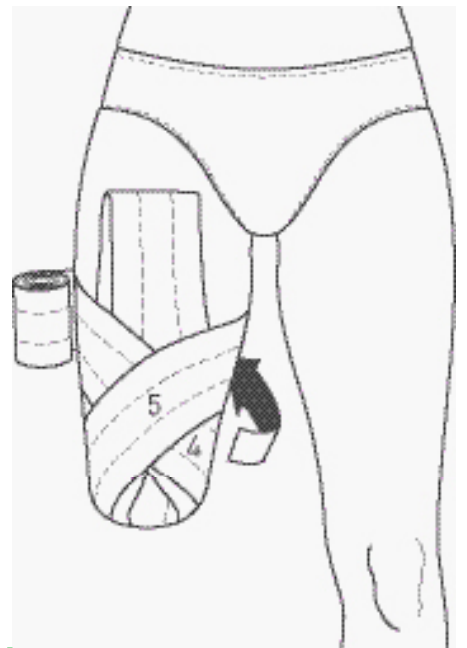

4 Lav et 8-tals mønster ved at føre bandagen diagonalt over forsiden af stumpen (trin 5) rundt om benet og diagonalt tilbage til enden af stumpen.

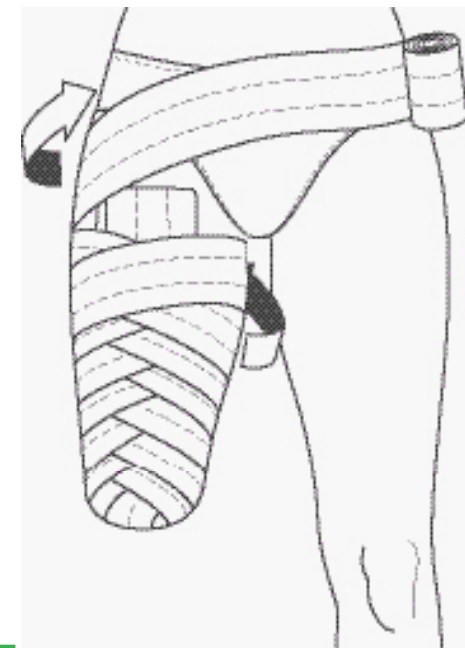

5 8-tals mønstret gentages indtil stumpen er fuldstændig dækket. Bandagen skal sidde højt i lysken for at forhindre en fejlstilling af stumpen (adduction contracture).

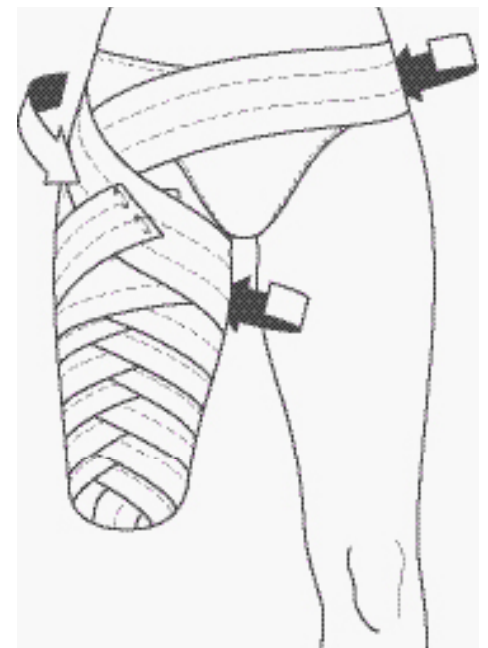

6 Til slut føres bandagen op til hoften og omkring taljen. Bandagen lægges tilbage nedover den øverste del af stumpen for at forhindre en fejlstilling (adductor roll). Bandagen fastgøres til stumpen.

Elset S

Elset S er en let kompressionsbandage, som anbefales til kompressionsbehandling på amputationer over og under knæet. Elset S rullen er 12 meter lang, hvilket gør det muligt at skabe en kompressionsbehandling til hele benet ved hjælp af ét stykke kompressionsbandage.

Elset S er fremstillet af et let rayonmateriale, som er slidstærkt og med elastiske tråde. Produktet har en vævet struktur, som opretholder kompressionen, og sikrer at ødem og hævelser reduceres under behandlingen.

Den lette og åbne vævning er behagelig for patienten, også ved anvendelse over længere tid.

Elset S kan håndvaskes op til fem gange uden tab af elasticitet (jvnf. BS 7505).

Hvis patienten viser kliniske tegn på forværret tilstand, skal behandlingen stoppes og en læge kontaktes.

Elset S er pakket enkelvis i ruller

Bredde x Længde	Art. nr.	Stk/trp.krt.
10cm x 12m	993486	12
15cm x 12m	993487	12