



Curea Clean Breath®

Usteril superabsorberende bandage med væske- og bakterietæt filmbagside

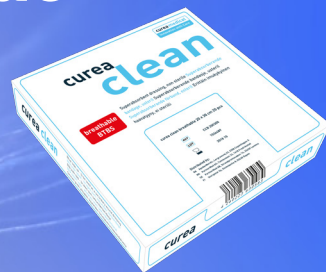

curea medical

Innovation in Care

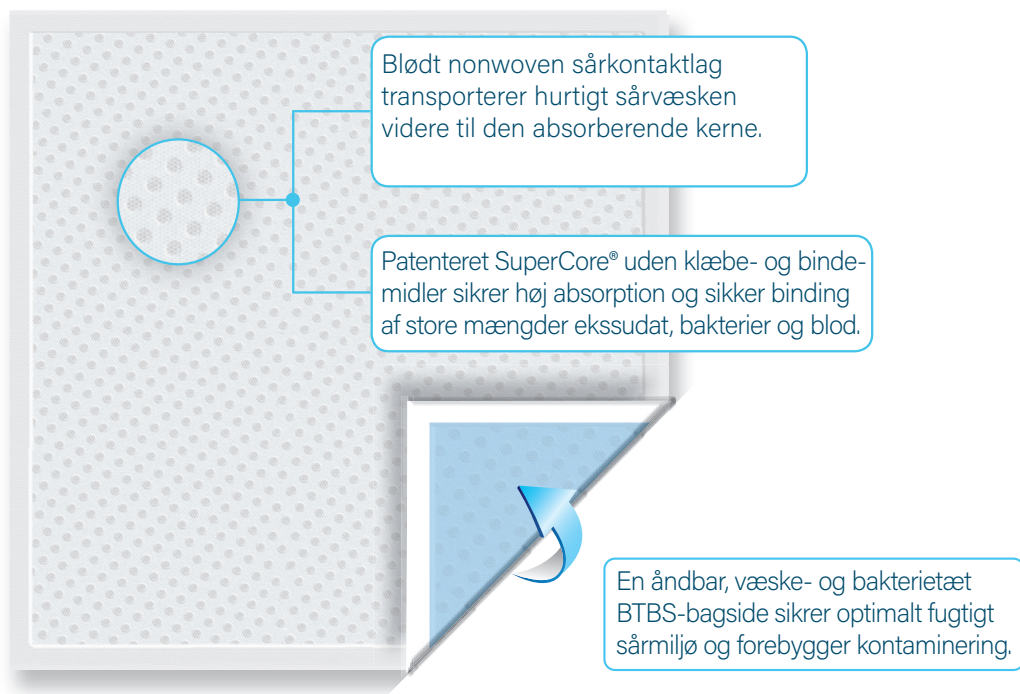

Curea Clean Breath - funktion & fordele:

- Patenteret SuperCore® kerne sikrer hurtig absorptionshastighed og høj absorptionskapacitet, samt sikker binding af store mængder ekssudat. Absorberer 35 % mere væske end Curea Clean – forlænger skifteinterval, giver såret ro til at hele, reducerer tidsforbrug.
- Dokumenteret binding af alle typer ekssudat, herunder høj viscositet og blod – ét produkt til mange formål.
- Medvirker til at holde såret fugtigt – fremmer sårhelingen.
- Vertikal absorption og optimal væskefordeling – reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser.
- Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt – reducerer lugtgener samt risiko for infektion.
- Bevarer form under brug – høj bærekraft.
- Åndbar væske- og bakterietæt bagside beskytter mod lækage og kontaminering af omgivelser – reducerer unødige bandageskift.
- Høj renhedsgrad – sikker i brug, ingen risiko for kontaminering af såret.

Curea Clean Breath- indikationer og anvendelse:

- Det enkle valg ved ønske om optimal væskehåndtering, hvor en steril bandage ikke er et krav.
- Anvendes som sekundær bandage ved akutte og kroniske sår med let til kraftig sekretion.
- Ideel under kompression.
- Appliceres med den hvide side mod såret, min. 2-3 cm ud over sårkanter.
- Kan kombineres med kavitationsbandager ved dybere sår.
- Fikseres med passende fiksering (tubular, cirkulær bandage etc.).
- Ved klæbende fiksering, da kun i kanten.
- Kan ligge på såret i op til 7 dage.



Bemærk!

- Der må ikke klippes i bandagen.

Enkel og hygiejnisk opbevaring og håndtering af produkterne er også vigtigt!

For at sikre, at renhedsgraden bibeholdes under opbevaring og håndtering af produkterne, er de usterile Curea Clean produkter pakket i et mindre antal i genlukkelige poser. Æskerne ligger stabilt på hylden og låget er nemt at åbne og lukke. Dette minimerer risiko for kontaminering af produkterne under håndtering og opbevaring.

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Størrelse på sugende midte	Antal pr. æske
CCB-100100	Curea Clean Breath	10 x 10 cm	7 x 7 cm	80
CCB-100200	Curea Clean Breath	10 x 20 cm	7 x 17 cm	40
CCB-200200	Curea Clean Breath	20 x 20 cm	17 x 17 cm	20
CCB-200300	Curea Clean Breath	20 x 30 cm	17 x 27 cm	20

Usteril og pakket i poser

Holdbar 5 år efter produktionsdato

For yderligere information kontakt:

Tlf.: 32 97 15 25 | www.apodan.dk | info@apodan.dk