


## Bandage med hæmostatisk effekt<sup>1</sup>

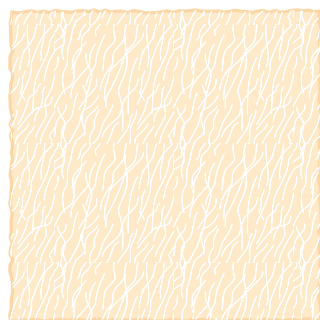

KALTOSTAT er en alginat bandage, som kan anvendes til moderat og kraftigt væskende sår. KALTOSTAT appliceres på såret og dækkes med en fugtbevarende bandage, f.eks. DuoDERM® Extra Thin eller DuoDERM® Signal™. Bandagen har en hæmostatisk effekt<sup>1</sup>, hvilket indebærer, at den med fordel kan anvendes på letblødende sår eller donorsteder. KALTOSTAT findes også som cavitetsbandage, hvilket letter appliceringen i sårhuler. Bandagen er let at anvende, blød, smidig og giver en høj patientkomfort.

# KALTOSTAT®



**NATURLIG SÅRHELING**  
80% kalcium-alginat og  
20% natrium-alginat

**SKÅNSOM SÅRHELING**  
Fibrene omdannes til en  
blød gel, som fremmer  
sårhealingen.

## BEVARER ET FUGTIGT SÅRHELINGSMILJØ

KALTOSTAT bevarer fugten i såret og kan fjernes let. KALTOSTAT findes både som "bandager" i 4 forskellige størrelser og som cavitetsbandage, som letter appliceringen af bandagen i sårhuler.

## BEHAGELIG FOR PATIENTEN

KALTOSTAT består af 80% kalcium-alginat og 20% natrium-alginat og er et rent naturprodukt. Når KALTOSTAT kommer i kontakt med sårsekret eller blod, omdannes alginatet til en blød gel. I denne process binder og absorberer materialet store mængder væske.

## HAR EN HÆMOSTATISK EFFEKT <sup>1</sup>

Ved kontakt med blod har KALTOSTAT en hæmostatisk effekt, hvilket indebærer, at den med fordel kan anvendes på letblødende sår eller f.eks. donorsteder.

## FAKTA

### KALTOSTAT®

KALTOSTAT er en hvid, blød og steril non-woven bandage, bestående af kalcium-natrium alginatfibre. Alginatfibrene absorberer såreksudatet og omdanner dette til en sammenhængende gel. Gelen skaber et fugtigt sårhelingsmiljø. Bandagen kan let fjernes fra såret.

### INDIKATIONER

KALTOSTAT kan anvendes til moderat til kraftigt væskende sår, f.eks. tryksår, venøse og arterielle bensår, diabetes-sår, donorsteder, hudafskrabninger, rifter, mindre brandsår, kirurgiske sår, postoperative og traumatiske sår. KALTOSTAT kan anvendes på inficerede sår under lægetilsyn.

### SKIFTEFREKVEN

Bandagen skiftes, når den er mættet, dog max efter 7 dage.

### OPBEVARING

Opbevares tørt i stuetemperatur. Undgå stærkt lys.

### STERILISERINGSMETODE

Gammasteriliseret.

### KLASSIFICERING

KALTOSTAT er CE-mærket og opfylder alle relevante miljø- og sikkerhedskrav.

### HOLDBARHED

3 år.

For yderligere information, læs brugsanvisningen i æsken.

### KALTOSTAT®

| Størrelse   | Stk./æske | Varenr. |
|-------------|-----------|---------|
| 5 x 5 cm    | 10 stk.   | 168210  |
| 7,5 x 12 cm | 10 stk.   | 168212  |
| 10 x 20 cm  | 10 stk.   | 168214  |
| 15 x 25 cm  | 10 stk.   | 168215  |

### KALTOSTAT CAVITETSBÅND

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 2 gram | 5 stk. | 168117 |
|--------|--------|--------|



**ConvaTec**

*Realize the possibilities™*

1. R.H. Joy et al. A new calcium alginate haemostatic dressing. Dental Practice, February issue;16:1989.

© 2008 ConvaTec Inc

®/™ er varemærker tilhørende ConvaTec Inc.

ConvaTec Denmark Aps,  
Birkeroed Kongevej 2, 3460 Birkeroed,  
kundeservice: 45 87 60 11,  
[www.convatec.dk](http://www.convatec.dk),  
[convatec.danmark@convatec.com](mailto:convatec.danmark@convatec.com)