


Bandage med hæmostatisk effekt¹



KALTOSTAT er en alginat bandage, som kan anvendes til moderat og kraftigt væskende sår. KALTOSTAT appliceres på såret og dækkes med en fugtbevarende bandage, f.eks. DuoDERM® Extra Thin eller DuoDERM® Signal™. Bandagen har en hæmostatisk effekt¹, hvilket indebærer, at den med fordel kan anvendes på letblødende sår eller donorsteder. KALTOSTAT findes også som cavitetsbandage, hvilket letter appliceringen i sårhuler. Bandagen er let at anvende, blød, smidig og giver en høj patientkomfort.

KALTOSTAT®

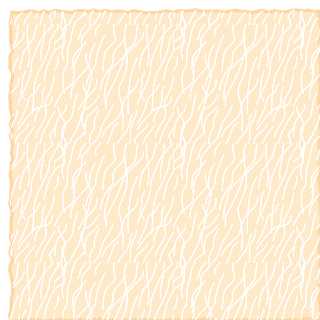

NATURLIG SÅRHELING
80% kalcium-alginat og
20% natrium-alginat

SKÅNSOM SÅRHELING
Fibrene omdannes til en
blød gel, som fremmer
sårhealingen.

BEVARER ET FUGTIGT SÅRHELINGSMILJØ

KALTOSTAT bevarer fugten i såret og kan fjernes let. KALTOSTAT findes både som "bandager" i 4 forskellige størrelser og som cavitetsbandage, som letter appliceringen af bandagen i sårhuler.

BEHAGELIG FOR PATIENTEN

KALTOSTAT består af 80% kalcium-alginat og 20% natrium-alginat og er et rent naturprodukt. Når KALTOSTAT kommer i kontakt med sårsekret eller blod, omdannes alginatet til en blød gel. I denne process binder absorberer materialet store mængder væske.

HAR EN HÆMOSTATISK EFFEKT ¹

Ved kontakt med blod har KALTOSTAT en hæmostatisk effekt, hvilket indebærer, at den med fordel kan anvendes på letblødende sår eller f.eks. donorsteder.

FAKTA

KALTOSTAT®

KALTOSTAT er en hvid, blød og steril non-woven bandage, bestående af kalcium-natrium alginatfibre. Alginatfibrene absorberer såreksudatet og omdanner dette til en sammenhængende gel. Gelen skaber et fugtigt sårhelingsmiljø. Bandagen kan let fjernes fra såret.

INDIKATIONER

KALTOSTAT kan anvendes til moderat til kraftigt væskende sår, f.eks. tryksår, venøse og arterielle bensår, diabetes-sår, donorsteder, hudafskrabninger, rifter, mindre brandsår, kirurgiske sår, postoperative og traumatiske sår. KALTOSTAT kan anvendes på inficerede sår under lægetilsyn.

SKIFTEFREKVEN

Bandagen skiftes, når den er mættet, dog max efter 7 dage.

OPBEVARING

Opbevares tørt i stuetemperatur. Undgå stærkt lys.

STERILISERINGSMETODE

Gammasteriliseret.

KLASSIFICERING

KALTOSTAT er CE-mærket og opfylder alle relevante miljø- og sikkerhedskrav.

HOLDBARHED

3 år.

For yderligere information, læs brugsanvisningen i æsken.

KALTOSTAT®

Størrelse	Stk./æske	Varenr.
5 x 5 cm	10 stk.	168210
7,5 x 12 cm	10 stk.	168212
10 x 20 cm	10 stk.	168214
15 x 25 cm	10 stk.	168215

KALTOSTAT CAVITETSBÅND

2 gram	5 stk.	168117
--------	--------	--------



ConvaTec

Realize the possibilities™

1. R.H. Joy et al. A new calcium alginate haemostatic dressing. Dental Practice, February issue;16:1989.

© 2008 ConvaTec Inc

®/™ er varemærker tilhørende ConvaTec Inc.

ConvaTec Denmark Aps,
Birkeroed Kongevej 2, 3460 Birkeroed,
kundeservice: 45 87 60 11,
www.convatec.dk,
convatec.danmark@convatec.com