

Varenummer 222128

Skumbandage, PolyMem Shapes, 12,7x8,8cm, u/klæbende kontaktag, m/filmklæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Modulerer inflammation
- ✓ Renser kontinuerligt
- ✓ Understøtter og accelerer autolytisk debridering
- ✓ Absorberer og binder sårsekret, debris og bakterier
- ✓ Sikrer optimalt fugtigt sårmiljø
- ✓ Reducerer lugtgener
- ✓ Lindrer smerter (anti-nociceptorisk)



Produktbeskrivelse

PolyMem er en multifunktionel sårbandage med en inflammationsmodulerende effekt, der aktivt fremmer sårheling. Den anti-nociceptive effekt hæmmer smerteimpulsdannelsen og lindrer således sårsmarter.

PolyMem Shape er en alt-i-en bandage bestående af en oval PolyMem Standard med en semipermeabel film med klæbekant.

Anvendes til alle sår i alle faser med let til moderat sekretion.

Surfaktanten er et overfladeaktivt stof, der aktiveres af fugt og kontinuerligt frigives til sårbunden. Den løsner og fjerner avitalt væv og renser sårbunden atraumatisk, hvorved behovet for manuel soignering og debridering minimeres. Glycerinen aktiveres ligeledes af fugt og sikrer et fugtigt sårmiljø, ligesom den er plejende og beskyttende på den omkringliggende hud. Glycerinen sikrer atraumatisk fjernelse af bandagen ligesom den har en lugtreducerende effekt. Den hydrofile polyuretan matrix sikrer en kapillær effekt og skaber sammen med co-polymer et kontinuerligt negativt tryk. Derved trækkes væske fra det dybeliggende væv op til sårbunden. Mikroødem i og under bandagen reduceres og blodgennemstrømning fremmes. Væske og urenheder absorberes, bindes i og fjernes sammen med bandagen. Når matrix bliver fugtig udvides bandagen, således at skaber kontakt til sårbunden. På ydersiden er en semipermeabel film, der medvirker til et fugtigt sårmiljø.

Bør appliceres med puden mindst 2-3 cm ud over sårkanten og skiftes inden sårsekret når sårkanten. Bør ikke kombineres med produkter under, da det hæmmer PolyMem's effekt. Kan ikke tilklippes. Kan sidde i op til 7 dage såfremt sårets tilstand tillader det.

Bør appliceres med puden mindst 2-3 cm ud over sårkanten og skiftes inden sårsekret når sårkanten. Bør ikke kombineres med produkter under, da det hæmmer PolyMem's effekt. Kan ikke tilklippes. Kan sidde i op til 7 dage såfremt sårets tilstand tillader det.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumbandage
Varemærke	PolyMem
Vareserie	Shapes
Features	U/klæbende kontaktag, m/filmklæb, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Polyuretan matrix, Surfaktant, Glycerin, Co-polymer stivelse, PU-film, polyacrylatklæber
Længde/dybde	12.7 cm
Bredde	8.8 cm
Størrelse på sårpude	5 x 7,6 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	30 stk	24 cm	16.2 cm	12.4 cm	30735471080534
pk	15 stk	25 cm	16 cm	6 cm	20735471080537
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt