

Bakterier kan ikke modstå Sorbact® – det er en naturlov

Sorbact® er en unik opfindelse, der har vist gode resultater i sår-behandlingen. Baseret på naturlige processer og fysiske interaktioner fjerner Sorbact® sikkert bakterier, svampe og endotoksiner. Den DACC™-belagte overfladen er af en særlig karakter og har hydrofobe egenskaber, der forebygger og behandler infektion uden at frigive aktive stoffer til såret. Bakterier er forankret og irreversibelt bundet til den unikke overflade.



BINDER

- Sorbact®-bandagens DACC™-belagte overflade har særlige karakteristika og hydrofobe egenskaber
- Bakterier bindes og forankres naturligt til den unikke Sorbact®-overflade
- Binder også endotoksiner, der kan forringe sårheling*



HÆMMER

- Bakterierne bindes irreversibelt og væksten hæmmes
- Det er påvist, at endotoksiner ikke bliver frigivet fra bakterier*
- Der er ingen kendt antimikrobiel resistensmekanisme ved behandling med Sorbact®



FJERNER

- Bundne bakterier, svampe og endotoksiner fjernes på en sikker måde
- Bakterielastningen i sår bunden mindskes
- Reduceret mikrobiel belastning fremmer den naturlige sårheling

*In vitro-data

Produktsortiment



Sorbact® Compress Sårkontaktag/Sårfyldningsmateriale

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke	Varenr.	Størrelse	Stk./pakke
98128	4 x 6 cm	40	98124	10 x 100 cm (roll)	10
98125	7 x 9 cm	40			



Sorbact® Gel Dressing Sårkontaktag m. vandbaseret gel

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke	Varenr.	Størrelse	Stk./pakke
98136	7.5 x 7.5 cm	10	98180	15 x 20 cm	5
98137	7.5 x 15 cm	10	98181	20 x 25 cm	5
98139	3 x 15 cm	10			



Sorbact® Ribbon Meche

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke	Varenr.	Størrelse	Stk./pakke
98115-10	1 x 50 cm	10	98120	5 x 200 cm	10
98116-10	2 x 50 cm	10	98119	10 x 200 cm	10



Sorbact® Foam Gentle Border Skumbandage med silikonekant

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke	Varenr.	Størrelse	Stk./pakke
98531	7.5 x 7.5 cm	10	98533	15 x 15 cm	10
98532	10 x 10 cm	10			



Sorbact® Foam Dressing Skumbandage

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke	Varenr.	Størrelse	Stk./pakke
98310	10 x 10 cm	10	98320	10 x 20 cm	10
98315	15 x 15 cm	10	98325-10	Ø 4.5 cm	40 (4 x 10)



Sorbact® Surgical Dressing Filmbandage

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke	Varenr.	Størrelse	Stk./pakke
98140	5 x 7.2 cm	100	98144	10 x 25 cm	20
98141	8 x 10 cm	20	98145	10 x 30 cm	20
98142	8 x 15 cm	20	98146	10 x 35 cm	20
98143	10 x 20 cm	20			



Sorbact® Superabsorbent Superabsorbant

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke	Varenr.	Størrelse	Stk./pakke
98501	10 x 10 cm	10	98503	20 x 20 cm	10
98502	10 x 20 cm	10	98504	20 x 30 cm	10



Sorbact® Absorption Absorptionsbandage

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke	Varenr.	Størrelse	Stk./pakke
98226-10	7 x 9 cm	10	98225	10 x 10 cm	10
98225	10 x 10 cm	10	98223	10 x 20 cm	10

For detaljeret produktinformation, kontraindikationer, forsigtighedsregler og advarsler, bedes den gældende brugsanvisning (IFU) læses inden brug.

Referencer 1. Kammerlander G, Locher E, et al. 2008. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. *Wounds UK*. 4(2):10-18. 2. Bateman S. 2015. Evidence is building to support using a DACC-coated antimicrobial wound Contact layer with NPWT. *Wounds UK*. 11(1):82-86. 3. Haycocks S and Chadwick P. 2011. Use of DACC-coated dressings in diabetic foot ulcers: A case series. *Diabetic Foot J*. 14:133-137. 4. Hampton S. 2007. An evaluation of the efficacy of Cutimed Sorbact in different types of non-healing wounds. *Wounds UK*. 3(4):113-119. 5. Husmark J, Arvidsson A, et al. 2020. Antimicrobial effect of a DACC-coated bacteria-binding wound dressing against WHO pathogens. *EWMA* 2020. EP006.

Læs mere på sorbact.dk



Sorbact® er et registreret varemærke tilhørende ABIGO Medical AB

2022-125

Essity Denmark A/S
Cydevang 33
DK-3450 Allerød

sorbact.dk
+45 48 16 82 20
info@sorbact.dk



Brugervejledning

Sorbact® forebygger og behandler sårinfektioner

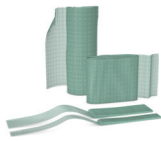
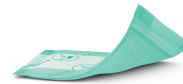
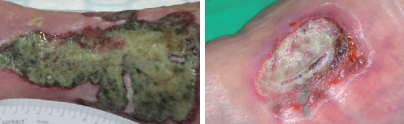
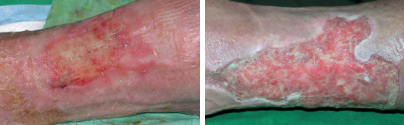
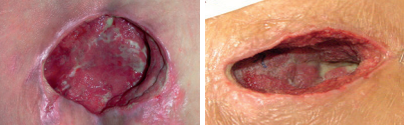
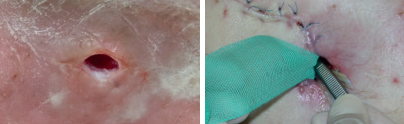


sorbact.dk

Fordele med Sorbact®

Træf et godt valg for dine patienter

- Reducerer sårstørrelse^{1,2}
- Sikkert og nemt at bruge¹
- Behageligt for patienten³
- Bidrager til at reducere smerter, mens det anvendes¹
- Bidrager til at reducere lugt fra såret⁴
- Effektiv mod multiresistente bakterier⁵

									
		Sorbact® Compress	Sorbact® Gel Dressing	Sorbact® Ribbon	Sorbact® Foam Gentle Border	Sorbact® Foam Dressing	Sorbact® Surgical Dressing	Sorbact® Superabsorbent	Sorbact® Absorption
		 Anvendelsesområde Væskende sår. Kan anvendes i kombination med NPWT som sårfyldningsmateriale eller sårkontaktlag.	 Anvendelsesområde Tørre til let væskende sår. Tilfører fugt til såret.	 Anvendelsesområde Væskende sår og fistler eller ved svampeinfektion (intertrigo) i hudfolder.	 Anvendelsesområde Moderat væskende sår. Bløde, selvyklæbende silikonekanter.	 Anvendelsesområde Lavt til moderat væskende sår.	 Anvendelsesområde Postoperative sår og traumesår.	 Anvendelsesområde Kraftigt til meget kraftigt væskende sår.	 Anvendelsesområde Moderat til meget kraftigt væskende sår.
Kirurgiske snit					✓		✓		
Rent		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koloniseret / Inficeret		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tørt / Fibrinøst			✓						
Overfladisk		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaviteter		✓	✓	✓					
Fistler			✓	✓					
NPWT		✓							
Svampeinfektioner i hudfolder				✓					
Mængde af sårvæske	Dybde	Infektionsfase							
 Tørt	 Overfladisk	 Infektionsforebyggelse							
 Let	 Dybt	 Infektionsbehandling							
 Moderat									
 Kraftigt									
 Meget kraftigt									
		Brugsanvisning Sørg for at bandagen har direkte kontakt med hele såret. Ved dybe sår: Udfold og ryst en eller flere bandager og fyld forsigtigt såret. Undgå at udtamponere. Fiksér med en sekundærbandage, der passer til mængden af sårvæske, f.eks. en skum-, absorptions- eller geldannende fiberbandage. Ved NPWT-behandling: Følg instruktionerne for anvendelse af det valgte NPWT-system.		Brugsanvisning Sørg for at bandagen har direkte kontakt med hele såret. Bandagen må ikke overlape den omgivende hud. Fiksér med en fugtbevarende sekundærbandage, der passer til mængden af sårvæske, f.eks. en skum-, absorptions- eller filmbandage.		Brugsanvisning Sørg for at bandagen har direkte kontakt med hele såret eller det berørte hudområde. Ved fistler: Undgå at udtamponere. Lad altid en del af bandagen forblive uden for såret, så den let kan fjernes. Fiksér med en sekundærbandage, der passer til mængden af sårvæske, f.eks. en skum-, absorptions- eller geldannende fiberbandage. Ved svampeinfektion: Fiksér med undertøj eller hudvenlig tape (uden for det berørte område).		Brugsanvisning Bandagen skal overlappe sårkanterne med 1 cm for at mindske risikoen for maceration. Fjern beskyttelsesfilmen fra sårkontaktsiden. Sørg for at bandagens grønne sårpude har direkte kontakt med hele såret. Tryk forsigtigt kanterne fast mod den omgivende hud.	
		Brugsanvisning Bandagen bør overlappe sårkanterne med mindst 2 cm. Sørg for at bandagens grønne side har direkte kontakt med hele såret. Fiksér med velegnet bandage.		Brugsanvisning Fjern beskyttelsesfilmen fra bandagens sårkontaktside. Sørg for at bandagens grønne sårpude har direkte kontakt med hele såret. Tryk kanterne fast mod den omgivende hud og fjern den stabiliserende film.		Brugsanvisning Bandagen bør overlappe sårkanterne med mindst 2 cm. Sørg for at bandagens grønne side har direkte kontakt med hele såret. Fiksér med velegnet bandage. Sørg for at fikser bandagen, så den har mulighed for at udvide sig.		Brugsanvisning Bandagen bør overlappe sårkanterne med mindst 2 cm. Sørg for at bandagens grønne side har direkte kontakt med hele såret. Fiksér med en elastisk bandage eller hudvenlig tape.	