

PICO med Soft Port er et kanisterfrit, engangssystem der optimerer patientmobilitet, tilgængelighed og økonomi inden for sårbehandling med negativt tryk (NPWT). Systemet leverer aktiv behandling i op til 7 dage.


 **smith&nephew**
PICO[®]
Single Use
Negative Pressure
Wound Therapy System



PICO bandagen

- Udviklet til at eliminere risikoen for trykpunkter¹ hvilket kan bidrage til patientkomfort for eksempel på vægtbærende områder som det sakrale område eller på hælen.
- Kan tilsluttes pumpen eller forlængerslangen der er vedlagt i kittet, dette for at imødekomme patienternes forskellige behov for flere muligheder til at bære pumpen.

Soft Port, bandagens lag og funktioner^{1,2}

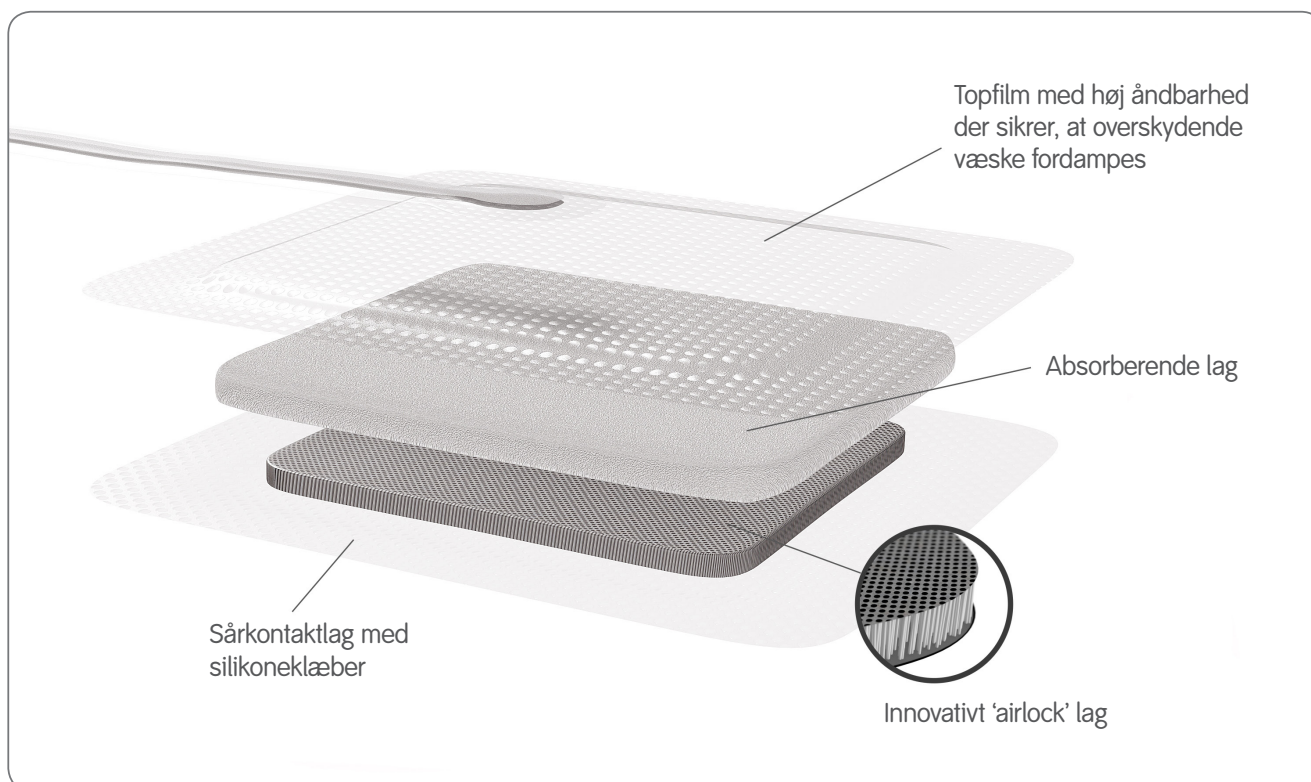

PICO® repræsenterer en unik måde at behandle patienter, der vil kunne have gavn af sårbehandling med negativt tryk (NPWT) på et åbent sår, en lukket incision eller hudtransplantat.

Det kanisterfrie PICO system består af en pumpe, så lille at den kan være i din hånd, tilsluttet en innovativ bandage der effektivt leverer et negativt tryk på 80mmHg (nominelt) og fjerner væske fra såret.^{1,2}

PICO Indikationer

PICO er velegnet til mange forskellige typer af sår som kroniske sår, akutte sår, traumesår, subakutte og rumperede sår, mindre brandsår, diabetiske fodsår og tryksår, hudlapper og transplantater samt lukkede kirurgiske incisioner.

Kontraindikationer

Brugen af PICO er kontraindiceret når der er nekrotisk væv og skorper; malignitet tilstede i sårbunden eller sårkanterne (undtaget palliativ pleje for optimering af livskvalitet); tidligere påvist og ubehandlet osteomyelitis; fistler uden bund og ueksplorerede fistler; blottede arterier, vener, nerver; blottede anastomoser; akut luftvejs aspiration; pleural, mediastinal eller brysthule drænage; kirurgisk sug.

PICO sårfyldningsmateriale og sårkontaktlag

PICO er kompatibel med standard NPWT gaze og skum hvor det er klinisk relevant – for eksempel i kaviteter. Ved brug af sårfyldningsmateriale bør materialet og PICO skiftes 2 til 3 gange om ugen, i henhold til lokale kliniske retningslinjer og producentens anbefalinger. PICO kan anvendes oven på et ikke-klæbende sårkontaktlag, f.eks. over et hudtransplantat.

På inficerede sår eller sår med risiko for infektion, kan ACTICOAT® Flex antimikrobiel bandage anvendes under PICO.

Produktsortiment


Varenummer	Beskrivelse	Størrelse	Antal
66801358	PICO	10cm x 20cm	1
66801359	PICO	10cm x 30cm	1
66801360	PICO	10cm x 40cm	1
66801361	PICO	15cm x 15cm	1
66801362	PICO	15cm x 20cm	1
66801363	PICO	15cm x 30cm	1
66801364	PICO	20cm x 20cm	1
66801365*	PICO	25cm x 25cm	1
66801356	PICO Multisite Small	15cm x 20cm	1
66801357	PICO Multisite Large	20cm x 25cm	1
66801553	PICO Single	10cm x 20cm	1
66801554	PICO Single	10cm x 30cm	1
66801555	PICO Single	10cm x 40cm	1
66801556	PICO Single	15cm x 15cm	1
66801557	PICO Single	20cm x 20cm	1

Appliceringsvejledning

1. Rens og forbered såret i henhold til lokale kliniske retningslinjer.



Applicér

2. Fjern den midterste beskyttelsesfilm og applicer bandagen centralt over såret. Porten skal placeres udenfor og proximalt for såret.
3. Fjern de to beskyttelsesfilm og udglat bandagen over såret for at undgå at kanterne folder.

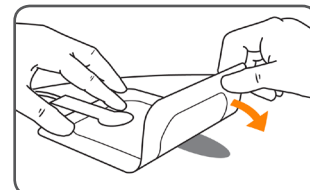

Tryk


4. Sæt batterierne i pumpen.
5. Tilslut pumpen til bandagen ved at samle konnektorerne.
6. Tryk på den orange knap, og start det negative tryk. Den grønne lampe vil begynde at blinke (betyder, at systemet virker korrekt).

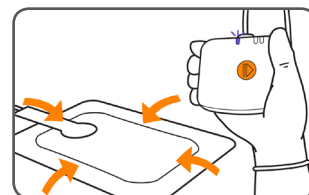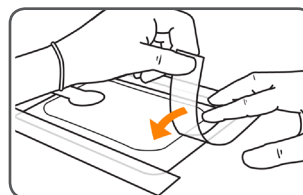


Start

7. Applicér fikseringsstrimlerne på bandagens fire sider.
8. Pumpen har en levetid på 7 dage og bandagen kan sidde på såret i op til 7 dage, afhængig af væskenniveauet.
9. Ved brug af sårfyldningsmateriale, skal fyld og PICO-bandagen skiftes 2 til 3 gange om ugen.


Bandageskift

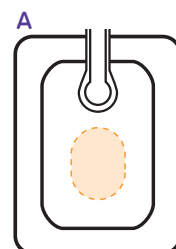

Bandagen er korrekt placeret og kan blive siddende

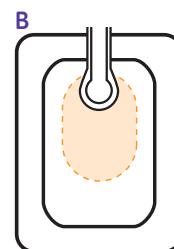

Bandagen skal skiftes

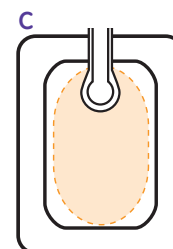

Bandagen skal skiftes

Referencer

1. Smith & Nephew data on file DS/14/065/R (in-vitro).
2. Smith & Nephew data on file DS/11/037/R2 (in-vitro).

Wound Management
Smith & Nephew A/S
Slotsmarken 14
2970 Hørsholm

T 45 80 61 00
F 45 80 61 51

www.smith-nephew.com
sn.dk@smith-nephew.com

*Varemærke tilhørende Smith & Nephew
© Smith & Nephew april 2015
15-03513-DK