




Produktdatablad

Skumbandage, PolyMem Standard, 17x19cm

Varenummer: 222153

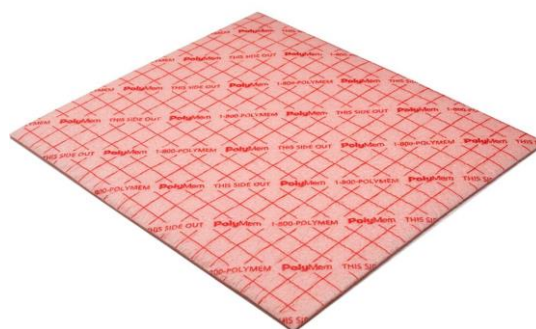

Varedeklaration

Forpakning: 15 stk pr. pakke. 2 pakker pr. kolli. Produktbetegnelse: Skumbandage. Varemærke: PolyMem. Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato. Ingredienser/sammensætning: Polyuretan matrix, Surfaktant, Glycerin, Co-polymer stivelse, PU-film. Features: standard, uden klæber, steril. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: R. Længde/dybde: 17 cm. Bredde: 19 cm. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: PolyMem er en multifunktionel sårbandage med en inflammationsmodulerende effekt, der aktivt fremmer sårheling. Den anti-nociceptive effekt hæmmer smerteimpulsdannelsen og lindrer således sårsmarter. PolyMem Standard kan anvendes til alle sår i alle faser med let til moderat sekretion. Er specielt velegnet initialt i sårbehandlingen med PolyMem, da såret væsker mere i starten. PolyMem Standard kan kombineres med PolyMem WIC for at forlænge skifteintervallet. Surfaktanten er et overfladeaktivt stof, der aktiveres af fugt og kontinuerligt frigives til sårbunden. Den løsner og fjerner avitalt væv og renser sårbunden atraumatisk, hvorved behovet for manuel soignering og debridering minimeres. Glycerinen aktiveres ligeledes af fugt og sikrer et fugtigt sårmiljø, ligesom den er plejende og beskyttende på den omkringliggende hud. Glycerinen sikrer atraumatisk fjernelse af bandagen, ligesom den har en lugtreducerende effekt. Den hydrofile polyuretan matrix sikrer en kapillær effekt og skaber sammen med co-polymer et kontinuerligt negativt tryk. Derved trækkes væske fra det dybereliggende væv op til sårbunden, mikroødem i og under bandagen reduceres og blodgennemstrømning fremmes. Væske og urenheder absorberes, bindes i og fjernes sammen med bandagen. Når matrix bliver fugtig udvides bandagen, således at skaber kontakt til sårbunden. På ydersiden er en semipermeabel film, der medvirker til et fugtigt sårmiljø. Bør appliceres mindst 2-3 cm ud over sårkanten, og skiftes inden sårsekret når sårkanten. Bør ikke kombineres med produkter under, da det hæmmer PolyMems effekt. Kan klippes i. Kan sidde på i op til 7 dage, såfremt sårets tilstand tillader det. Fikseres med passende sekundær fiksering. Ved fiksering med klæb, da kun i kanten. . Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.