



PICO er negativt tryk i lommeformat

En diskret pumpe i lommeformat og en avanceret bandage der håndterer ekssudat, åbner nye muligheder for en række patientgrupper inden for sårbehandling med NPWT. PICO er et engangssystem, klar-til-brug, til en fast pris. PICO kan appliceres på få minutter og bruges i op til syv dage. Patienten kan opretholde sine normale aktiviteter og udskrives tidligere.

PICO er NPWT på en ny, enklere og mere omkostningseffektiv måde.

 **smith&nephew**

PICO[®]

Sårbehandling med
negativt tryk, system
for engangsbrug



Hvad er PICO?

PICO er et engangssystem for sårbehandling med negativt tryk. En lille, diskret pumpe, drevet af to AA lithium batterier, og tilsluttet en avanceret bandage der eliminerer behovet for kanistre. PICO kan appliceres på kun få minutter.

PICO fungerer overalt:

Operationsstuen

- Appliceres på kun få minutter¹
- Klar-til-brug direkte fra hylden¹
- Enkel at bruge og nem at lære¹

På afdelingen

- Diskret og stille og forstyrrer ikke andre patienter
- Lille pumpe der fremmer patientens mobilitet²
- Effektiv³ behandling der muliggør hurtigere patientudskrivelse²

I eget hjem


- Tidligere udskrivelse med NPWT
- Nem at leve med², og kan øge patientens samarbejdsvilje

For økonomien

- Giver et klart billede af prisen og er omkostningseffektiv
- Reducerer omkostninger til behandling, administration og oplæring¹
- Reducerer behovet for service og administration for pumper

Bandagen består af:

1. Et klæbende sårkontaktlag i silikone der effektivt forsegler såret og er skånsom mod den omkringliggende hud. Det negative tryk fordeles over såret og fjerner eksudat.
2. Et airlock lag der fordeler det negative tryk ligeligt over bandagen.
3. Et superabsorberende lag der holder væske væk fra såret og huden omkring.
4. En højpermeabel (MVTR) film der slipper damp ud, hvilket eliminerer behovet for kanister. Filmen har en vand- og bakterietæt barriere.

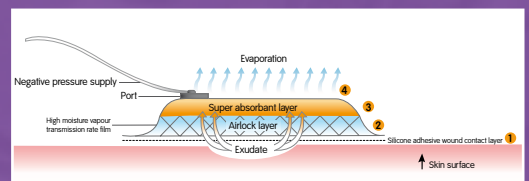

For miljøet – genbrug af PICO:

Pump og bandage

Klassificeres som forurenat klinisk affald og skal håndteres i henhold til lokale retningslinjer. Smith & Nephew indgår i et miljøprogram og betaler en årlig afgift, direkte relateret til den årlige fremstilling og forbrug af PICO i Danmark. Miljøafgiften skal dække omkostningerne i forbindelse med indsamling og genbrug af elektroniske produkter.

Batterierne

De to AA-batterier der er i pumpen kan nemt tages ud, og skal efter brug afleveres i beholdere for batterigenbrug.

PICO er egnet til:

- Hudtransplantat/hudlapper
- Mindre brandsår
- Små/mellemstore svært helende sår;
 - diabetiske fodsår
 - tryksår,
 - venøse sår
- Kirurgiske cicatriser som;
 - bryst rekonstruktion
 - hofte/knæimplantat
 - laparotomi

Produktsortiment

Bandage	Størrelse (cm)	Varenr	Antal
	10x20	66800862	1
	10x30	66800863	1
	15x15	66800865	1
	15x20	66800866	1

Mindste bestillingenhed 3 kits = transportkarton
Et kit = 1 pumpe og 2 bandager = 1 uges behandling

Referencer

1. OR DOF/014 A prospective, open, non comparative, multi-centre study to evaluate the functionality and dressing performance of a new negative pressure enhanced dressing in acute wounds.
2. OR DOF/012 A prospective, open, non comparative, multi-centre study to evaluate the functionality and dressing performance of a new negative pressure enhanced dressing in acute wounds.
3. Data on File, 1104011; Assessment of Simplified NPWT device in pre-clinical blood flow studies.

For patients. For budgets. For today.°

Smith & Nephew

Slotsmarken 14, 2970 Hørsholm
Telefon: 45 80 61 00
Fax : 45 80 61 51

sn.dk@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com/dk
www.mypico.co

° Varemærke tilhørende Smith & Nephew
© Smith & Nephew September 2011
11-0274