

Skånsom mod huden

 **smith&nephew**
OPSITE[®] FLEXIFIX
GENTLE
Transparent Silicone Adhesive
Film Roll



Appliceringsguide



OPSITE Flexifix Gentle kan anvendes til:

- ➔ Fiksering af primær bandage
- ➔ Hjælp ved fiksering af dræn
- ➔ Beskytte huden mod friktion og ydre kontaminering, for forebyggelse af tryksår
- ➔ Lindre gener ved smertefuld diabetisk neuropati
- ➔ Beskytte huden omkring stomi- og under benposer



OPSITE[®] Flexifix Gentle er en fleksibel¹ silikonefilm på rulle velegnet til patienter med skrøbelig hud^{2,4,5}.

Filmen kombinerer åndbarhed¹, transparens og op til 7 dages bæretid^{2,3}.

Den skånsomme silikoneklæb kan løftes og re-applíceres. Filmen er impermeabel for bakterier, beskytter mod udefrakommende kontamination og tillader at patienten kan tage brusebad med bandagen på.

Filmen er udviklet til nem applicering og kan klippes til efter behov⁶.



Fiksering af slanger og dræn

OPSITE Flexifix Gentle er velegnet til fiksering af slanger og dræn.




Fiksering af bandager

OPSITE Flexifix Gentle kan anvendes som sekundær fiksering i kanten af ALLEVYN bandager, MELOLIN og andre primære bandager, og er et skånsomt alternativ til traditionel fikseringsfilm.




Beskyttelse af skrøbelig hud/udsatte steder


OPSITE Flexifix Gentle udgør en effektiv og beskyttende barriere mellem huden og eksterne overflader som f. eks. stomi- og benposer.

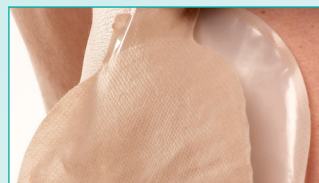


Så nemt er det:

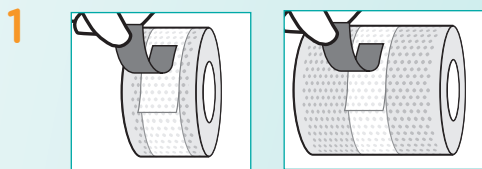


Fjern den blå tape og den transparente ring omkring filmrullen

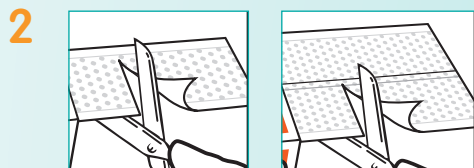

Klip til ønsket længde

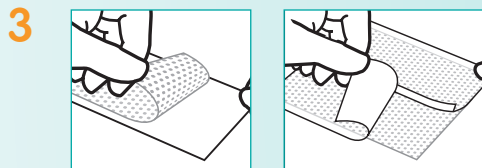

Fjern filmen fra bagsidepapiret

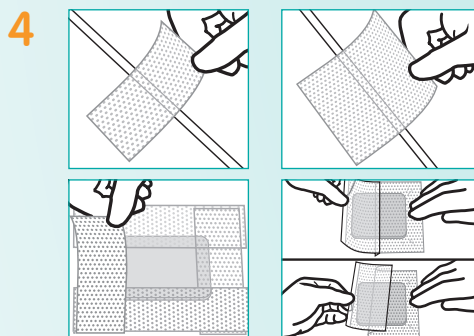

Applicér filmen og udglat

OPSITE Flexifix Gentle kan løftes og re-appliceres uden at miste de klæbende egenskaber.



Produktsortiment

Varenr.	Størrelse	Antal ruller pr æske
66801195	2.5cm x 5m	1
66801196	5cm x 5m	1
66801197	10cm x 5m	1

Wound Management
Smith & Nephew A/S
Slotsmarken 14
2970 Hørsholm

www.smith-nephew.com
sn.dk@smith-nephew.com

*Varemærke tilhørende Smith & Nephew
™Alle varemærker godkendt
© Smith & Nephew Februar 2014
14-02520-DK

T 45 80 61 00
F 45 80 61 51

Referencer

- Analytical Report, DS.12.184.R – comparative Product Testing Flexifix Gentle, 19/07/12, Daubney, L. [in-vitro].
- VT Study Data of File (on ALLEVYN® Gentle Border) HVT050 04/12/08.
- Data on File Report Reference OR-DOF/017, An open, prospective, randomised, comparative study to compare the performance of ALLEVYN Gentle Border Multisite with an alternative silicone adhesive dressing. Palmer S and Mistry C, June 2011.
- "Ageing changes in skin", update on 22/08/2006 by Sandra W. Cohen M.D. Ref <http://www.nim.nih.gov/medlineplus/ency/article/004014.htm>.
- Hurd, T et al., A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK, 2009, Vol 5, No 3, W11429/R9 Usability Study of Flexifix Gentle in comparison to Flexifix Technical Study Report, 21/09/2012, E Cole.