


# Quickguide

## PolyMem Multifunktionel sårbandage

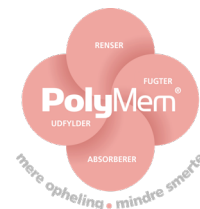

### Hvad er PolyMem?

- en **AKTIV** sårbandage bestående af:
  - Polyuretan matrix
  - Surfaktant
  - Glycerin
  - Superabsorbant
  - Filmbagside (undtaget WIC kavitetsbandager)

### Hvad gør PolyMem?

- Renser kontinuerligt
- Lindrer smerter
- Løser debris/fibrin/nekrose
- Absorberer og binder sårsekret, debris og bakterier
- Sikrer optimal fugtigt sårmiljø
- Sikrer atraumatisk fjernelse af bandagen

### Indikationer: Alle sårtyper i alle faser

- kirurgiske sår
- traumesår
- brandsår
- arterielle/venøse sår
- diabetiske fodsår
- tryksår
- immunologiske sår
- cancersår og stråleskadet hud

Kan anvendes under kompression

### PolyMem - et unikt terapeutisk system, som:

- Modulerer inflammation
- Understøtter og accelererer autolytisk debridement
- Booster sårhelingsprocessen
- Reducerer mikroødem i/omkring såret
- Reducerer infektion og infektionsrisiko
- Reducerer lugtgener
- Lindrer smerter (anti-nociceptorisk)

PolyMem **skal altid** have kontakt til sårbunden.  
Anvend ikke andre produkter under PolyMem!

### Rette produktvalg til rette sår og fase

|                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ikke-væskende sår                                                | PolyMem Standard                                                                   | Fugt sår eller bandage med vand/NaCl før applikation                                                                                                            |
| Tørre nekroser                                                   | PolyMem Standard                                                                   | Fugt nekrose eller bandage med vand/NaCl inden applikation - rids evt. i nekrosen                                                                               |
| Blottede sener og knogler                                        | PolyMem Standard el. PolyMem Max afhængig af sekretion                             | Fugt evt. væv eller bandage med vand/NaCl inden applikation - afhængig af sekretion                                                                             |
| Let til moderat væskende sår                                     | PolyMem Standard                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| Moderat til kraftigt væskende sår                                | PolyMem Max                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| Meget kraftigt væskende sår                                      | PolyMem WIC + PolyMem Max                                                          | Alternativ sekundærbandage: superabsorbant                                                                                                                      |
| Kaviteter > ½ cm, hvor sårbunden kan ses                         | PolyMem WIC                                                                        | Kan lægges i flere lag<br>Fyld kun 2/3 af kavitet                                                                                                               |
| Fistler og kaviteter > ½ cm, hvor sonderbar sårbund ikke kan ses | PolyMem WIC Silver Rope                                                            |                                                                                                                                                                 |
| Sår, skader, kirurgiske incisioner på fingre/tær                 | PolyMem finger/tå bandage (str 1-5/S-XXL)                                          | Kantfikseres m/film eller tape.<br>Ved kraftigt væskende sår anbefales applicering af PolyMem WIC under bandagen. Vælg da en større størrelse finger/tå bandage |
| Ved infektion eller risiko for infektion                         | PolyMem Silver ud fra ovenstående principper.<br>Gælder også for finger/tå bandage | OBS: at underliggende årsag til infektion behandles                                                                                                             |

# Anvendelse af PolyMem

## Første applicering

1. Vælg bandage ift. sårtype og -fase
2. Rens såret efter lokale hygiejniske principper
3. Applicér PolyMem og fiksér med passende fiksering  
Skift bandagen, før sårsekret når sårkanter

PolyMem **skal altid** have kontakt til sårbunden.  
Anvend ikke andre produkter under PolyMem!

## Følgende bandageskift

1. Fjern bandagen og vurder sårets behov, sekretion og skifteinterval
2. Forstyr ikke sårbunden, undlad soignering/debridering
3. Ved infektion soignerens såret efter lokale hygiejniske principper
4. Soignér hudomgivelser
5. Applicér PolyMem og fiksér med passende fiksering

## Tips & tricks

- PolyMem skal gå min. 2-3 cm ud over sårkanten
- Ved skrøbelig/skadet hud kan PolyMem med fordel dække hele området
- Alle PolyMem uden klæb kan klippes til efter behov
- Ternet filmside skal vende væk fra såret
- Ved fiksering med klæb - fiksér KUN I KANTEN

## Gældende for PolyMem WIC

- PolyMem WIC må kun anvendes i kaviteter og fistler med sonderbar sårbund
- Kaviteter fyldes max. 2/3, undgå udtamponering
- Kan lægges i flere lag ved dybere kaviteter
- Kan anvendes som sårkontaktag med passende sekundær bandage

## Værd at vide

- Komponenterne i PolyMem aktiveres af fugt og frigives kontinuerligt
- Hænger bandagen fast i størknet blod/eksudat, løsnes dette forsigtigt med vand/NaCl
- PolyMem renser såret, hvilket i starten kan forårsage lugt/øget lugt, dette aftager
- PolyMem løsner nekroser og fibrin, hvorfor såret initialt kan synes større og dybere, dette er normalt

## Skiftefrekvens

PolyMem kan ligge på såret i op til 7 dage - såfremt sekretion og sårets tilstand tillader det

Som indikator for skift anbefales det at optegne sårets omkreds på bandagens yderside.

Bandagen skiftes før eksudat når sårkanter eller er blevet våd, fx. ved bad

## Vigtig viden!

PolyMem understøtter den autolytiske debridering, øger væsketilstrømningen og igangsætter kraftig aktivitet i sår og hud dækket af bandagen. Derfor kan der ses øget sekretion, og dermed behov for øget skiftefrekvensens initialt - dette er helt normalt. Sekretion aftager gradvist efter 1-2 uger - og sårhelingen accelereres.

For yderligere information anbefales det at læse indlægssedlen i PolyMem-æskan.



For yderligere information kontakt:

Tlf.: 32 97 15 25 | [www.apodan.dk](http://www.apodan.dk) | [info@apodan.dk](mailto:info@apodan.dk)