

Bakterier kan ikke modstå Sorbact® – det er en naturlov

Sorbact® er en opfindelse, der har vist gode resultater i sårbehandlingen. Den DACC™-belagte overflade er af en særlig karakter og har hydrofobe egenskaber, der forebygger og behandler infektion uden at frigive aktive stoffer til såret. Bakterier er forankret og irreversibelt bundet til den unikke overflade. Sorbact® binder også svampe og endotoksiner, der kan hæmme sårheling. Baseret på fysiske interaktioner fjerner Sorbact®-bandager sikkert bakterier, svampe og endotoksiner.



BINDER

- Den DACC™-belagte overflade af Sorbact® har særlige karakteristika og hydrofobe egenskaber
- Bakterier bindes og forankres naturligt til den unikke DACC™-belagte overflade
- Binder også endotoksiner, der kan forringe sårheling*



HÆMMER

- Bakterierne bindes irreversibelt og væksten hæmmes
- Det er påvist, at endotoksiner ikke bliver frigivet fra bakterierne*
- Antimikrobiel resistens er ikke forventet



FJERNER

- Bundne bakterier, svampe og endotoksiner fjernes på en sikker måde
- Bakterielastningen i sårbunden mindskes
- Reduceret mikrobiel belastning fremmer den naturlige sårheling

*In vitro-data

Produktsortiment



Sorbact® Compress Sårkontaktlag/Sårfyldningsmateriale

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
222133	72165-34	98128	4 x 6 cm	40	<i>Ikke på aftale</i>	72165-30	98124	10 x 100 cm	10
222125	72165-35	98125	7 x 9 cm	40				(rulle)	



Sorbact® Gel Compress Sårkontaktlag med hydrogel

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
1999918337	72764-11	98136	7,5 x 7,5 cm	10	<i>Ikke på aftale</i>	72764-02	98180	15 x 20 cm	5
<i>Ikke på aftale</i>	72764-06	98139	3 x 15 cm	10	<i>Ikke på aftale</i>	72764-04	98181	20 x 25 cm	5
<i>Ikke på aftale</i>	72764-08	98137	7,5 x 15 cm	10					



Sorbact® Ribbon Meche

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
<i>Ikke på aftale</i>	72165-40	98115-10	1 x 50 cm	10	222113	72165-43	98120	5 x 200 cm	10
<i>Ikke på aftale</i>	72165-41	98116-10	2 x 50 cm	10	1999913988	72165-39	98119	10 x 200 cm	10



Sorbact® Foam Dressing Skumbandage

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
222136	72763-00	98310	10 x 10 cm	10	<i>Ikke på aftale</i>	98320	98320	10 x 20 cm	10
222137	72763-01	98315	15 x 15 cm	10	1999916497	72763-06	98325-10	Ø 4,5 cm	40 (4 x 10)



Sorbact® Surgical Dressing Filmbandage

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
222118	72766-00	98140-50	5 x 7,2 cm	50	<i>Ikke på aftale</i>	72766-10	98144	10 x 25 cm	20
222119	72766-03	98141	8 x 10 cm	20	<i>Ikke på aftale</i>	72766-13	98145	10 x 30 cm	20
<i>Ikke på aftale</i>	72766-06	98142	8 x 15 cm	20	<i>Ikke på aftale</i>	72766-15	98146	10 x 35 cm	20
<i>Ikke på aftale</i>	72766-08	98143	10 x 20 cm	20					



Sorbact® Superabsorbent Superabsorbant

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
1000001332	72698-29	98501	10 x 10 cm	10	1000001334	72698-33	98503	20 x 20 cm	10
1000001333	72698-31	98502	10 x 20 cm	10	<i>Ikke på aftale</i>	72698-35	98504	20 x 30 cm	10



Sorbact® Absorption Absorptionsbandage

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
1999913969	72165-25	98226-10	7 x 9 cm	10	1999913971	72165-26	98223	10 x 20 cm	10
1999913970	72165-20	98225	10 x 10 cm	10					



Cutimed® Siltec® Sorbact® B Skumbandage med silikonekant

Abena Varenr.*	Varenr.**	Størrelse	Stk./pk.
<i>Ikke på aftale</i>	73251-76	7,5 x 7,5 cm	10
<i>Ikke på aftale</i>	73251-84	10 x 10 cm	10
<i>Ikke på aftale</i>	73251-77	12,5 x 12,5 cm	10
<i>Ikke på aftale</i>	73251-78	15 x 15 cm	10
<i>Ikke på aftale</i>	73251-79	17,5 x 17,5 cm	5
<i>Ikke på aftale</i>	73251-80	22,5 x 22,5 cm	5
<i>Ikke på aftale</i>	73251-85	7 x 10 cm (oval)	10

Cutimed® Siltec® Sorbact® B Sacrum

Abena Varenr.*	Varenr.**	Størrelse	Stk./pk.
<i>Ikke på aftale</i>	73251-81	17,5 x 17,5 cm	5
<i>Ikke på aftale</i>	73251-82	23 x 23 cm	5

*Abena varenr. til bestilling. **Essity varenr.

For detaljeret produktinformation, kontraindikationer, forsigtighedsregler og advarsler, bedes den gældende brugsanvisning (IFU)

References 1 Mosti G et al. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. *J Wound Care*. 2015;24(3):121-127. 2 Kammerlander G et al. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. *Wounds UK*. 2008;4:10-18. 3 Hampton S. An evaluation of the efficacy of Cutimed Sorbact in different types of non-healing wounds. *Wounds UK*. 2007;3:113-119. 4 Husmark J et al. Antimicrobial effects of bacterial binding to a dialkylcarbomoyl chloride-coated wound dressing: an in vitro study. *J Wound Care*. 2022;31:560-570.

Cutimed® er et registreret varemærke tilhørende BSN medical GmbH.

Læs mere på sorbact.dk



Sorbact® er et registreret varemærke tilhørende Abigo Medical AB 9017_1223


Essity Denmark A/S Gydevang 33 DK-3450 Allerød

sorbact.dk +45 48 16 82 20 kundeservice.dk@essity.com




Brugervejledning

Sorbact® sårbandager forebygger og behandler sårinfektioner

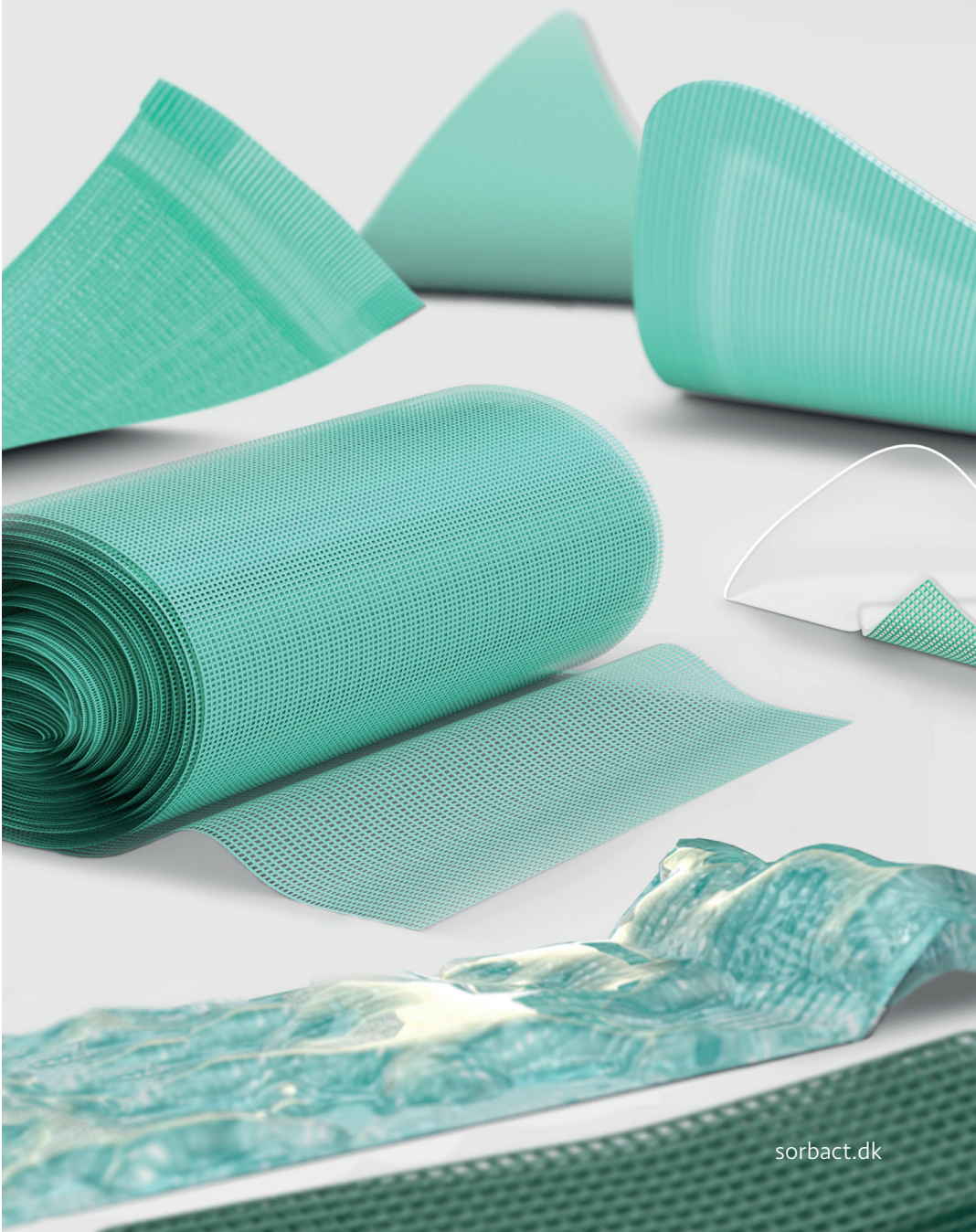


- Reducerer den mikrobielle belastning i sår¹
- Sikkert og nemt at bruge²
- Bidrager til at reducere smerter, mens det anvendes¹
- Bidrager til at reducere lugt fra såret³
- Ingen begrænsning i behandlingstid²
- Effektiv mod multiresistente bakterier⁴

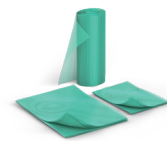

**Sorbact®
Compress**



Sorbact®
Gel Compress

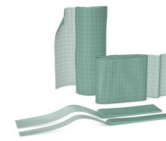

**Sorbact®
Ribbon**



**Cutimed® Siltec®
Sorbact® B**



Sorbact® Foam Dressing



Sorbact®
Surgical Dressing



Sorbact®
Superabsorbent



Sorbact®
Absorption

			Anvendelsesområde Væskende sår. Kan anvendes i kombination med NPWT som sårfyldningsmateriale eller sårkontaktlag.	Anvendelsesområde Tørre til væskende sår. Tilfører fugt til såret.	Anvendelsesområde Væskende sår og fistler eller ved svampeinfektion (intertrigo) i hudfolder.	Anvendelsesområde Moderat væskende sår. Bløde, selvkøbende silikonekanter.	Anvendelsesområde Lavt til moderat væskende sår.	Anvendelsesområde Postoperative sår og traumesår.	Anvendelsesområde Kraftigt til meget kraftigt væskende sår.	Anvendelsesområde Moderat til meget kraftigt væskende sår.
Kirurgiske snit						✓		✓		
Rent			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koloniseret / Inficeret			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tørt / Fibrinøst				✓						
Overfladisk			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaviteter			✓	✓	✓					
Fistler				✓	✓					
NPWT			✓							
Svampeinfektioner i hudfolder					✓					

- Tørt
- Let
- Moderat
- Kraftigt
- Meget kraftigt

- Overfladisk
- Dybt
- Overfladisk + Dybt

- Infektionsforebyggelse
- Infektionsbehandling

Sørg for at bandagen har direkte kontakt med hele såret.

Ved dybe sår: Udfold og ryst en eller flere bandager og fyld forsigtigt såret. Undgå at udtamponere.

Fiksér med en sekundærbandage, der passer til mængden af sår væske, f.eks. en skum-, absorptions- eller geldannende fiberbandage.

Ved NPWT-behandling: Følg instruktionerne for anvendelse af det valgte NPWT-system.

Sørg for at bandagen har direkte kontakt med hele såret. Bandagen må ikke overlape den omgivende hud. Fiksér med en fugtbevarende sekundærbandage, der passer til mængden af sår væske, f.eks. en skum-, absorptions- eller filmbandage.

Sorg for at bandagen har direkte kontakt med hele såret eller det berørte hudområde.

Ved fistler: Undgå at udtamponere.

Lad altid en del af bandagen forblive uden for såret, så den let kan fjernes. Fiksér med en sekundærbåndage, der passer til mængden af sårveske, f.eks. en skum-, absorptions- eller geldænnende fiberbandage.

Ved svampeinfektion: Til fiksering kan der bruges undertøj eller hudvenligt tape (uden for det berørte område).

Bandagens skal overlappe sårkanterne med 1 cm for at mindske risikoen for maceration. Fjern beskyttelsesfilmen fra sårkontaktsiden. Sørg for at bandagens grønne sårpude har direkte kontakt med hele såret. Tryk forsigtigt kanterne fast mod den omgivende hud.

Bandagen bør overlappe
sårkanterne med mindst 2 cm.
Sørg for at bandagens grønne side
har direkte kontakt med hele såret.
Fiksér med velegnet bandage.

Fjern beskyttelsesfilmen fra bandagens sårkontaktside. Sørg for at bandagens grønne sårpude har direkte kontakt med hele såret. Tryk kanterne fast mod den omgivende hud og fjern den stabiliserende film.

Påfør bandagen med den grønne side af bandagen i direkte kontakt med såroverfladen. Forbindingen skal overlappe sårkanterne med mindst 2 cm. Fastgør med en elastisk bandage eller hudvenlig tape.

Bandagen bør overlappe
sårkanterne med mindst 2 cm.
Sørg for at bandagens grønne side
har direkte kontakt med hele såret.
Fiksér med en elastisk bandage
eller hudvenlig tape.