


Mextra® Superabsorbent


Alsidiig løsning, der bidrager til vellykket behandling af kraftigt væskende sår

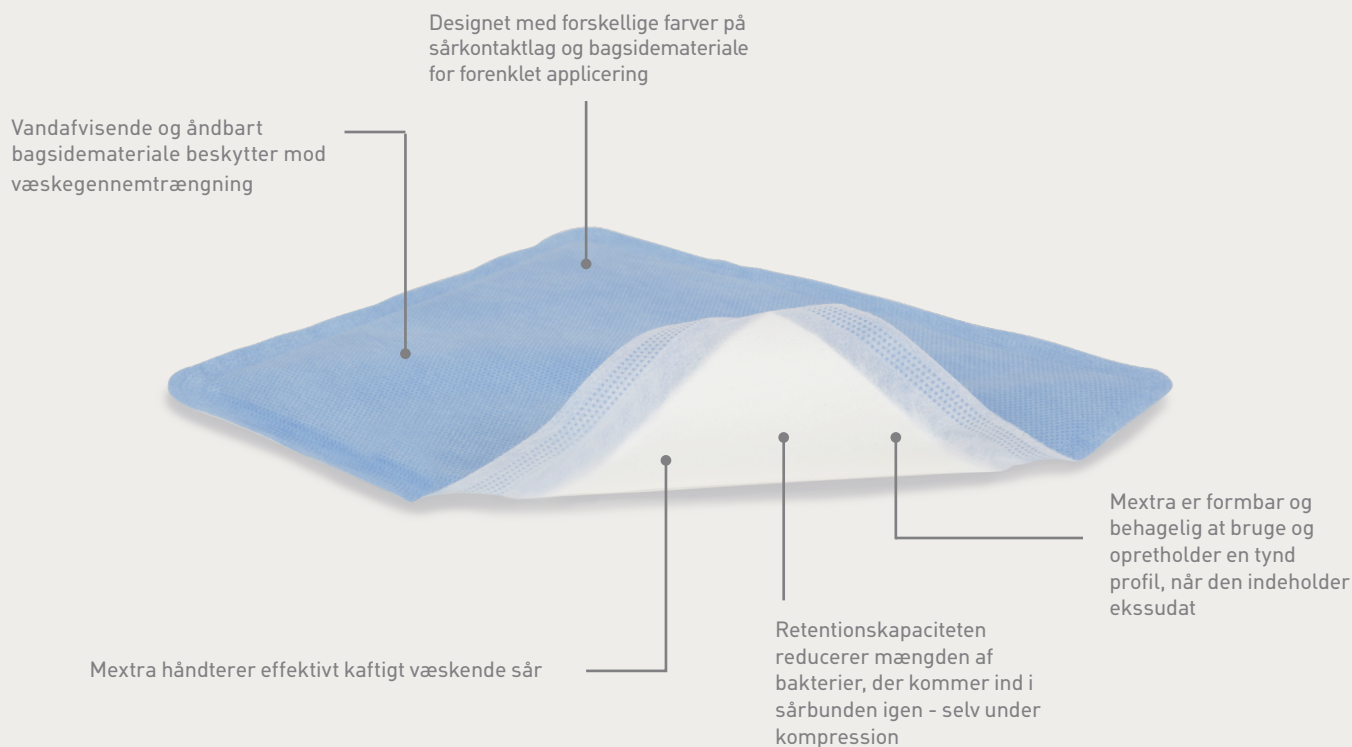


Nøgleegenskaber ved Mextra® Superabsorbent:

- Hurtig væskeoptagelse
- Høj absorptions- og retentionskapacitet, der minimerer risikoen for maceration
- Reducerer mængden af bakterier, der kommer ind i sårbunden igen - selv under kompression
- Formbar og behagelig at bruge

Sådan anvendes Mextra® Superabsorbent

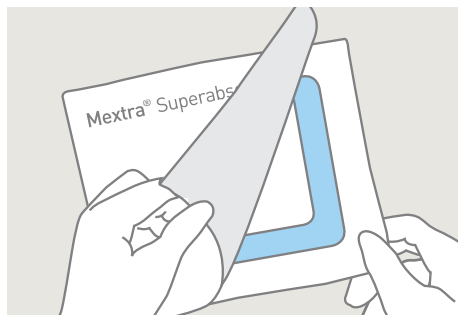


1. Rens såret og vælg en passende størrelse af Mextra® Superabsorbent.

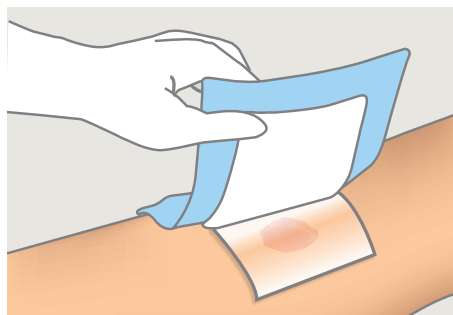

2. Applicér Mextra Superabsorbent direkte på såret med den hvide side af bandagen mod såret. For bedste resultat, bør puden overlape den tørre, omkringliggende hud med mindst 2 cm. Mextra Superabsorbent kan anvendes sammen med Mepitel® One eller Melgisorb® Plus.

Kan bruges på kroniske sår, såsom tryksår og bensår.

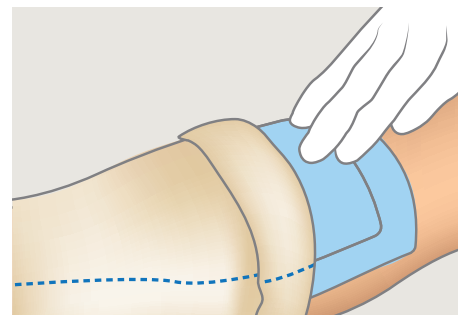

3. Fiksér Mextra Superabsorbent med en egnet bandage som Tubifast® eller fikseringstape. Kan også anvendes under kompression.

Fordele ved Mextra Superabsorbent

- Reducerer risikoen for maceration (beskytter huden omkring såret)
- Kan bruges på venøse bensår under kompressionsbandage
- Absorberer og retinerer bakterieholdigt eksudat
- Bidrager til patientens komfort under brug
- Let at applicere

Anvendelsesområder

Mextra® Superabsorbent er udviklet til at kunne håndtere eksudat fra moderat til kraftigt væskende sår. Mextra Superabsorbent absorberes effektivt og væsken holdes inde i kernen af superabsorbanterne, hvilket minimerer risikoen for maceration. Det vandafvisende og åndbare bagsidemateriale beskytter mod væskegennemtrængning, hvilket forhindrer lækage og hjælper med at beskytte tøj og sengelinned.

Skiftefrekvens

Såret og Mextra Superabsorbent bør tilses regelmæssigt. Bandagen bør skiftes afhængig af sårets tilstand, eller hvis den bliver gennemblødt. Mextra Superabsorbent bør maksimalt ligge på såret i syv dage.

Reference: Mölnlycke Health Care. Data on file. 2020.



Mextra Superabsorbent sortiment (sterilt enkeltpakket)

Varenr.	Str. (cm)	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt.
610700	10 x 10	10	50
610710	10 x 15	10	40
610720	10 x 20	10	90
610730	15 x 20	10	40
610740	20 x 25	10	40
610750	20 x 30	10	50
610760	20 x 40	10	50

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke, Mextra, Mepitel, Mepilex og Tubifast varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2023 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC1932312


Mölnlycke®