

aquaceso™

Din innovative løsning til sårspuling



Trin 1: Påfyld vand/skyllevæske



Trin 2: Skru spulehovedet på



Trin 3: Sæt spuleskjoldet på



Trin 4: Spul såret



AXEL MADSEN_{AS}
HEALTH-CARE
SINCE 1909



aquaceso™

FORORD

En ren sårbund er en afgørende faktor for, at et sår kan overgå fra inflammationsfasen til proliferationsfasen, hvorfor vi som sundhedsfaglige må bestræbe os på at bruge de bedst mulige værktøjer til at opnå dette. Sårspuling er en essentiel del af sårbehandling og har stor betydning for, at et sår har de bedste betingelser for ophealing.

Effektiv sårspuling er med til at reducere sårets bakteriebyrde, som er en væsentlig årsag til manglende sårheling. Ligeledes kan fremmedlegemer, nekrotisk væv, sekreter og anden forurening gennem sårspuling fjernes, og således nedsætte risikoen for udvikling af infektion i såret.

Den Danske kvalitetsmodel stiller krav om, at vi som sundhedsprofessionelle kontinuerligt skal søge og sikre, at vi yder den bedst mulige kvalitet, patient-sikkerhed og patienttilfredshed.

Med udviklingen af Aquaceso er der skabt en stor mulighed for et kvalitetsløft af sårbehandling og sårspuling, der imødekommer større patient-sikkerhed og ikke mindst tilfredshed. Smerte og ubehag ved sårspuling under højt tryk er et problem for mange patienter. Denne smerteproblematik afhjælpes med Aquaceso ved anvendelse af spulehovedet med tre dyser og det formbare spuleskjold, der spreder skyllevæsken i hele kaviteten. Denne form for spuling opleves af patienten som mindre ubehagelig. Skjoldet beskytter derudover den sundhedsprofessionelle imod tilbagesprøjt af forurenede skyllevæske.

Patienttilfredsheden ligger alle sundhedsfaglige på sinde, og vi ønsker alle at påføre vores patienter så lidt smerte og ubehag som muligt. Ligeledes ønskes det at skabe de bedst mulige betingelser for personalets sikkerhed. Det er derfor glædeligt, at vi nu har fået dette nye værktøj, Aquaceso, til professionel sårbehandling, der imødekommer begge disse udfordringer.



God arbejdslyst

Pia Malene Poulsen

Sygeplejerske

Ortopædkirurgisk Afd. O1551
Nordsjællands Hospital

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT RENSE AKUTTE OG KRONISKE SÅR?

Rensning af sår er en yderst vigtig del af sårbehandling, da denne proces er med til at fjerne f.eks.

- Fremmedlegemer
- Jordpartikler
- Sårsekreter
- Nekroser og vævsrester

Ved rensning reduceres sårets bakteriebyrde, der antages at være en væsentlig årsag til manglende sårheling¹.

HVORDAN ANBEFALES DET AT RENSE AKUTTE OG KRONISKE SÅR IDAG?

- Der bør bruges ca. 150 ml væske per 5 cm sårlængde/ diameter, effekten af en rensning afhænger af den mængde væske der anvendes¹
- Anvende vandhanevand/skyllevæske på ca. 32 grader, svarende til hudens temperatur²
- Lavtryksspuling til sår i inflammationsfasen der ikke er præget af mere fastsiddende forurening, proliferations- og maturationsfasen
- Højtryksspuling til sår i inflammationsfasen som er præget af mere fastsiddende forurening f.eks. jordpartikler eller nekrotisk væv

Metoderne er følgende:

- Vand fra kande
- Håndbruser
- 20 – 100 ml sprøjte med studs eller kateter¹
- Spulepose – Aquaceso

¹ Susan Bermark & Jette Skiveren, Klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk. Center for kliniske retningslinjer, Aarhus universitet, DASYS, 08.01.2011

² Vandhanevand må dog ikke anvendes til sår, der kræver steril skiftning f.eks. sår med adgang til hulrum og operationssår de første 24 postoperative timer.

HVORFOR ER AQUACESO ET GODT VALG TIL SÅRSPULING?

- Aquaceso kan anvendes til størstedelen af alle akutte og kroniske sår i inflammations-, proliferations- og maturationsfasen
- Aquaceso kan indeholde 300 ml vand/skyllevæske, som dækker behovet for en typisk sårspuling op til 10 cm sårlængde/diameter
- Aquaceso kan anvendes med vandhanevand på 32 grader. Herved opretholdes sårtemperaturen og sårhelingsprocessen under spulingen understøttes
- Aquaceso spulehovedet kan vinkles og består af 3 dyser, som sikrer en bred spulingsflade
- Aquaceso har et formbart og transparent spuleskjold, som sikrer en tæt og visuel spuling
- Aquaceso er et personligt værnemiddel, der beskytter sårbehandleren mod gensprøjt af kontamineret vand/skyllevæske
- Aquaceso er et engangsprodukt, som minimerer risikoen for smitte samt overførsel af mikroorganismer



Aquaceso er latexfri

Mere information samt bestilling



Anne Dorte Akerø

Produktspecialist/
Sygeplejerske

Region Hovedstaden &
Region Sjælland

Tlf.: 23 61 77 15
ada@dk.LRmed.com



Tina Haugbølle Piibl

Produktspecialist/
Sygeplejerske

Region Midtjylland &
Region Syddanmark

Tlf.: 25 79 80 03
thp@dk.LRmed.com



Nancy Børsting Sørensen

Key Account Manager/
Sygeplejerske

Region Nordjylland

Tlf.: 40 53 46 56
nbs@dk.LRmed.com

Kundeservice: Tlf.: 45 89 02 25 | Mail: info@dk.LRmed.com

Sortiment Aquacesco		
Ref.nr:	Stk. æske	Stk. Forsendelseskarton
45 111	10	100



AXEL MADSEN^{AS}
HEALTH-CARE
SINCE 1909

Højnæsgaard | Gøngehusvej 252 | 2950 Vedbæk | Tlf.: 4589 0225
www.axel-madsen.dk

