


Varenummer 222236

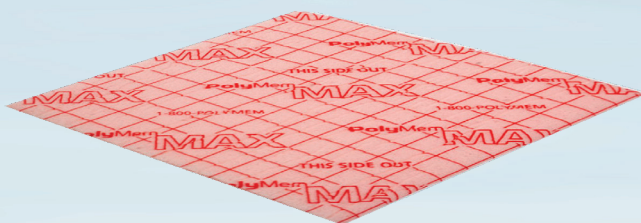

## Skumbandage, PolyMem Max, 11x11cm, u/klæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Modulerer inflammation
- ✓ Renser kontinuerligt
- ✓ Understøtter og accelerer autolytisk debridering
- ✓ Absorberer og binder sårsekret, debris og bakterier
- ✓ Sikrer optimalt fugtigt sårmiljø
- ✓ Reducerer lugtgener
- ✓ Lindrer smerter (anti-nociceptorisk)



### Produktbeskrivelse

PolyMem er en multifunktionel sårbandage med en inflammationsmodulerende effekt, der aktivt fremmer sårheling. Den anti-nociceptive effekt hæmmer smerteimpulsdannelsen og lindrer således sårsmarter.

PolyMem MAX kan anvendes til alle sår i alle faser med moderat til kraftig sekretion. Er specielt velegnet initialt i sårbehandlingen med PolyMem, da såret væsker mere i starten. Håndterer op til 60% mere end PolyMem Standard Kan kombineres med PolyMem WIC for at forlænge skifteintervallet.

Surfaktanten er et overfladeaktivt stof, der aktiveres af fugt og kontinuerligt frigives til sårbunden. Den løser og fjerner avitalt væv og renser sårbunden atraumatisk, hvorved behovet for manuel soignering og debridering minimeres. Glycerinen aktiveres ligeledes af fugt og sikrer et fugtigt sårmiljø, ligesom den er plejende og beskyttende på den omkringliggende hud. Glycerinen sikrer atraumatisk fjernelse af bandagen, ligesom den har en lugtreducerende effekt. Den hydrofile polyuretan matrix sikrer en kapillær effekt og skaber sammen med co-polymer et kontinuerligt negativt tryk. Derved trækkes væske fra det dybere liggende væv op til sårbunden, mikroødem i og under bandagen reduceres og blodgennemstrømning fremmes. Væske og urenheder absorberes, bindes i og fjernes sammen med bandagen. Når matrix bliver fugtig udvides bandagen, således at skaber kontakt til sårbunden. På ydersiden er en semipermeabel film, der medvirker til et fugtigt sårmiljø.

Bør appliceres mindst 2-3 cm ud over sårkanten og skiftes inden sårsekret når sårkanten. Bør ikke kombineres med produkter under, da det hæmmer PolyMems effekt.

Kan klippes i. Kan sidde på i op til 7 dage, såfremt sårets tilstand tillader det.

Fikseres med passende sekundær fiksering. Ved fiksering med klæb, da kun i kanten.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumbandage
Varemærke	PolyMem
Vareserie	Max
Features	U/klæb, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Polyuretan matrix, Surfaktant, Glycerin, Co-polymer stivelse, PU-film
Længde/dybde	11 cm
Bredde	11 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb

Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	26.5 cm	21 cm	10 cm	30735471050452
pk	10 stk	26.5 cm	21 cm	5 cm	20735471050455
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt