



## Produktdatablad

# Polymermembran, u/klæbekant, u/klæbende kontaktlag, tynd steril, til finger/tå, medium

Varenummer: 222239



## Varedeklaration

Forpakning: 6 Stk pr. Pakke, 3 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Skumbandage. Varemærke: PolyMem.

Ingredienser/sammensætning: Polyuretan matrix, Surfaktant, Glycerin, Co-polymer stivelse, PU-film. Features: finger-tå bandage, uden klæber, omfang 5,7cm-6,7cm, steril. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: R. Størrelse: M. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Alt-i-én PolyMem Standard bandage designet til optimal behandling af sår og skader på fingre og tæer. Den velkendte inflammationsmodulerende, helende og smertelindrende effekt af PolyMem, som terapeutisk sårbehandlingssystem. Sikrer kontinuerlig rensning af såret og opretholder det fugtige sårmiljø, hvilket reducerer behovet for soignering/debridering ved bandageskift. Hæmmer dannelsen af hæmatom og ødem, hvorved omfang af skaden reduceres og smerter lindres. Kan anvendes til alle typer sår og skader på fingre og tæer: .Akutte sår: hudafskrabninger, rifter, snitsår .Traumatiske sår: pulpaskader, brandskader .Kroniske sår, herunder diabetiske fod-/tå sår .Post-operativ bandage på fingre og tæer .Skader uden sår: kontusioner, forstuvninger etc. Mål omkreds af tykkeste sted på finger/tå - vælg rette størrelse bandage. Finger/tå længde måles og det overskydende materiale afklippes inden bandagen applikeres. Den er enkel at applicere og sikrer fri bevægelighed. Kan enten sidde selv eller kantfikseres. Bør af hensyn til væskehåndtering ikke dækkes af anden bandage. Ved behov for ekstra væskehåndtering, anbefales at lægge en PolyMem WIC under. Vælg da en størrelse større. Se endvidere størrelsesangivelse og pictogram på æsken. . Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.