

WELLAND WAD KLÆBEFJERNER

- til skånsom aftagning af klæberen og fjernelse af klæberester

Welland Klæbefjerner er en medicinsk klæbefjerner, der løsner klæbere fra huden. Den medicinske klæbefjerner indeholder ikke alkohol og svier ikke ved brug. Kan også anvendes i forbindelse med rød og beskadiget hud samt ved sår. Væsken fordamper fra huden, og har ingen indvirkning på klæbeevnen af den nye plade.

Welland Klæbefjerner Serviet

Riv et hjørne af pakningen, fold den sammen og pres væsken ned mellem overkanten af klæberen og huden. Klæberen vil nu langsomt løsne sig. Tag servietten ud af pakningen, og rengør huden for eventuelle klæberester.



Welland Klæbefjerner Spray

Løsner skånsomt klæberen fra huden. Træk let i klæberens overkant og spray mellem plade og hud til pladen har sluppet huden.



VARENØR.	FORM	VÆSKE/ML	STK./ÆSKE	ÆSKE/KARTON
WAD050	Serviet	2,5 ml	50 stk.	60 æsker
WAB050	Spray	50 ml	1 stk.	48 æsker