


LAG 1

Absorberende skumlag for at sikre høj patientkomfort.

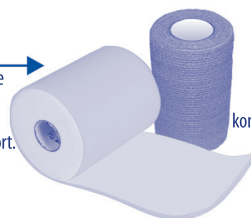

DA

LAG 2

Selvhæftende kompressionsbandage, der kan rives over.

Instrukser

CoFlex TLC - To-lags kompression

Er et to-trins kompressionsystem til behandling af venøse bensår og andre relaterede tilstande. Systemet er udviklet til at yde kontinuerlig og effektiv kompression. Lag 1 er en blød polyurethanskum med en absorberende overside, der føles behageligt mod huden. Absorberer fugt og sårsekret, hvilket reducerer risikoen for hudskader, såsom maceration mm. Lag 2 er en selvhæftende kortstræksbandage, som sørger for Static Stiffnes Index > 10mmHg, hvilket sikrer opretholdelse af et passende, vedholdende arbejdstryk. Bandagerne hæfter på hinanden således at systemet holdes på plads.

Begge ruller er latex-fri.

Generelle forholdsregler:

- CoFlex TLC er ikke en primær sårbandage. Følg venligst sårbehandling i henhold til sårets tilstand, før bandagen lægges på.
- Fjern straks forbindningen, hvis der opstår smerter, følelseløshed, prikken, misfarvning eller hævelser. Kontakt din behandler (læge/sygeplejerske).
- Mål Ankel Arm Index inden pålægningen. Hvis AAI er < 0,8 må CoFlex TLC ikke anvendes.
- Tilpas kompressionen, afhængig af patientens tolerance, ved at justere trækket i Lag 2. For at give patienten mulighed for at vænne sig til bandagen kan det være nødvendigt at lægge bandagen med et mindre træk / tryk ved første pålægning.

Vejledning til pålægning:

Lag 1 - Placer foden i en 90 graders vinkel. Anvendes med den farvede side mod huden.



- (1) Påbegynd en cirkulær viklingen af Lag 1. start ved tæernes grundled, enten fra mediale eller laterale side.
- (2) Fortsæt viklingen op ad foden og bag om hælen, uden dog at dække hele hælsens plantar side.
- (3) Tredje vikling omfatter hele foden en gang til.
- (4) Begynd viklingen op ad benet.
- (5) Fortsæt op til knæet med 50 % overlapning med lige nøjagtig nok træk til at bandagen kan ligge jævnt.
- (6) Klip overskydende materiale af og påsæt tape, for at holde bandagen på plads.

Lag 2

Hold foden i en 90 graders vinkel Læg Lag 2 med 75 – 100 % stræk, baseret på patientens tolerance.



- (1) Begynd pålægningen af Lag 2 med to cirkulære viklinger ved tæernes grundled.
- (2) Fortsæt den cirkulære vikling, hen over toppen af foden/ankelområdet med to eller tre ottetalsfigurer, for at dække hele foden.
- (3) Fortsæt cirkulær viklingen med en overlapning på 50 %.
- (4) Riv overskydende materiale af.
- (5) Tryk de to lag sammen ved forsigtigt at trykke hen over det omviklede område, for at sikre en stærk hæftning bandagerne imellem.



Træk nylonstrømpen hen over bandagen. Strømpen letter patientens bevægelser, gør at bandagen ikke hænger i tøjet eller sengetøjet.

Fjernelse: Fjern med bandagesaks eller ved at vikle bandagen af.

CoFlex TLC XL er egnet til patienter med meget konturerede ben. Begge ruller er ca. 1,5 m (strakt) længere end standard TLC.

CoFlex TLC Lite er egnet til patienter med en ABI på 0,5 eller mere og som har en lavere tolerance for kompression.

Se www.andoverhealthcare.com for en video om pålægning.



Andover Healthcare, Inc.

800-432-6686 - 978-465-0044 www.andoverhealthcare.com

U.S. patent nr. 5.762.623 + 6.156.424 Europæisk patent nr. 0839222 Patent under behandling

FREMSTILLET I USA CoFlex® er t registreret varemærke hos Andover Healthcare, Inc.