



## Gelfiberbandage

- Høj retentionsevne som forhindrer lækage og maceration<sup>1</sup>
- Høj materialestyrke gør det muligt at fjerne produktet i ét stykke<sup>2</sup>
- Absorberer og retinerer ekssudat, blod og bakterier på grund af den høje retentionsevne<sup>1</sup>
- Højabsorberende, også under kompressionsbehandling
- Kan sidde på i op til 7 dage og op til 14 dage på donorsteder

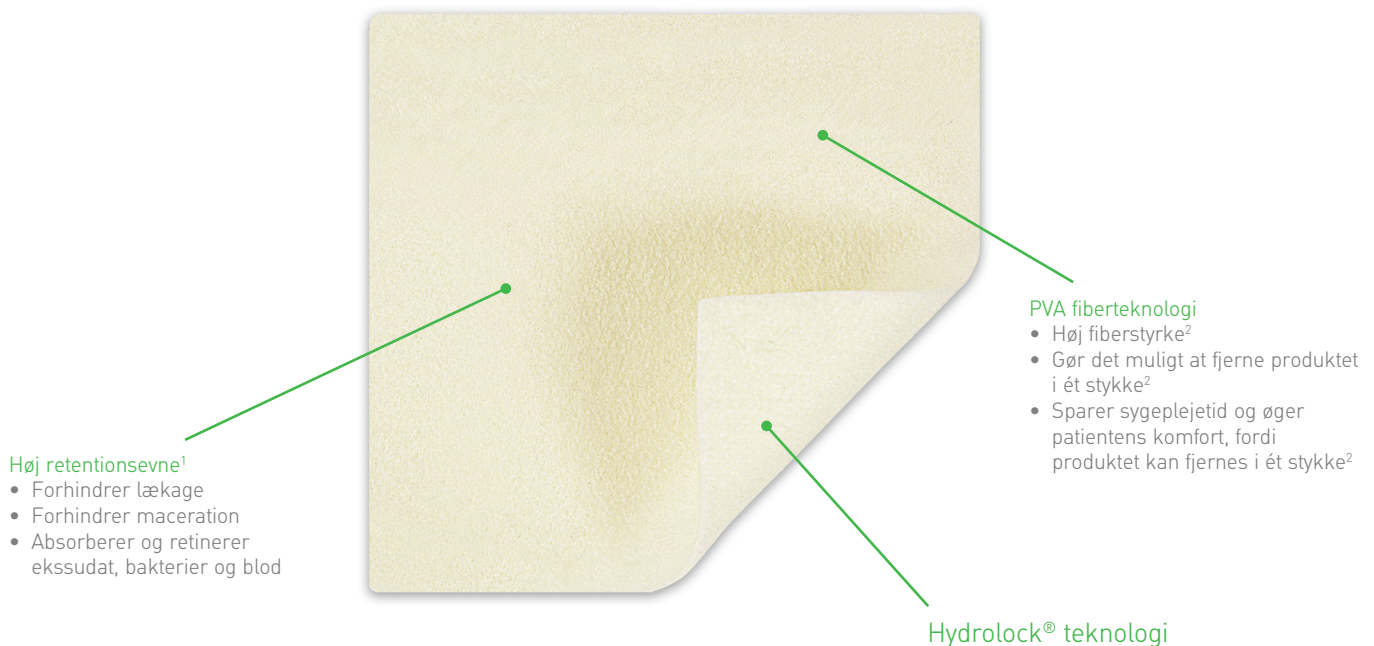


### Hydrolock® teknologi

De stærke polyvinylalkohol (PVA) fibre i Exufiber sammenfiltres i alle retninger og er således mekanisk fastgjort til hinanden, hvilket giver den høje styrke i våd tilstand<sup>2</sup>. De fremragende bindeegenskaber i PVA teknologien kombineret med veldisponeret plads mellem fibrene, minimerer fritflydende væske i produktet og giver derved den høje retentionsevne<sup>1</sup>.

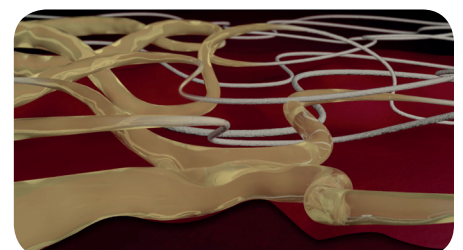

## Sådan anvendes Exufiber®

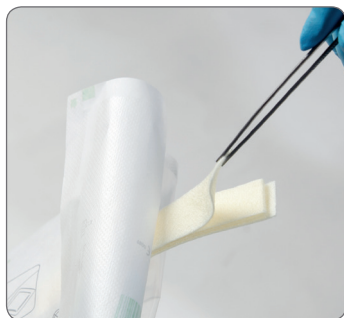


1. Rens såret med en saltvandsopløsning eller vand. Tør den omkringliggende hud grundigt.



2a. Applicér den tørre Exufiber over såret. Vælg en bandage i en passende størrelse, så hele såret dækkes. For at opnå det bedste resultat skal Exufiber overlape den tørre, omkringliggende hud med mindst 1-2 cm for de mindste størrelser og med 5 cm for de største størrelser. Bandagen krymper, i takt med at den absorberer sårveske og begynder at danne en gel.

2b. Applicér den flade bandage eller kavitetsbandagen løst i såret.

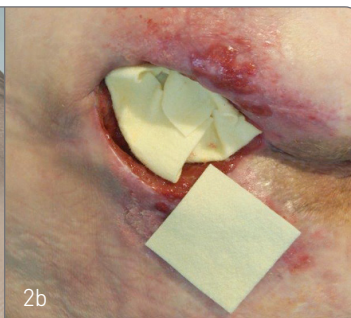

3. Fastgør en passende sekundær bandage. Valg af bandage afhænger af eksudatniveauet. Kompressionsbehandling kan anvendes sammen med Exufiber.

## Sådan virker Exufiber

Exufiber er en steril nonwoven bandage fremstillet af højabsorberende polyvinylalkoholfibre. Når Exufiber kommer i kontakt med såreksudat, danner det en gel, der fremmer fugtig sårheling og gør det nemmere at fjerne bandagen ved bandageskift. Exufiber absorberer og holder på såreksudat. Exufiber fås både som flad bandage og til kavitet.

## Anvendelsesområder

Exufiber kan anvendes på en bred vifte af væskende sår:

- Ben- og fodsår
- Tryksår
- Overfladiske delhudsforbrændinger
- Operationssår
- Donorsteder
- Maligne sår
- Hudskader og traumesår

## Forbehold

Alle sår bør observeres regelmæssigt. I tilfælde af tegn på klinisk infektion bør patienten konsultere en læge og få en passende infektionsbehandling. Exufiber er ikke beregnet til tørre sår og tredjegradsforbrændinger.

Hvis bandagen tørrer ud og er svær at fjerne, bør den fugtiggøres i henhold til lokale retningslinjer (f.eks. med en steril saltvandsopløsning eller sterilt vand) og få lov til at ligge i blød, indtil den er let at fjerne. Der kan gå flere minutter, inden Exufiber danner en gel. Fjern bandagen ved forsigtigt at rense/skylle den.



## Exufiber sortiment (Pakket sterilt)

Varenr.	Str. cm	Stk./inderkrt.	Stk./trp. crt.
603300	5 × 5	10	40
603301	10 × 10	10	60
603302	15 × 15	10	60
603305	4,5 × 10	10	40
603306	4,5 × 20	10	50
603307	4,5 × 30	10	60
603303	20 × 30	5	20
603308	2 × 45	5	20

Referencer: 1. Data-on-file report 20140806-001 Mölnlycke Health Care. 2. Chadwick P, McCardle J. Exudate Management Using a Gelling Fibre Dressing. The Diabetic Foot Journal 2015; 18(1)

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark.  
Mölnlycke Health Care navn og logo samt Exufiber® er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB.  
© 2015 Mölnlycke Health Care AB.

