


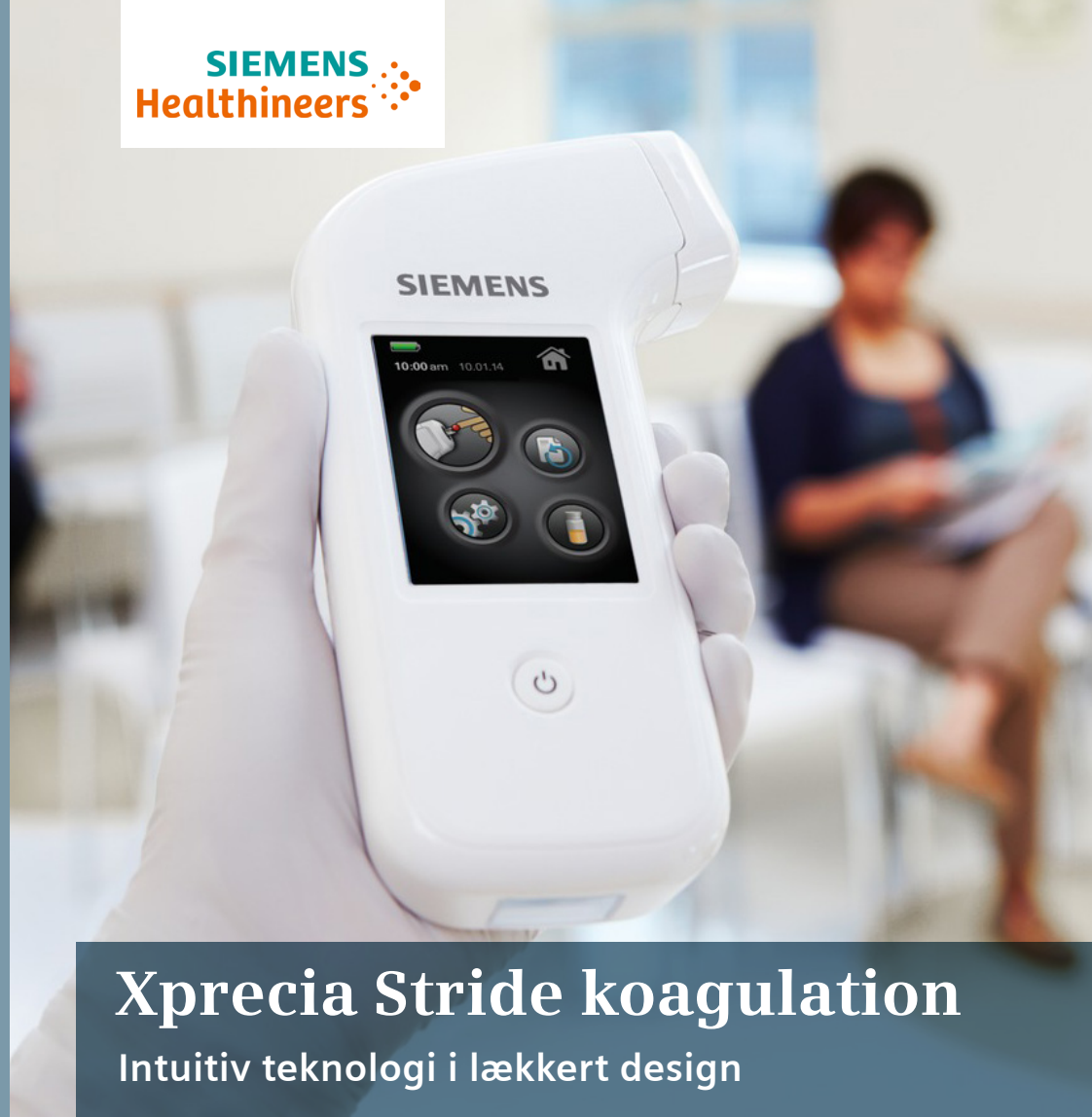

## Xprecia Stride koagulation

Intuitiv teknologi i lækkert design

[www.siemens.com/xprecia](http://www.siemens.com/xprecia)

### Global Siemens Healthcare Headquarters

Siemens Healthcare GmbH  
Henkestrasse 127  
91052 Erlangen  
Telephone: +49 9131 84-0  
Germany

[www.healthcare.siemens.com](http://www.healthcare.siemens.com)

### Lokal kontaktinformation

Siemens Healthcare A/S  
Borupvang 9  
2750 Ballerup  
Danmark  
Telefon: 4477 4477  
[www.healthcare.siemens.dk](http://www.healthcare.siemens.dk)

Telefon POC helpdesk: 4477 4814

Siemens Healthineers tilbyder en bred portefølje af diagnostiske løsninger til effektiv analysering indenfor in vitro-diagnostik. Vore produkter og service kombinerer videnskab, teknologi og praktisk anvendelighed, samt giver læger de vigtige oplysninger, de har

behov for, at give patienter en bedre behandling overalt i verden.

Alle associerede mærker er mærkevare registreret af Siemens Healthcare A/S. Alle andre varemærker tilhører det firma, som har registreret varemærket som sit eget.

# Brugervenlig måling af INR

Med Xprecia Stride koagulationsapparat fås hurtige INR-resultater til monitorering af patienter i antikoagulationsbehandling.

Det håndholdte apparat er målrettet det sundhedsfaglige personale og har fokus på høj kvalitet og brugervenlighed.

Xprecia Stride er ergonomisk designet med en stor intuitiv touchskærm. Før analysering scannes en teststrip med den indbyggede barkodescanner. Patient- og operatørdata kan, såfremt det ønskes, registreres enten via barkodescanner eller touchskærm.

Der tilføres en dråbe kapillærblod til teststrippen, og efter endt analysering kasséres den anvendte teststrip let og uden berøring via eject-knappen.

To elektroniske kvalitetskontroller tjekker teststrippen før alle målinger. Dette gøres for at sikre at prøve- og reagensvolumen er korrekt, samt om den har været udsat for fugt, eller tidligere har været anvendt. Hvis én af disse to kvalitetskontroller fejler, viser apparatet fejl frem for et ukorrekt resultat.

Disse features giver tilsammen en unik brugeroplevelse, enkel arbejdsgang og minimal risiko for fejl.

## Få trin til resultat



1: Scan teststrip




2: Isæt teststrip



3: Påfør prøvemateriale



4: Kassér teststrip

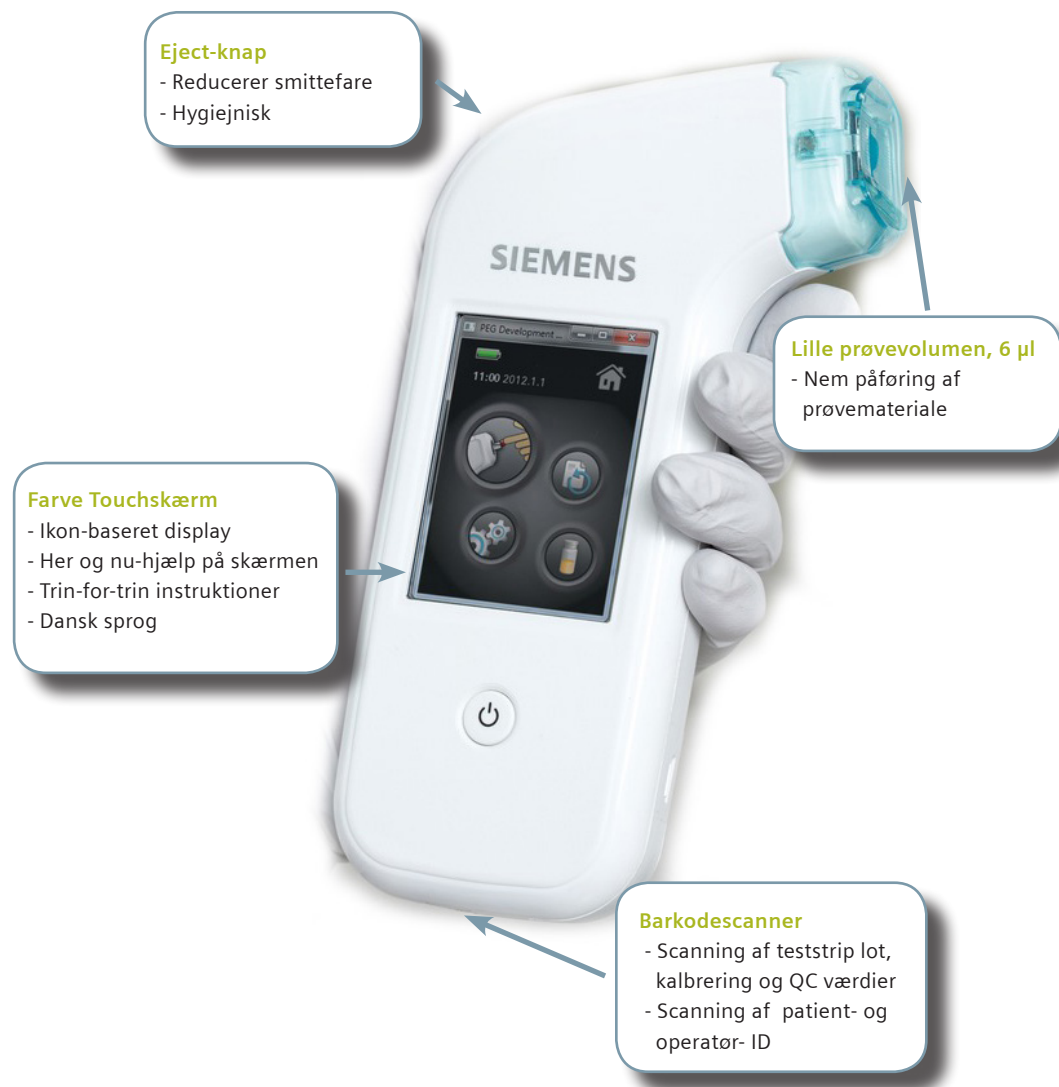

### Eject-knap

- Reducerer smittefare
- Hygiejnisk

### Farve Touchskærm

- Ikon-baseret display
- Her og nu-hjælp på skærmen
- Trin-for-trin instruktioner
- Dansk sprog

### Lille prøvevolumen, 6 µl

- Nem påføring af prøvemateriale

### Barkodescanner

- Scanning af teststrip lot, kalibrering og QC værdier
- Scanning af patient- og operator- ID

Prøvemateriale: 6µL kapillærblod  
Kalibrering: Automatisk  
Måleområde: 0,8 – 8,0 INR  
Genkaldelse af resultater



Præmieret for ergonomisk design i høj kvalitet.