

Mini-Plasco®

Nålefri og nem håndtering



Frigør en ampul fra de øvrige ved et enkelt vrid. De øvrige ampuller forbliver samlet.



Ampullen åbnes nemt ved at vride hættten rundt.



Indfør sprøjten i ampullen ved at støtte med hånden som vist på billedet. Derved sikres aseptisk teknik og sterilitet. Der er ikke behov for at bruge en nål.



Sprøjten holdes næsten vandret. Derved kan tilbagetrækning af opløsningen ske på en gang. Tilbagetrækning af opløsningen skal foretages langsomt for at reducere risiko for luftindtag.