

# Soft-Fix

## Klebefreie Multi-Fixierung

Soft-Fix ist eine klebefreie, multifunktionale Fixierung, die für Patienten jeden Alters geeignet ist.

Sie dient der Sicherung von Infusionsschläuchen, Sonden, Drainagen, Kathetern, Kabeln der elektronischen Überwachung sowie von Schlauchsystemen lebenserhaltender technischer Geräte. Des Weiteren findet Soft-Fix als Fixierung von Wundauflagen und als Dekubitus-Prophylaxe ihren Einsatz.



Soft-Fix ist als Rollenware in drei unterschiedlichen Breiten erhältlich:

	Breite	Länge	REF
Soft-Fix klein	2 cm	5 m	30 - 01
Soft-Fix normal	4 cm	5 m	30 - 02
Soft-Fix groß	6 cm	5 m	30 - 03
Soft-Fix Klett	2 cm	15 m	30 - 04
Soft-Fix Mix	5 x klein, 2 x normal, 1 x groß, 1 x Klett		30 - 05





- > schnelle, einfache und sichere Handhabung
- > hautfreundlich – klebefrei, weich und wiederverschließbar
- > latex- und klebstofffrei – hypoallergen
- > Dekubitusschutz
- > geringe Materialdichte (weniger als 30% liegen auf der Haut)
- > Reduzierung von Zugbelastung und Druckstellen
- > leicht absorbierend – kein Funktionsverlust, Nachfixierung jederzeit möglich
- > ökonomisch – individuell nach Bedarf und der benötigten Größe abzuschneiden

Die weiße Schaumstoffseite zeigt zum Patienten oder zum Gegenstand, damit der spezielle Kralleffekt gewährleistet ist!

Platzieren Sie Soft-Fix je nach Anwendung am Patienten oder dem zu fixierenden Gegenstand und verbinden Sie die Enden mittels Klettstreifen miteinander. Schneiden Sie das Fixierband ggf. vorher ein und bilden Sie eine Schlaufe.

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## Soft-Fix

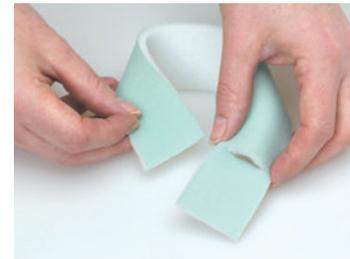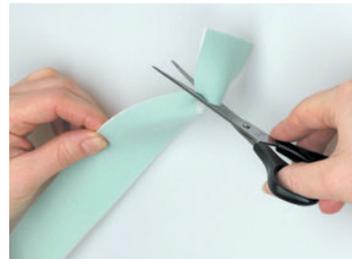

1 | Schneiden Sie das Fixierband und den Klett entsprechend der benötigten Länge von der Rolle ab.

2 | Schneiden Sie den Fixierstreifen ein paar Zentimeter vor dem Ende ein.

3 | Das Band reißt an der Schnittstelle nicht ein.

4 | Ziehen Sie das Bandende durch den Schlitz, um somit eine Schlaufe zu bilden. Die weiße Schaumstoffseite zeigt nach innen, damit der spezielle Kralleffekt gewährleistet ist!



5 | Legen Sie den Schlauch in die Schlaufe und ziehen Sie diese zu. Durch das Festziehen ist der Schlauch sicher fixiert.

6 | Platzieren Sie das Band am Patienten und schließen Sie es mit dem Klettstreifen.

## ANWENDUNGSBEISPIELE

# Soft-Fix

ITSNOVO®



Sicherung von Braunülen, Kathetern und arteriellen Blutdruckmessgeräten




Sicherung und Abpolsterung von Zu- und Abgängen



Sicherung von Ventrikeldrainagen



Sicherung von venösen Drainagen und Braunülen bei Pergament-/ Kortisonhaut

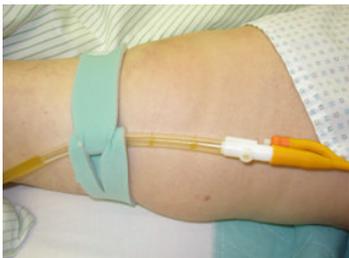

Sicherung von Blasenkathetern oder auch im Bereich der Dialyse einsetzbar



Sicherung und Führung von zu- und ableitenden Schläuchen, z.B. am Bett

# ANWENDUNGSBEISPIELE

## Soft-Fix



Sicherung von zu- und ab-  
leitenden Schlauchsystemen  
sowie von Sättigungs-  
sonden bei Frühgeborenen und Babys



Sicherung und Abpolsterung  
von Schläuchen und Kanülen,  
z.B. Femoraliskathetern oder  
arteriellen Zugängen mittels  
Soft-Fix Schlaufe



Zur Unterstützung der Beat-  
mung mit CPAP-  
Masken – z.B. zum  
Schließen des  
Mundes mit Soft-Fixklein



Hautfreundliche und schnelle  
Fixierung von Sättigungs-  
sonden



Sicherung und Abpolsterung  
von Schlauchsystemen



Fixierung von Pulsoximeter-  
sensoren in der ambulanten  
Kinderkrankenpflege