



Hvad er vigtigt at vide om iltbriller?

Ved flowrate > 4L/min anbefales fugtning af luften

Anvend ikke Vaseline eller andre petroleumbaserede produkter (læbepomade)
– anbefal vandbaseret



Flowrate Guide

Liter / min	FiO2
1	24%
2	28%
3	31%
4	35%
5	40%
6	44%

Hvad er vigtigt at vide om iltmasker?

Iltmasken anvendes, når der er behov for > 5 liter ilt / minut.


Et flow under 5 liter / minut giver risiko for CO2 ophobning p.g.a. genindånding



Flowrate Guide

Liter / min	FiO2
5-6	40%
6-7	50%
7-8	60%

Højkoncentration med reservoir

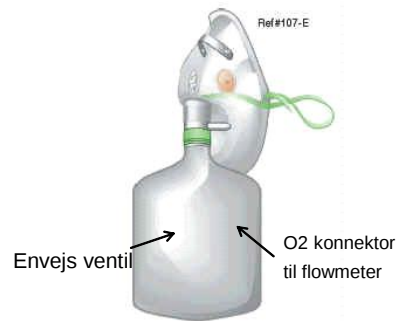

Flowrate Guide

Liter / min	FiO2
8	80%
9	>80%
10	>80%

Iltkoncentrationen er 80-100% afhængig af patientens respirationsfrekvens og tidalvolumen.

Hvis envejsventilerne på siden af masken fjernes, vil iltkoncentrationen falde, eftersom ilten blandes med atmosfærisk luft.

Reservoirposen skal altid være helt fuld

Aerosolbehandling



Flowrate Guide

Liter / min	Partikelstørrelse
6	3,3 my
8	1,8 my
10	1,3 my

Trakeobronkial	2,5 my
Alveolær	0,5–2 my

Optimalt iltflow 6-8 L/min.
Inhalationstid ca. 10 min.