

BD Venflon™ Pro Safety IV-kateter med sikkerhedsmekanisme og BD Instaflash™ nåle teknologi

Brugsvejledning - Forberedelse



- Overhold aseptisk teknik under hele proceduren.



- Desinficér indstiksstedet som beskrevet i lokale retningslinier.



- Fjern kateteret fra pakningen og fold vingerne ned.

Anlæggelse



- Anvend dit foretrukne greb og fjern beskyttelseshætten.
- Stabiliser og penetrer venen med en lav vinkel på 10-40 grader.
- Første blodsignal ses øjeblikkeligt i spidsen af kateteret, via det udstandsede vindue i nålen.



- Sænk vinklen og fremfør hele kateteret og nålen et par mm, for at sikre at selve kateterspidsen er korrekt placeret i venen. Andet blodsignal i flashkammeret bekræfter korrekt placering af kateteret i venen. Stabilisér eventuelt kateteret ved at holde på den ene vinge. Træk kanylen to til tre millimeter tilbage.



- Fremfør kateteret helt ind i venen. Fjern staseslangen.

Fjernelse af kanyle



- Okkluder venen lige over kateterspidsen, fjern kanylen mens du holder ved kateter eller gribepladen.



- Hold IKKE på den hvide sikkerhedsanordning.



- Deponér kanylen direkte i en kanylespand.



- Tilslut forlængerslange med desinficerbar membran eller et IV-administrationssæt. Anlæg steril forbindelse i henhold til retningslinierne.
- Gennemskyl kateteret for at sikre, at det er korrekt placeret i venen.



BD A/S • Firskevej 25 B • 2800 Lyngby • bddenmark@bd.com • Tlf: +45 43 434566 • bd.com/dk

bd.com

© 2018 BD. BD, the BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company. 0000CF03710 Issue 1. January 2018. BD 0000CF03710