

BD PosiFlush™ (NaCl 0,9%)



ZERO
REFLUX*



Helping all people
live healthy lives

Den forbedrede forfyldte sprøjte med unikt design
for optimal og sikker gennemskylning af IV katetre.

Designet til at eliminere sprøjte-induceret tilbageløb*


Hvad er sprøjte-induceret tilbageløb af blod, og hvordan undgår man det?

Sprøjte-induceret tilbageløb af blod opstår under flush proceduren, når gummitemplet møder bunden af sprøjten.

Da det er gummi, vil det blive komprimeret og udvide sig igen, når trykket slippes, hvilket skaber et vacuum, som trækker blod tilbage i kateteret.¹

For at undgå sprøjte-induceret tilbageløb af blod, anvend da en BD PosiFlush™ forfyldt sprøjte, som er designet til at undgå dette problem.²

BD PosiFlush™ sprøjter er designet til at eliminere sprøjte-induceret tilbageløb af blod*, hvilket sikrer bedre opretholdelse af kateterfunktionen.³

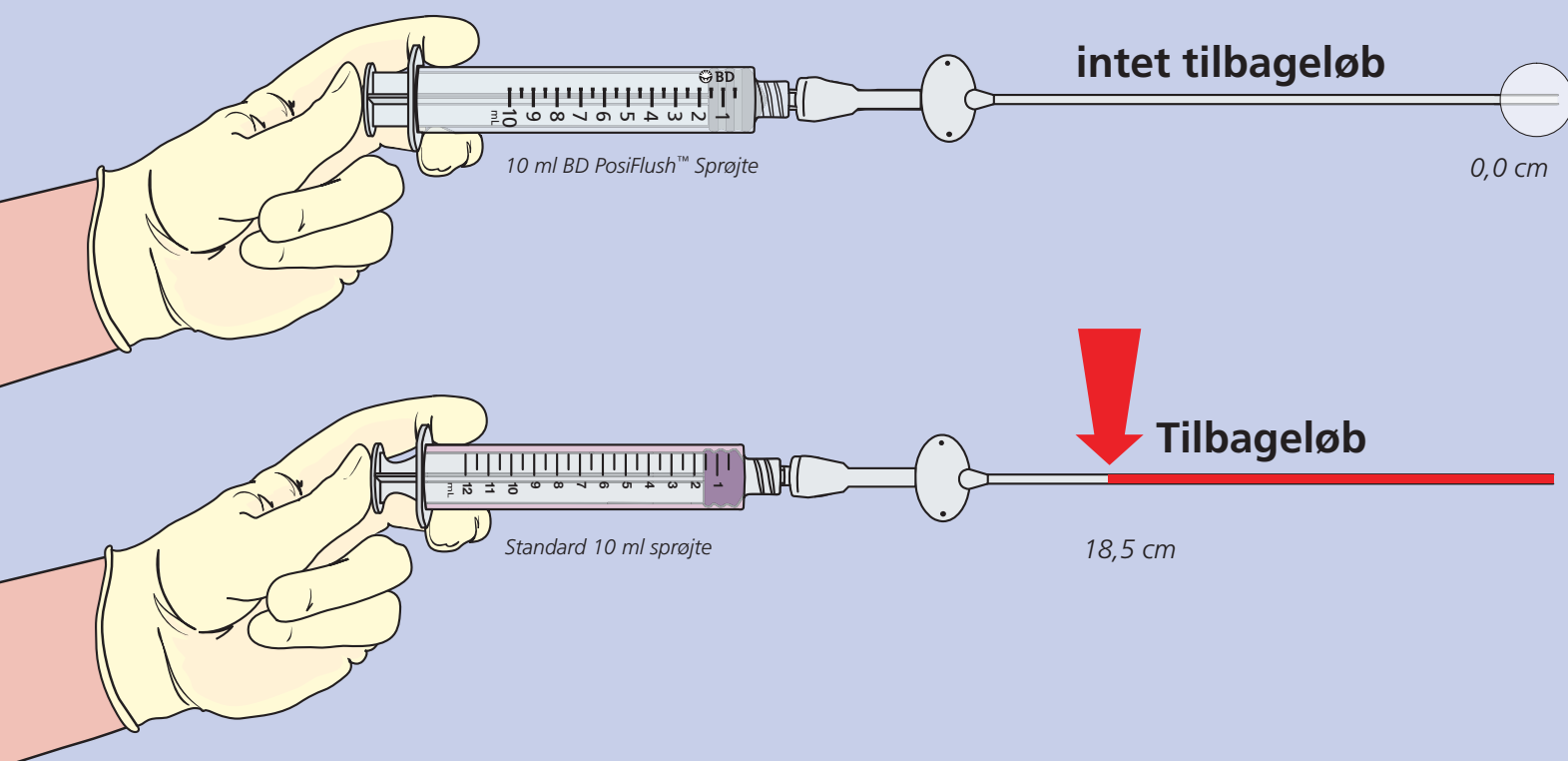


*Gennemsnitlig tilbageløb målt i 4Fr PICC; BD's datafiler

Designet til at minimere risiko for beskadigelse af IV-kateter


Konsekvent 10 ml diameter design for at minimere risiko for IV-kateterskade

Sprøjtestørrelsen har betydning for risikoen for skade på IV-kateteret. Sprøjter med mindre diameter skaber større tryk end sprøjter med større diameter.⁴

Vælg hvilken som helst størrelse BD PosiFlush™ sprøjte for at opnå et lavere tryk, på grund af 10 ml diameteren (sammenlignet med en almindelig sprøjte). Alle BD PosiFlush™ sprøjter sikrer overholdelse af PICC-line producenternes anbefalinger om at skylle med en 10 ml sprøjte.

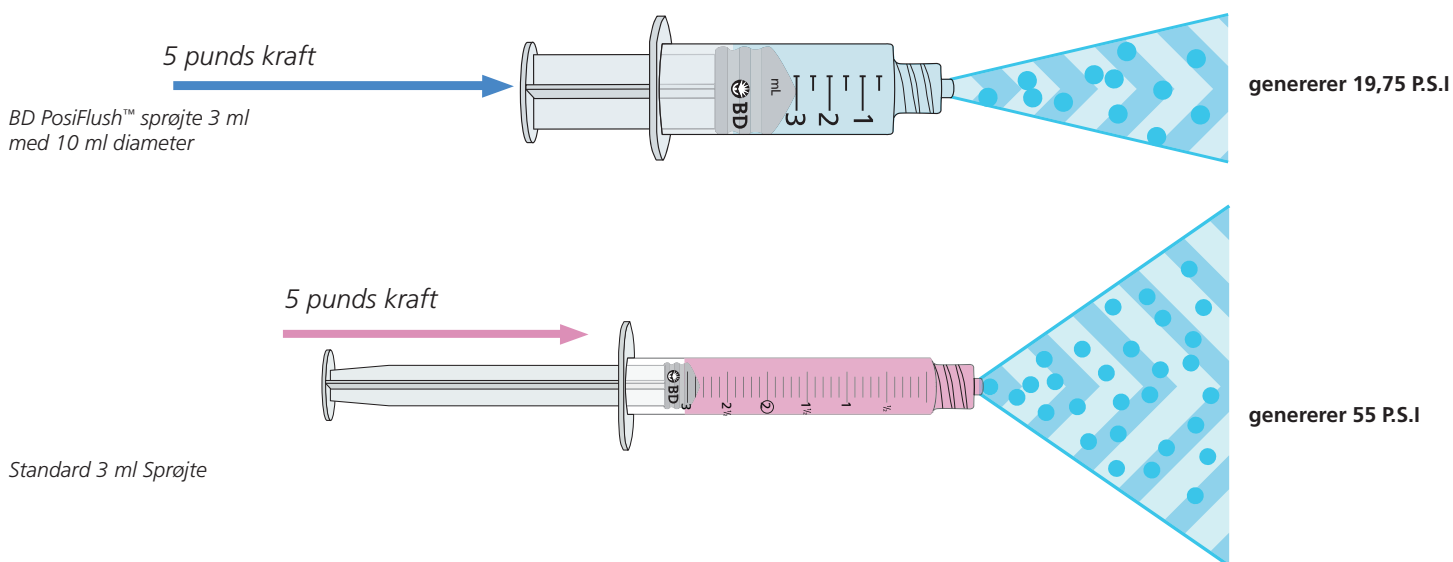

BD PosiFlush™ sprøjter kan leveres i 3 størrelser, alle med standard 10 ml sprøjte diameter

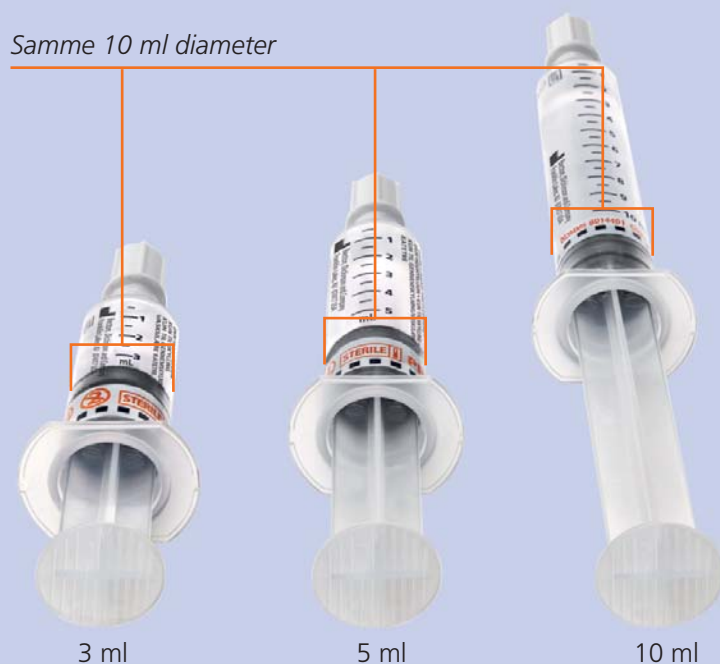


Designet til at understøtte Bedste Kliniske Praksis

Skyl med den mindste anbefalede volumen

Infusion Nurses Society (INS) anbefaler, at den mindste volumen, der skylles igennem med til sidst, er 2 x det anførte deadspace / priming volumen af kateteret og påsat udstyr.⁵

I langt de fleste tilfælde vil selv en 3 ml BD PosiFlush™ sprøjte være tilstrækkelig til at gennemskylle et perifert kateter.

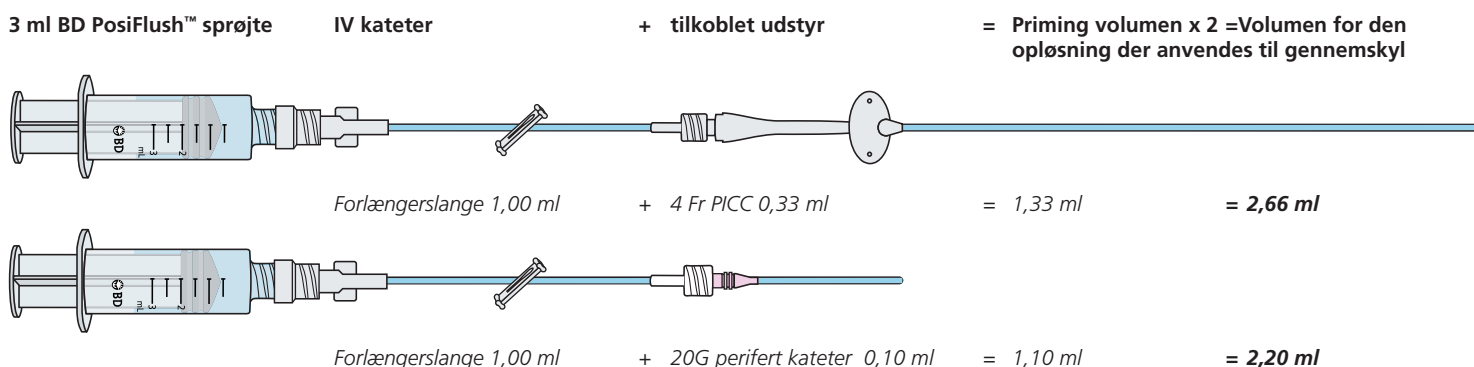


Anvend den korrekte volumen til gennemskyl for at tilgodese behovet hos patienter med NaCl restriktion

Det unikke design af BD PosiFlush™ sprøjten gør, at klinikere kan give den korrekte volumen i en sprøjte med diameter som en 10 ml sprøjte og kun et minimum af NaCl.

Der er 9 mg salt i hver ml af isotonisk NaCl



Salt påvirkning under flush proceduren

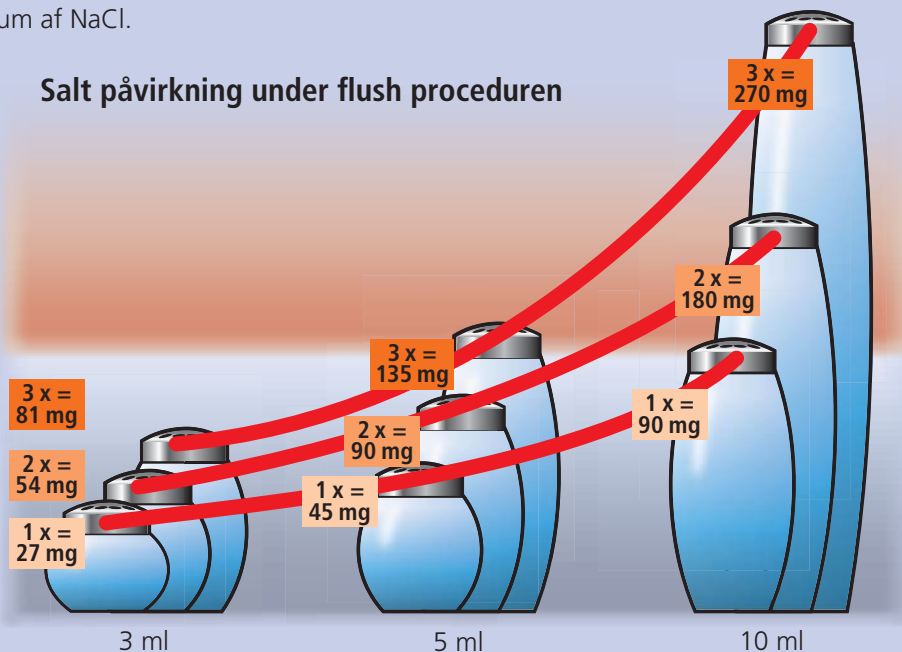

Designet til at opfylde dine behov

Forbedrer patientens behandlingsresultat

- Designet til at forhindre, at opløsningen kommer i berøring med den usterile del af sprøjten.

Reducerer risiko for administrationsfejl

- Tydelig opmærkning.
- Lettere at aflæse sprøjteindholdet.
- Fed skrift for at gøre det tydeligere.
- Farvekode for let identifikation.

Reducerer risiko for IV-kateter-skade

- Genererer significant lavere tryk (PSI) sammenlignet med en standard 3 ml sprøjte.
- Alle størrelser er i overensstemmelse med PICC og CVK flush rekommandationer.

Steril

- BD PosiFlush™ sprøjter er steriliseret under fremstillingen (SAL 10^{-6}), hvilket garanterer, at opløsningen er steril.
- 3 års holdbarhed giver optimal tilgængelighed.
- Med brug af BD PosiFlush™ kan anvendelse af usterile, selvfremstillede flush opløsninger undgås.


Giver tidsbesparelse og effektivitet

- BD PosiFlush™ sprøjter er et medicinsk udstyr – klar til brug.
- Det eliminerer behovet for hætteglas og ampuller og reducerer antal trin og tid ved forberedelsesprocessen.

Reducerer affald og omkostning

- Sprøjteformatet kan reducere affaldsvolumen sammenholdt med en standard sprøjte.
- Vælg mindre sprøjte størrelser (3 ml og 5 ml) til perifere IV katetre.
- Minimerer miljøaffald.

Hvis du kan svare JA til et af følgende 3 spørgsmål, anvend da **BD PosiFlush™ XS!**
Anvender du sterile handsker under proceduren?
Arbejder du i et sterilt felt?
Er patienten meget immunsupprimeret?

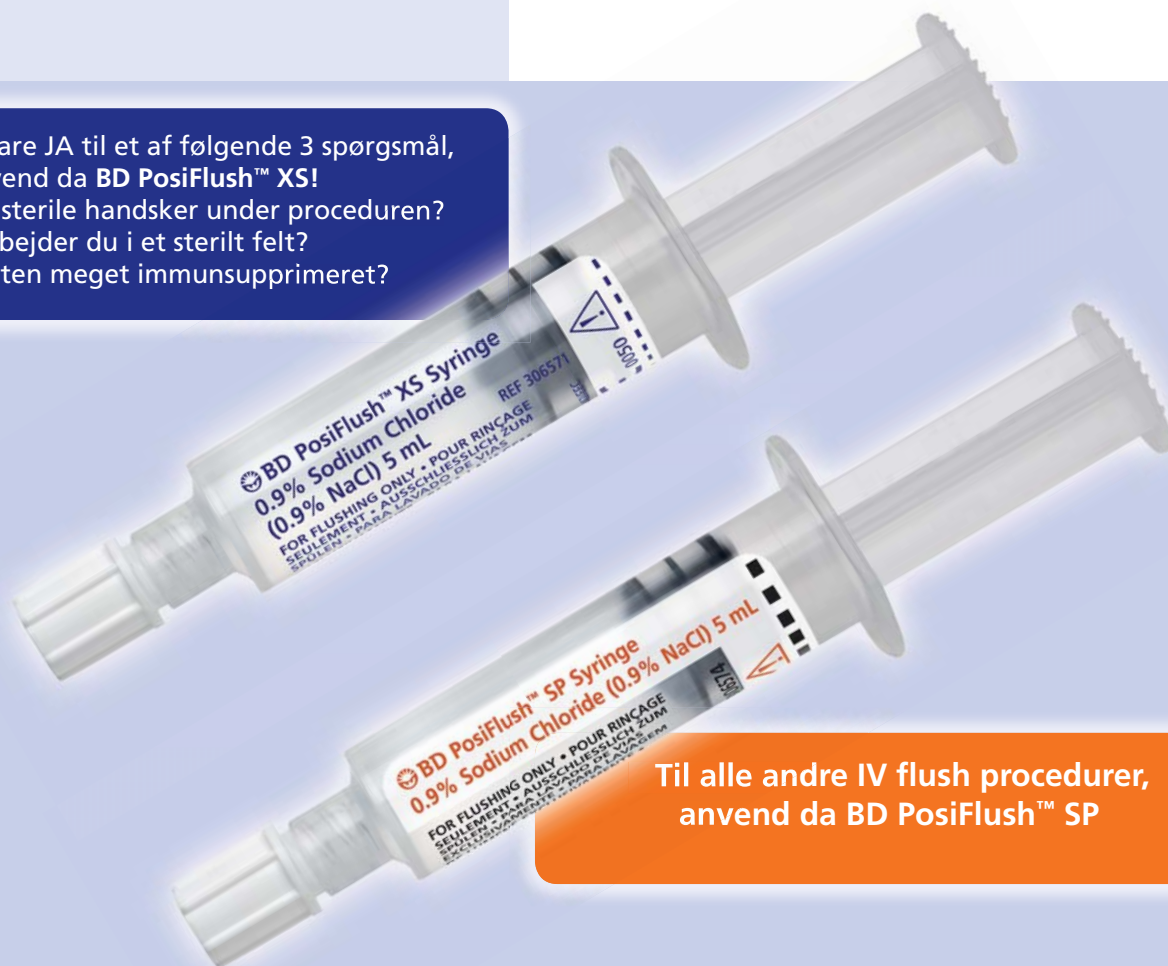

Til alle andre IV flush procedurer, anvend da **BD PosiFlush™ SP**

Designet til at bruge det rette produkt til den rette anvendelse

BD PosiFlush™ SP sprøjte

Varenummer Varetekst

- | | | |
|--------|------------------|--|
| 306573 | BD PosiFlush™ SP | Forfyldt saltvandssprøjte 3 ml NaCl 0,9%
30 stk per æske/480 stk per karton. |
| 306574 | BD PosiFlush™ SP | Forfyldt saltvandssprøjte 5 ml NaCl 0,9%
30 stk per æske/480 stk per karton. |
| 306575 | BD PosiFlush™ SP | Forfyldt saltvandssprøjte 10 ml NaCl 0,9%
30 stk per æske/480 stk per karton. |



BD PosiFlush™ XS sprøjte

Varenummer Varetekst

- | | | |
|--------|------------------|--|
| 306570 | BD PosiFlush™ XS | Forfyldt saltvandssprøjte 3 ml NaCl 0,9%
30 stk per æske/240 stk per karton. |
| 306571 | BD PosiFlush™ XS | Forfyldt saltvandssprøjte 5 ml NaCl 0,9%
30 stk per æske/240 stk per karton. |
| 306572 | BD PosiFlush™ XS | Forfyldt saltvandssprøjte 10 ml NaCl 0,9%
30 stk per æske/240 stk per karton. |



BD PosiFlush™ er et CE mærket medicinsk udstyr i overensstemmelse med kravene i det Europæiske direktiv 93/42/EEC.

Alle BD PosiFlush™ forfyldte sprøjter er latexfri.

Alle BD PosiFlush™ forfyldte sprøjter er fremstillet i overensstemmelse med god fremstillingspraksis og kvalitetskrav.

Yderlig information kan findes på www.bd.com eller send en e-mail til BDPosiFlush@europe.bd.com

1,2 Hadaway L. Heparin Locking for Central Venous Catheters.
Journal of the Association for Vascular Access, 2006;4(II): 224-231
3,4 Hadaway L. Technology of Flushing Vascular Access Devices.
Journal of Infusion Nursing, 2006;29(3): 139-140
5 Infusion Nurses Society Infusion Nursing Standards of Practice.
Journal of Infusion Nursing, 2006;29(15): 56



BD
Park Allé 290
2605 Brøndby
Tel: +45 43434566
www.bd.com