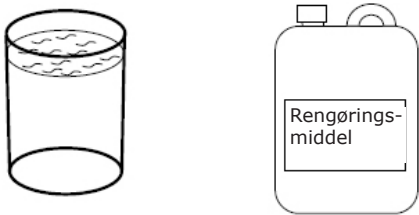
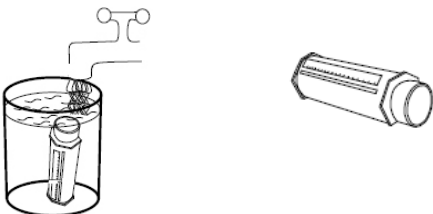


Rengøringsvejledning

MiniWright Peakflowmeter

Anvendt mundstykke	Engangsmundstykke med envejsventil*	Engangsmundstykke, pap*	Steriliserbart plastikmundstykke
Peakflowmeter rengøres	Ugentligt	Mellem patienter	Mellem patienter

1.		Inspicer enheden for tegn på beskadigelse eller slidtage. Hvis dette forekommer, udskift peakflowmeteret.
2.		Lav en opløsning med rengøringsmiddel i h.t. midlets instruktioner i en beholder, der er stor nok til at rumme hele peakflowmeteret.
3.		Ryst peakflowmeteret mens det er under vand for at undgå, at der er luftbobler i det. Brug ikke mekaniske hjælpemidler som børster eller klude.
4.		Skyl efter i h.t. rengøringsmidlets instruktioner og lad tørre.
5.		Forbered en mængde af det valgte desinfektionsmiddel i en passende beholder.
6.		Nedsæk peakflowmeteret i desinfektionsmidlet. Ryst igen peakflowmeteret, mens det er under vand for at undgå luftbobler. Efterlad peakflowmeteret i desinfektionsvæsken i det anbefalede tidsrum.
7.		Skyl efter som anbefalet. Ryst forsigtigt for at fjerne overskydende vand og lad peakflowmeteret tørre naturligt. Anvend ikke varm luft eller tørreskab.

Ovenstående instruktioner er alene vejledende. Den ansvarlige bruger skal altid tage højde for de aktuelle omstændigheder og den enkelte patients risiko for smitte.

(*) = Kun til engangsbrug. Må ikke genanvendes.

Simonsen & Weel®

Tel. 7025 5610 · Fax 7025 5620
sw@sw.dk · www.sw.dk