

BD Vacutainer® Serum-rør



Anvendelsesområde: BD Vacutainer® serum-rør anvendes generelt til serumbestemmelser indenfor klinisk kemi og serologi. BD Vacutainer® serum-rør findes også med lyserød prop og Crossmatch-etiket til transfusionspatienter.

Tilsætning: BD Vacutainer® plastik serum-rør er påsprøjtet silica på rørets indervægge for at fremskynde størkningsprocessen. I BD Vacutainer® glas serum-rør aktiverer rørets kornede overflade størkningsprocessen naturligt, og disse rør er derfor ikke sprøjtet med silica. BD Vacutainer™ serum-rør findes også med additivet trombin, som markant fremskynder størkningen. En orange prop markerer BD Vacutainer® trombin-glas.

Blanding: Serum-rør blandes forsigtigt 5-6 gange
Centrifugering: v. 1300g i 10 minutter ved stuetemperatur (~22°C)

Andet: Rørene findes i mange forskellige størrelser i både plastik og glas og er markeret med en rød prop.

Minimum anbefalet størkningsvarighed for serum-rør til patienter uden antikoagulan:

BD Vacutainer® serum-rør (rødt) - 60 minutter

BD Vacutainer® trombin-rør (orange) - 5 minutter

BD produkt nr.	Tilsætning	Vol. (ml)	Farve	Størrelse (mm)	Etikettype	Æske/karton mængde
BD Vacutainer® plastik serum-rør med rød BD Hemogard™ lukning						
368492	Silika (størkn.akt.)	2		13 x 75	Papir	100/1000
368271	Silika (størkn.akt.)	2		13 x 75	Transparent	100/1000
369032	Silika (størkn.akt.)	4		13 x 75	Papir	100/1000
365904	Silika (størkn.akt.)	4		13 x 75	Transparent	100/1000
368815	Silika (størkn.akt.)	6		13 x 100(7)	Papir	100/1000
367819	Silika (størkn.akt.)	6		13 x 100(7)	Transparent	100/1000
367896	Silika (størkn.akt.)	10		16 x 100(7)	Papir	100/1000
BD Vacutainer® glas serum-rør med rød BD Hemogard™ lukning						
367614	Ingen (silikonebehandlet)	5		13 x 75(5)	Papir	100/1000
367624	Ingen	5		13 x 75(5)	Papir	100/1000
BD Vacutainer® trombin-rør med orange BD Hemogard™ lukning						
367817	Thrombin	5		13 x 75(5)	Papir	100/1000
367811	Thrombin	6		13 x 100(7)	Papir	100/1000

BD Vacutainer® EST-rør i plast med transparent Hemogard™ lukning

362725	Uden tilsætning	4		13 x 75(5)	Transparent	100/1000
--------	-----------------	---	--	------------	-------------	----------



Kontakt os venligst, hvis De ønsker
kopier af BDs kliniske studier - VS7266

2012

Becton Dickinson A/S • Tlf: 43 43 45 66
bddenmark@europe.bd.com • www.bd.com