

BD Vacutainer® Serumseparations-rør (SST™ II Advance)



Anvendelsesområde: BD Vacutainer® serum-rør anvendes generelt til kemiske serumbestemmelser. Rørene findes i mange forskellige størrelser i både glas BD SST™, og plastik, BD SST™ II Advance, og er markeret med en guldfarvet prop. Forbedret analyt stabilitet, mange terapeutiske lægemidler er stabile (over 90% genvinding) ved følgende parametre; 4 timer ved 25°C, 24 timer ved 4°C og 7 dage ved 4°C.

Tilsætning: BD SST™ og BD SST™ II Advance rør indeholder silica til at fremskynde størkning af prøven samt en gel, som danner en barriere mellem blodkoaglet og serummet efter centrifugering. BD SST™ II Advance rør indeholder en NY forbedret gel, som er udviklet af BD for at imødekomme laboratoriernes skiftende behov. BD SST™ II Advance rør er kompatible med mange almindeligt anvendte terapeutiske lægemidler, og er derfor egnet til monitorering af mange terapeutiske lægemidler.

BD SST™ II Advance gel kombinerer følgende fordele for øget laboratorieeffektivitet: Gelbarrierens integritet bibeholdes, hvilket overflødiggør specialglas til geltransport. Der er også reduceret forekomst af gelperledannelse og spredning.

Blanding: Serumseparations-rør vendes op og ned 180° 5-6 gange

Centrifugering: Plastik BD SST™ II Advance rør - 1300-2000g i 10 minutter ved stuetemperatur (~22°C)

Andet: Minimum anbefalet størkningstid for BD SST™ og BD SST™ II Advance rør til patienter uden antikoagulans er 30 minutter.

BD art nr	Tilsætning	Vol. (ml)	Farve	Størrelse (mm)	Etikettype	Æske/karton mængde
BD Vacutainer® SST™ II Advance serum-rør af plastik med guldfarvet BD Hemogard™ lukning						
366882	Koag.akt. / Gel	2,5		13 x 75	Papir	100/1000
367957	Koag.akt. / Gel	3.5		13 x 75	Papir	100/1000
368498	Koag.akt. / Gel	3.5		13 x 75	Transparent	100/1000
368879	Koag.akt. / Gel	4		13 x 100	Transparent	100/1000
367955	Koag.akt. / Gel	5		13 x 100	Papir	100/1000
366566	Koag.akt. / Gel	5		13 x 100	Transparent	100/1000
366444	Koag.akt. / Gel	6		16 x 100	Papir	100/1000
367953	Koag.akt. / Gel	8.5		16 x 100	Papir	100/1000
366644	Koag.akt. / Gel	8.5		16 x 100	Transparent	100/1000

Kontakt os venligst, hvis De ønsker kopier af BDs kliniske studier

