

BD Vacutainer® Plasmaseparations-rør (PST™ II)



Anvendelsesområde: BD Vacutainer® plasmaseparations-rør anvendes generelt til kemiske plasmabestemmelser.

Tilsætning: BD PST™ II indeholder 17 IU litiumheparin per ml blod til at forhindre koagulering af prøven, samt en gel, som danner en barriere mellem blodfraktion (celler) og plasma efter centrifugering. BD PST™ II rør indeholder en NY forbedret gel, som er udviklet af BD for at imødekomme laboratoriernes skiftende behov.

Blanding: Plasmaseparations-rør vendes op og ned 180° 8-10 gange.

Centrifugering: BD PST™ II rør af plastik - 1300-2000g i 10 minutter ved stuetemperatur (~22°C).

Andet: Rørene findes i mange forskellige størrelser i plastik, BD PST™ II, og er markeret med en lysegrøn prop.

BD PST™ II gel kombinerer følgende fordele for øget laboratorieeffektivitet:

- Forbedret plasmarenhed påvist ved en reduktion i fibrin samt i målbare leucocytter, erythrocytter og trombocytter.
- Forbedret analysestabilitet, idet de fleste komponenter er stabile i røret i 24 timer ved 25°C.
- Anbefales til de oftest testede analyser, idet den er klinisk ækvivalent med BD PST™ røret.

BD art nr	Tilsætning	Vol. (ml)	Farve	Størrelse (mm)	Etikettype	Æske/karton mængde
Vacutainer® PST™ II rør af plastik med lysegrøn Hemogard™ lukning						
367374	Li-Heparin/Gel	3		13 x 75	Papir	100/1000
368497	Li-Heparin/Gel	3		13 x 75	Transparent	100/1000
367376	Li-Heparin/Gel	4.5		13 x 100	Papir	100/1000
366567	Li-Heparin/Gel	4.5		13 x 100	Transparent	100/1000
367378	Li-Heparin/Gel	8		16 x 100	Papir	100/1000
365321	Li-Heparin/Gel	8		16 x 100	Strekkod	100/1000

1. VS5924 Improved Plasma Purity of the BD Vacutainer® PST™ II Plastic Tubes

2. VS5925 Analyte Stability Supports Extended Use of Plasma Collected in the BD Vacutainer® PST™ II Plastic Tubes

3. VS5919 Comparison of BD PST™ Plus to BD PST™ II for 22 Chemistry Analytes and 3 Cardiac Markers

Kontakt os venligst, hvis De ønsker kopier af BDs kliniske studier BD Vacutainer® PST™ & BD PST™ II tubes