

BD Vacutainer® Plasma-rør (heparin)



Anvendelsesområde: BD Vacutainer® plasma-rør indeholder natrium- eller litiumheparin, og anvendes generelt til plasmabestemmelse i klinisk kemi.

Tilsætning: Koncentrationen af lithium- og natriumheparin-additivet i BD Vacutainer® plasma-rør er 17 IU heparin per ml blod. Additivet i plastikrør er påsprøjtet indervæggen, og i rør fremstillet af glas er det enten frysetørret (2 og 3 ml) eller vacuumtørret (5 og 7 ml).

Blanding: Plasma-rør vendes op og ned 1800 8-10 gange.

Centrifugering: ≤ 1300g i 10 minutter ved stuetemperatur (~22°C). Plasma-rør kan centrifugeres umiddelbart efter prøvetagningen.

Andet: Rørene findes i mange forskellige størrelser i plastik og er markeret med en grøn prop.

BD art nr	Tilsætning	Vol. (ml)	Farve	Størrelse (mm)	Etikettype	Æske/karton mængde
BD Vacutainer® Lithium-Heparinrør i plast med grøn BD Hemogard™-lukning						
368494	Lithium-Heparin	2		13 x 75	Papir	100/1000
368272	Lithium-Heparin	2		13 x 75	Transparent	100/1000
368496	Lithium-Heparin	4		13 x 75	Transparent	100/1000
368884	Lithium-Heparin	4		13 x 75	Papir	100/1000
368886	Lithium-Heparin	6		13 x 100	Papir	100/1000
368889	Lithium-Heparin	6		13 x 100	Transparent	100/1000
367526	Lithium-Heparin	10		16 x 100	Papir	100/1000
BD Vacutainer® Natrium-Heparinrør i plast med grøn BD Hemogard™-lukning						
367869	Natrium-Heparin	4		13 x 75	Papir	100/1000
367876	Natrium-Heparin	6		13 x 100	Papir	100/1000
BD Vacutainer® Natrium-Heparinrør af glas med grøn traditionel-lukning						
368480	Natrium-Heparin	10		16 x 100	Papir	100/1000

Kontakt os venligst, hvis De ønsker kopier af BDs kliniske studier med BD Vacutainer® plasma-rør.