



BD Vacutainer® Eclipse™

Blodprøvetagningskanyle

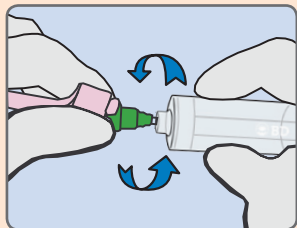


1 Tag handsker på, hold på sikkerhedsskjoldet og den farvede kanylebeskyttelseshætte, vrid og fjern den hvide beskyttelseshætte på bagkanylen. Indsæt lueradapteren i holderen og roter holderen med uret indtil den sidder godt fast.

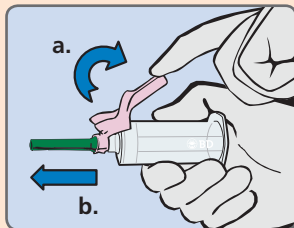


2a Vip sikkerhedsskjoldet hele vejen tilbage indtil den når holderen.


2b Drej og tag den farvede kanylebeskyttelseshætte af. Notér at kanylens øje altid er i korrekt position til veneblodprøvetagning. Vrid eller rotér **IKKE** sikkerhedsskjoldet.

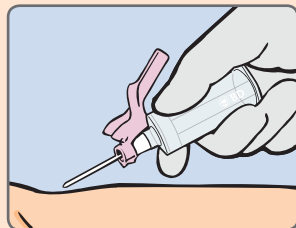

3 Foretag veneblodprøvetagning efter de gældende regler og procedurer på din arbejdsplads.

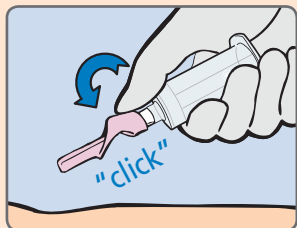

4 Umiddelbart efter at have fjernet kanylen fra venen, placér din tommelfinger direkte på sikkerhedsskjoldets tommelfinger flade. Skub sikkerhedsskjoldet fremad for at dække nålen ved hjælp af en-hånds teknik. Når sikkerhedsskjoldet låser sig om nålen, vil du høre et klik. Forsøg **IKKE** at aktivere sikkerhedsskjoldet ved at presse det mod en hård overflade.

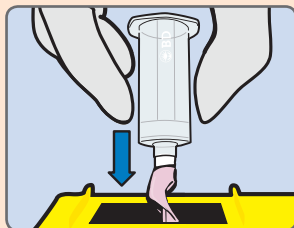


5 Efter aktivering af sikkerhedsskjoldet bortskaffes kanylen øjeblikkeligt i en godkendt kanyleboks. Kanylen og engangs-holder bortskaffes samlet.

Såfremt der ikke benyttes engangs-holder følges producentens retningslinjer for hvordan produkterne adskilles igen.



BD Diagnostics
Preanalytical Systems

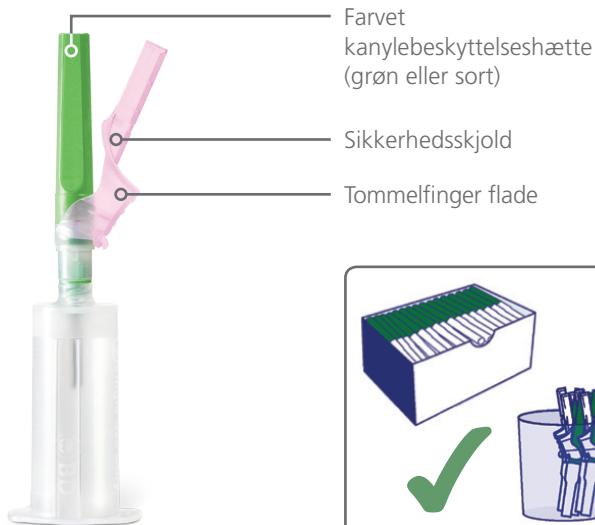

Farvet
kanylebeskyttelseshætte
(grøn eller sort)

Sikkerhedsskjold

Tommelfinger flade

BD Vacutainer® Eclipse™ Blodprøvetagningskanyle


Katalognumre:

368609

21G (0,8 mm), 3,2 cm kanyle

368610

22G (0,7 mm), 3,2 cm kanyle

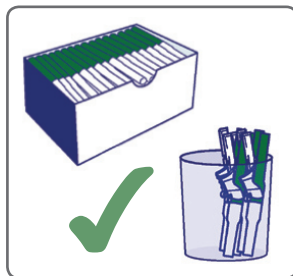

Product opbevaring

Det anbefales, at BD Vacutainer® Eclipse™ Blodprøvetagningskanyler dispenseres direkte fra BD forpakningen. Hvis du vælger at dispensere uden for BD forpakningen, skal du sikre, at alle grønne / sort farvede hætter vender opad i beholderen. Pak BD Vacutainer® Eclipse™ Blodprøvetagningskanyler løst i beholderen.

www.bd.com/vacutainer

FORSIGTIG: Håndter alle biologiske prøver og blodprøvetagnings "skarpe genstande" (lancetter, kanyler, luer-adaptore og blodprøvetagningsæt) i henhold til de gældende regler og procedurer på din arbejdsplads. Opsøg relevant lægelig hjælp i tilfælde af eksponering af biologiske prøver (for eksempel ved en stik skade), da prøver kan overføre viral hepatitis, HIV (AIDS) eller andre smitsomme sygdomme. Udnyt enhver sikkerhedsfunktion på blodprøvetagningsudstyret, såfremt det er et sikkerhedsprodukt. Bortskaf alle blodprøvetagnings "skarpe genstande" i en kanyleboks til biologisk materiale.



BD Diagnostics

Preanalytical Systems

Brugsanvisning for BD Vacutainer® Eclipse™ Blodprøvetagningskanyle , EA, 040512, 01, EN

BD, BD's logo og alle andre varemærker tilhører Becton, Dickinson and Company. ©2013 BD.

Becton Dickinson A/S
Herstedøstervej 27-29, bygn. A, 2. Sal
DK-2620 Albertslund
Telefon: +45 43 43 45 66
Fax: +45 88 51 00 01
Mail: bd Denmark@europe.bd.com