


BD Vacutainer® Safety-Lok™


Blodprøvetagningssæt

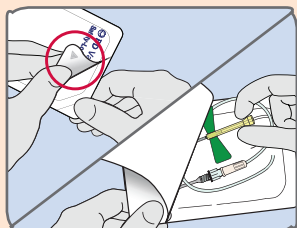


1a Tag handsker på og åbn pakningen ved pilen, så der åbnes ind til veneprøvetagningssættet .

1b Tag fat på kroppen af veneprøvetagningssættet med tommel- og pegefinger og fjern det fra pakningen.


1c Montér en BD Vacutainer® Engangsholder.

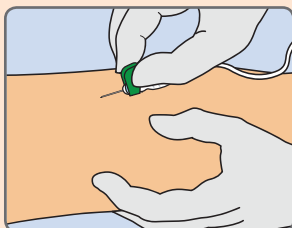


2 Hold på vingerne eller selve kroppen af produktet med din tommel- og pegefinger. Fjern kanylens beskyttelseshætte og foretag veneblodprøvetagning efter de gældende regler og procedurer på din arbejdsplads.

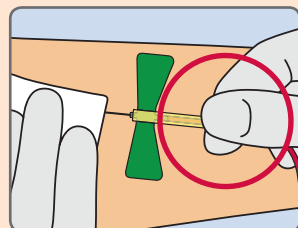

3 Tag fat for enden af sikkerhedsskjoldet med din tommel- og pegefinger. Tag kanylen ud af venen. Pres på veneprøvetagningsstedet efter de gældende regler og procedurer på din arbejdsplads.

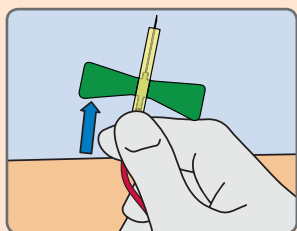

4 Brug de tilbageværende fingre til at holde slangen sikkert ind til din håndflade. Skub nu din tommel- og pegefinger fremad, hvorved sikkerhedsskjoldet skubbes fremad indtil det dækker spidsen af kanylen. Aktiveringen bekræftes af et hørligt klik.

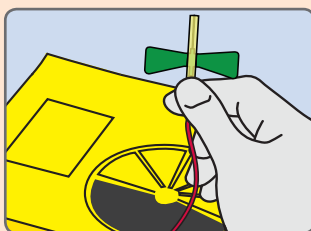

5 Efter aktivering af sikkerhedsmekanismen, bortskaf øjeblikkelig veneprøvetagningssættet og engangsholder samlet i en godkendt kanyleboks. Såfremt der ikke benyttes engangsholder følges producentens retningslinjer for hvordan produkterne adskilles igen.



BD Diagnostics
Preanalytical Systems



BD Vacutainer® Safety-Lok™ Blodprøvetagningsæt

Katalognumre:

367282 med lueradapter 21G (0,8 mm), 19 mm kanyle, 17,8 cm slange

367286 med lueradapter 21G (0,8 mm), 19 mm kanyle, 30,5 cm slange

367284 med lueradapter 23G (0,6 mm), 19 mm kanyle, 17,8 cm slange

367288 med lueradapter 23G (0,6 mm), 19 mm kanyle, 30,5 cm slange

367295 med lueradapter 25G (0,5 mm), 19 mm kanyle, 17,8 cm slange

367246 uden lueradapter 21G (0,8 mm), 19 mm kanyle, 30,5 cm slange

367247 uden lueradapter 23G (0,6 mm), 19 mm kanyle, 30,5 cm slange

www.bd.com/vacutainer

FORSIGTIG: Håndter alle biologiske prøver og blodprøvetagnings "skarpe genstande" (lancetter, kanyler, luer-adaptore og blodprøvetagningsæt) i henhold til de gældende regler og procedurer på din arbejdsplads. Opsøg relevant lægelig hjælp i tilfælde af eksponering af biologiske prøver (for eksempel ved en stik skade), da prøver kan overføre viral hepatitis, HIV (AIDS) eller andre smitsomme sygdomme. Udnyt enhver sikkerhedsfunktion på blodprøvetagningsudstyret, såfremt det er et sikkerhedsprodukt. Bortskaf alle blodprøvetagnings "skarpe genstande" i en kanyleboks til biologisk materiale.



BD Diagnostics
Preanalytical Systems

Brugsanvisning for BD Vacutainer® Safety-Lok™ Blood Collection Set, EA, 200611, 01, EN

BD, BD's logo og alle andre varemærker tilhører Becton, Dickinson and Company. ©2013 BD.

Becton Dickinson A/S
Herstedøstervej 27-29, bygn. A, 2. Sal
DK-2620 Albertslund
Telefon: +45 43 43 45 66
Fax: +45 88 51 00 01
Mail: bd Denmark@europe.bd.com