





Bandager

Med silikoneklæber

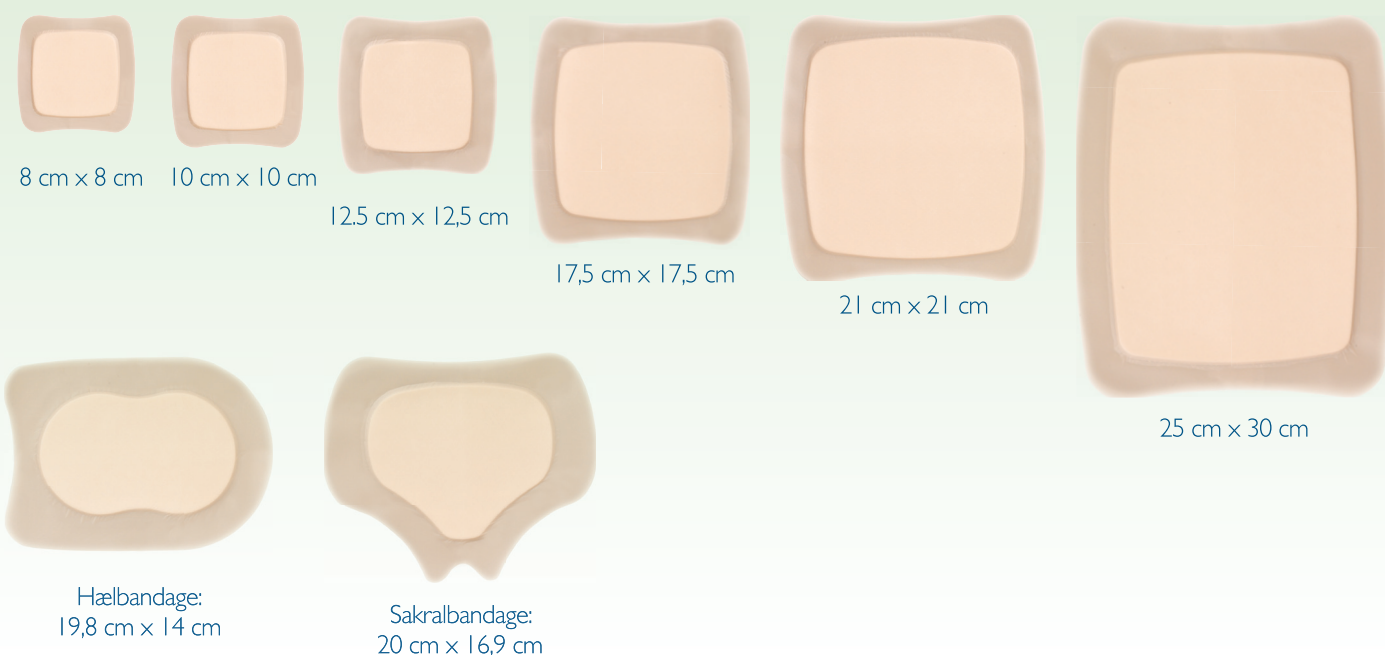


Ikke-klæbende

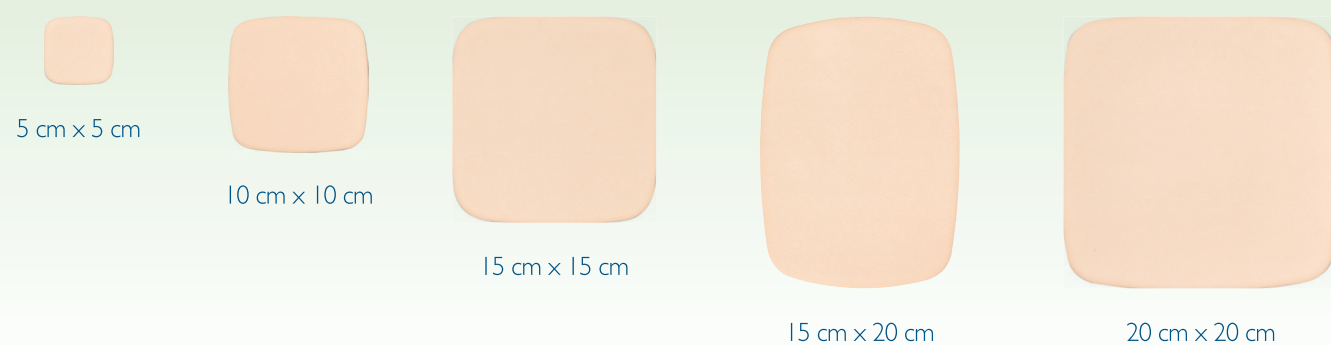

®/™ er varemærker tilhørende ConvaTec Inc.

ConvaTec Denmark ApS
Birkerød Kongevej 2. 3460 Birkerød
Tlf.: 4816 7474. Fax. 4816 7045
E-mail: convatec.danmark@convatec.com

Alt det du elsker ved skumbandager og mere til

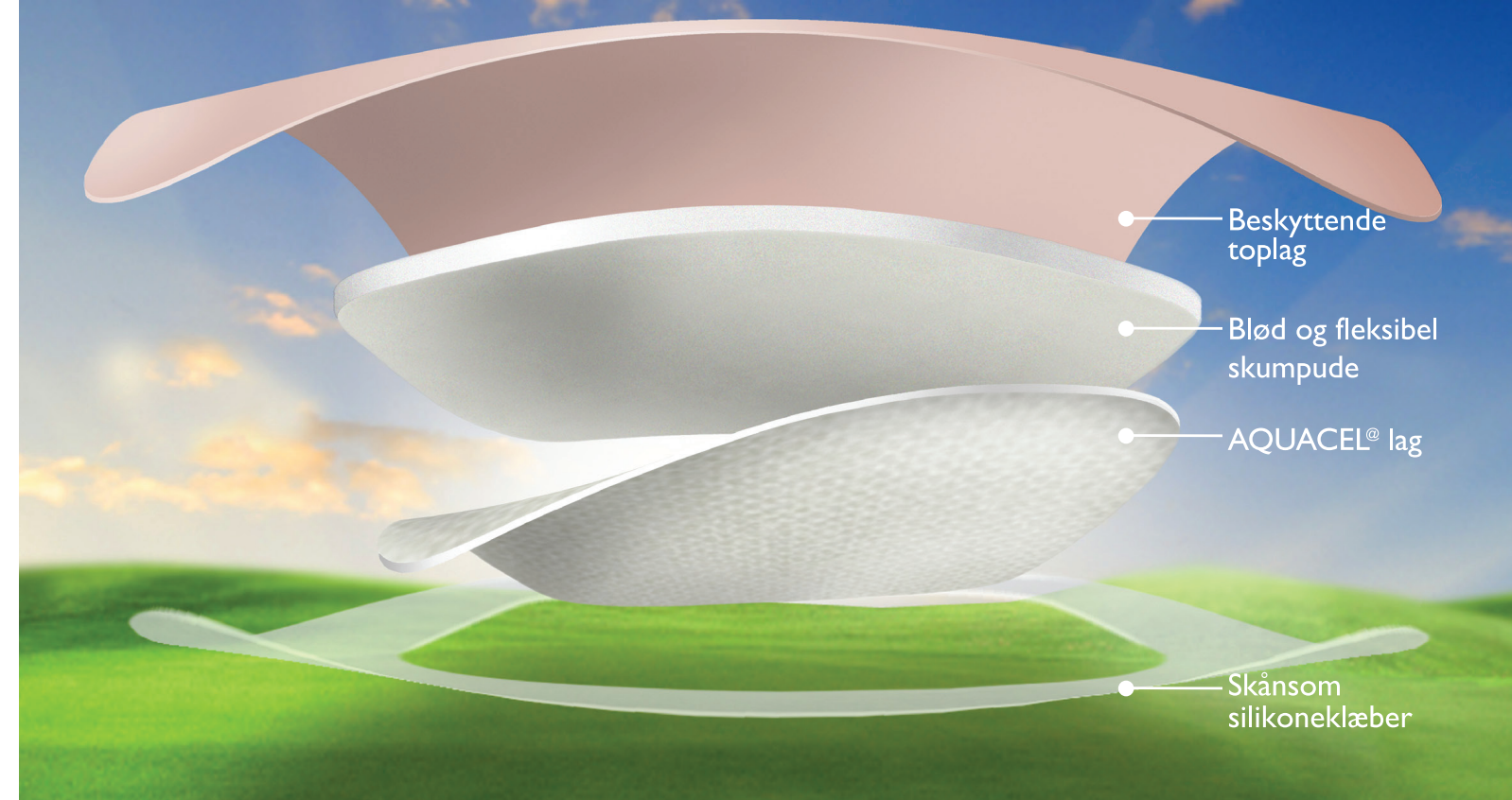

Kun én bandage kan give dig skumbandagens komfort og enkelthed samt AQUACEL® bandagens ophelende egenskaber



Applikationsguide

Applicering:

AQUACEL® Foam bandage kan anvendes både som primærbandage eller som sekundærbandage.

Vælg bandage – vælg størrelse og form på bandagen, så bandagens absorberende pude er mindst 1 cm større end såret. Bandagen kan tilklippes i ønsket størrelse og form. Hvis AQUACEL® Foam bandage med klæber tilklippes, kan yderligere fiksat ion være nødvendig for at holde bandagen på plads.

Tag bandagen ud af den sterile emballage og undgå berøring med sårkontaktlaget og den klæbende flade. Hvis der anvendes en bandage med klæber, skal beskyttelsespapiret tages af.

Applicér bandagen over sårets centrum. Ved applicering af AQUACEL® Foam bandage med klæber følges klæbekanten med fingrene for at sikre, at bandagen hæfter godt.

Ved anvendelse af en bandage uden klæber eller hvis en bandage med klæber tilklippes i ønsket form eller størrelse, bør anden fiksat ion anvendes for at holde bandagen på plads.



Bandageskift og fjernelse:

Bandagen skiftes, når det er klinisk indikeret (f.eks. ved lækage, blødning, tiltagende smerter eller ved mistanke om infektion). AQUACEL® Foam bandage må sidde på i op til 7 dage.

Såret rengøres efter gældende rutiner.

Ved fjernelse af bandagen, tryk forsigtigt ned på huden og løsn det ene hjørne af bandagen. Fortsæt indtil hele klæbekanten er løsnet og fjern forsigtigt bandagen.



* For yderligere information, se brugsanvisning i pakningen.

Applicering på vanskeligt bandagerbare områder:

AQUACEL® Foam bandage fås i forskellige størrelser og former samt i en sakral- og hælbandage til vanskeligt bandagerbare områder:

Sakralbandage:



1. Fjern beskyttelsespapiret.
2. Fold bandagen sammen på midten med bandagens yderside mod hinanden. Placer folden i analfuren.
3. Applicér nu bandagen, følg klæbekanten med fingrene for at sikre, at bandagen hæfter godt.

Hælbandage:



1. Fjern beskyttelsespapiret.
2. Applicér den øverste del af bandagen på hæls bagside og fastgør klæberen.
3. Fold nu bandagen ned under hælen og fastgør resten af klæbekanten, så den klæber sikkert og godt.

Bandagering med hælbandage på små fødder:



1. Vælg en firkantet bandage med klæber i passende størrelse. Fjern ikke beskyttelsespapiret. Klip to ca. 3 cm lange diagonale klip i bandagen.
2. Fjern beskyttelsespapiret. Applicér den øverste del af bandagen på hæls bagside og fastgør klæberen.
3. Fold nu bandagen ned under hælen og fastgør resten af klæbekanten, så den klæber sikkert og godt. Overvej om der er behov for yderligere fiksat ion for at holde bandagen på plads.

Forslag til bandagering af albue, fingre og tæer



Bandagen kan tilklippes i ønsket størrelse og form.

Yderligere fiksat ion kan være nødvendig for at holde bandagen på plads.