


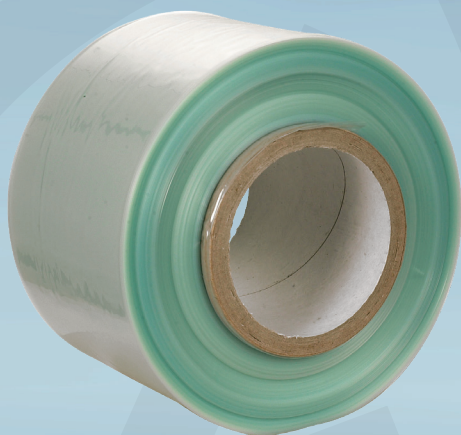

Varenummer 232325

Rørfolie, Sterifol, 200m x 10cm, nylon, til tørsterilisation

Produktbeskrivelse

Rørfolie anvendes til indpakning af instrumenter inden sterilisation i tørsterilisator. Instrumenterne skal rengøres og desinficeres inden de pakkes i rørfolien. Rørfolien lukkes med tørsteriliseringstape eller ved hjælp af svejsemaskine. Anbefalet steriliseringstid 160^o celsius i 2 timer, tidsrummet er at regne fra den angivne temperatur i sterilisatoren er opnået. Rørfolien kan anvendes i temperatur intervallet -40°C - 180°C.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Rørfolie
Varemærke	Sterifol
Features	Til tørsterilisation
Materiale	Nylon
Længde/dybde	200 m
Bredde	10 cm
Holdbarhed	1 år
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	32 cm	48 cm	10 cm	
stk	1 stk				