

Visuel aflæsning af urinstix (Multistix)

Urinen opsamles i en ren og tør beholder.
Morgenurin foretrækkes.
Prøven analyseres indenfor 2 timer.

1. Tag en teststix ud af beholderen
Skru altid låget helt til efter udtagning
Fjern aldrig tørremidlet.



2. Dyp hurtigt alle reagensfelter i friskladt, velblandet og ucentrifugeret urin.

3. Træk stixen op af uringlasset, mens siden af stixen holdes mod beholderens kant, og sæt herefter kanten af stixen mod et stykke papir for at fjerne overskydende urin.



4. Start stopuret.

5. **Hold stixen vandret under aflæsning.**
Sammenlign testfelterne med farveskalaen efter den givne tid for de enkelte felter.

God belysning og tidtagning er nødvendigt for pålidelige semikvantitative resultater.



6. Notér patient-identitet og aflæste resultater på resultatblokken.

Ønskes yderligere information
Kontakt:
Siemens Healthcare Diagnostics
Tlf.: 4477 4814