

Chek-Stix Combo Pack

Siemens
Healthineers

Chek-Stix Combo Pack – Siemens Healthineers

3099227 Clinitek Status Check-stix Combo Pack 2x25pcs

Chek-Stix bør anvendes regelmæssigt til bestemmelse af om urinstrips fra Siemens reagerer korrekt samt til kontrol af brugerens evne til at udføre urinanalyse samt fortolke resultatet korrekt.

Læs **altid** pakningsvedlægget grundigt før brug.

Vejledning:

1. Fyld to spidsglas med præcis 12 mL deioniseret/destilleret vand samt korrekt mærkning, ét til negativ kontrol og ét til positiv kontrol.
2. Tag en negativ kontrolstrip op af beholderen, skru straks låget stramt på igen.
3. Anbring kontrolstrip'en i spidsglasset, skru låget stramt på.
4. Gentag pkt. 1 – 3 for den positive kontrol.
5. Vend spidsglassene omhyggeligt i 2 minutter.
6. Lad spidsglassene henstå i 30 minutter ved stuetemperatur.
7. Vend igen spidsglassene, fjern og kassér kontrolstrip'ene.

Efter rekonstitution skal kontrollerne håndteres og analyseres på samme måde som en urinprøve. De forventede kontrolværdier kan ses i pakningsvedlægget. Analysér altid den negative kontrol først.

For yderligere information se pakningsvedlægget.