



Clinitek Status+®

Urinstixvejledning

www.healthcare.siemens.dk

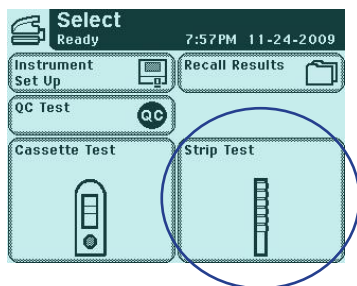

- Urinprøven skal have stuetemperatur
- Urinprøven skal være frisk og velblandet
- Vælg Strip Test på skærmen
- Tryk på Enter New Patient
- Indtast CPR nr. eller navn og tryk Enter
- Tag en urinstix ud af beholderen, skru låget på igen.

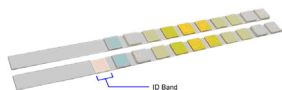

Indenfor 8 sekunder udføres følgende :

- Tryk Start
- Dyp en urinstix hurtigt i urinprøven og hold den mod beholderens kant når den tages op
- Hold siden af stixen mod et stykke cellostof eller lignende
- Placér stixen på slædeindsatsen



- Apparatet aflæser stixen og tæller ned
- Resultatet udskrives og vises på skærmen
- Tryk DONE på skærmen for at komme tilbage til start
- Stixen kasseres og slædeindsatsen aftørres med en spritswab. Spritswaben må ikke indeholde klorhexidin eller glycerol



For fuld dokumentation henvises til:
Clinitek Status Brugervejledning
(132496 Rev B 2004-11)
Multistix indlægseddél (AN30429L)

SIEMENS
Healthineers