


Vejledning til brug af Urin-Monovette

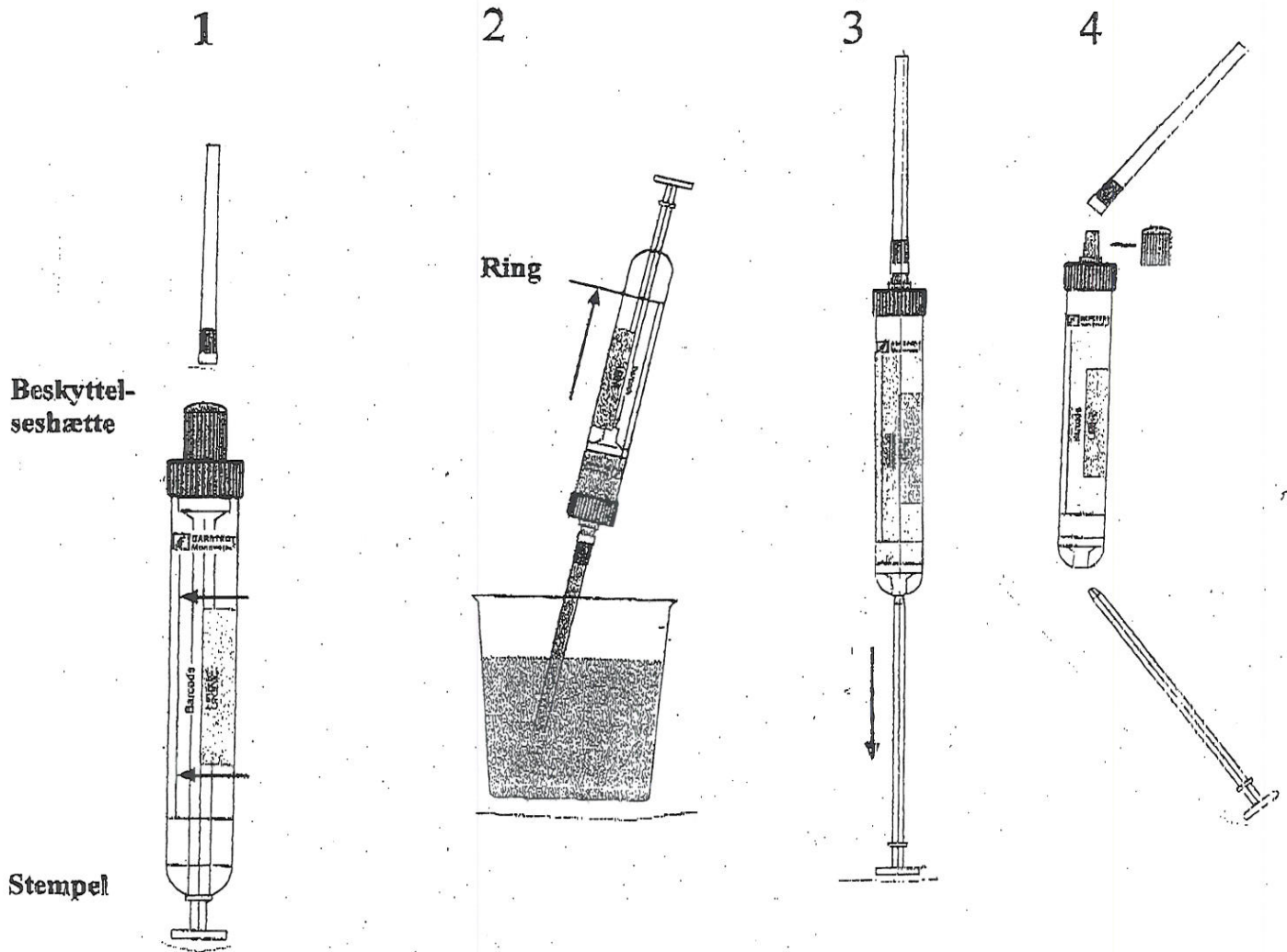

1) Fjern den grønne beskyttelseshætte.
Monter opsugningsspidsen.

2) Sæt opsugningsspidsen ned i Urinopsamlingsbeholderen.

3) Træk stemplet tilbage til ringen. Vend prøveglasset med spidsen opad og træk derefter stemplet yderligere tilbage/ i bund, for at tømme opsugningsspidsen.

4) Knæk stempelstangen af og afmonter opsugningsspidsen (Begge kasseres).

Sæt beskyttelseshætten på igen.