



Tryghed og viden



– for menneskers skyld

Brugsanvisning

3M™ 1262 ATTEST™

Biologisk Indikator til kontrol af dampsteriliseringsprocesser


1. Identificere Attest ampulen ved at notere autoklavenummeret, ladnings-nummeret, placering i kammeret samt procesdato på etiketten.
2. Placér seks Attest biologiske indikatorer og en 3M kemisk indikator i en testpakke, eller i en bakke som er repræsentativ for ladningen og som udgør den største udfordring for dampsteriliseringsprocessen. Luk posen med 3M autoklavetape.
N.B.! Brug ikke 1226 Attest til tør, varmluftsterilisatorer eller i formalinovn.
3. Placér testpakkerne eller bakken i en fuld ladning på de vanskeligst tilgængelige steder for damperne. Start processen.
4. Fjern testpakkerne eller bakken og lad dem afkøle tilstrækkeligt (mindst 10 minutter) før håndtering.
NB! Efter sterilisering er væsken i Attest ampulen kogende under højtryk. Hvis ampulen ikke bliver afkølet i mindst 10 min. kan glasampulen revne og forårsage skader med glassplintre.
5. Kontrollér farveændringen på den kemiske indikator på ydersiden af pakken.
6. Fjern den biologiske indikator fra pakken eller bakken. Kontrollér at den kemiske indikatorstribе på Attest ampulen har ændret farve fra rosa til brun. Kontrollér også farveændring i den interne kemiske indikator. En ufuldstændig farveændring indikerer utilstrækkelig steriliseringsproces.

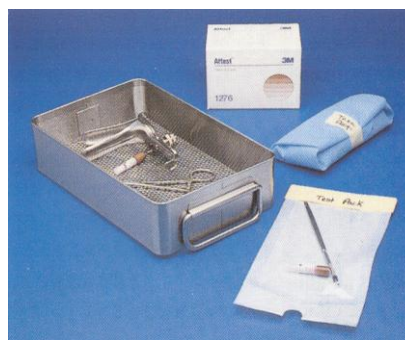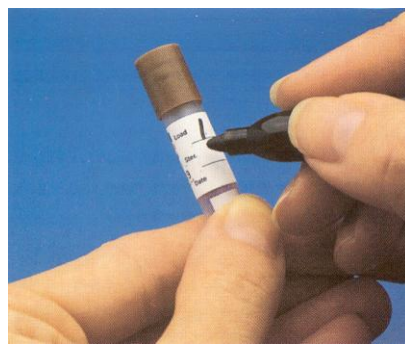

7. Inkubér den biologiske indikator, så hurtigt som muligt, eller opbevar den i køleskab indtil den kan inkuberes. Lad inkubatoren altid være tilkoblet strømmen, således at den er klar til brug.
 - a. Placér bunden af den biologiske indikator i en ca. 450 vinkel mod fordybningen i inkubatoren, som vist.
 - b. Tryk den biologiske indikator ampul bagover, således at glasampulen med vækstmediet knuses og indikatoren aktiveres.
 - c. Tryk den aktiverede indikator ampul ned, således at den sidder fast i varmfordybningen. Den brune hætte skal være over fordybningen.

Aflæsning

1. Aflæs eventuel farveændringer på den biologiske indikator med jævne mellemrum, 8, 12, 24 og 48 timer. Gul farve indikerer bakterievækst (positiv resultat) og utilstrækkelig steriliserings-proces. Ingen farveændring indikerer en tilstrækkelig steriliseringsproces.
2. Den endelige aflæsning gøres efter 48 timer.
3. Skriv resultaterne ned i Attest logbogen.

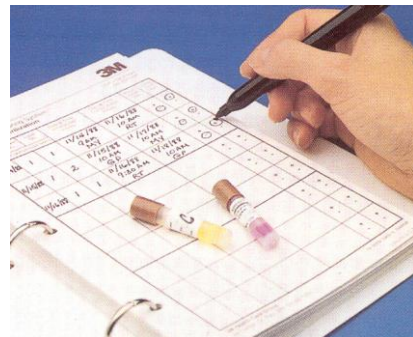

Kontrolkørsel

Kontrolkørsel er påkrævet for at sikre rigtige inkubationsforhold, bakteriesporenes levedygtighed og mediets evne til at fremme vækst. En ikke-steriliseret Attest biologisk indikator fra samme lotnummer anvendes som vækstkontrol hver gang.

1. Placér en ikke-steriliseret Attest biologisk indikator i inkubatoren hver gang steriliserede biologiske indikatorer aktiveres.
2. Aflæs farveændringen med jævne mellemrum f.eks. efter 8, 12, 24, 48 timer. Gul farveændring viser bakterievækst. Gul farve i kontrolampulen viser korrekt inkubering, sporens levedygtighed og mediets evne til at fremme hurtig vækst.
3. Notér resultaterne i Attest logbogen.
4. Kassér de brugte indikatorer iflg. institutionens regler. Hvis det ønskes, kan de positive prøver autoklaveres ved 121 °C i mindst 20 min.



1262 Attest biologisk indikator er holdbar i 2 år fra produktionsdatoen og skal opbevares ved stuetemperatur med en relativ fugtighed på 35%-60%. Må ikke opbevares sammen med kemikalier.