

QuikRead® CRP prefyldte cuvetter

Kort brugsvejledning



QuikRead® CRP prefylde cuvetter

Opbevaring af reagens



Uåbnet kit æske

Opbevaring ved 2-8°C:
Indtil udløbsdatoen på kittet.



Reagenslåg

Opbevaring ved 2-8°C:
Indtil udløbsdatoen på kittet.
Opbevaring ved 18-25°C:
1 måned.
Opbevaring ved 18-25°C:
7,5 timer/dag - 3 måneder.



Prefylde cuvetter i uåbnet foliepakning

Opbevaring ved 2-25°C:
Indtil udløbsdatoen på kittet.



Åbnet cuvette

Testen skal udføres inden
2 timer fra cuvetten åbnes.
Vent til bufferen har
stuetemperatur, før testen
udføres.



Prefylde cuvetter uden foliepakning

Opbevaring ved 2-8°C:
6 måneder fra fjernelse af
foliepakningen.
Opbevaring ved 18-25°C:
3 måneder fra fjernelse af
foliepakningen.

Find yderligere information på: www.quikread.com

QuikRead®